
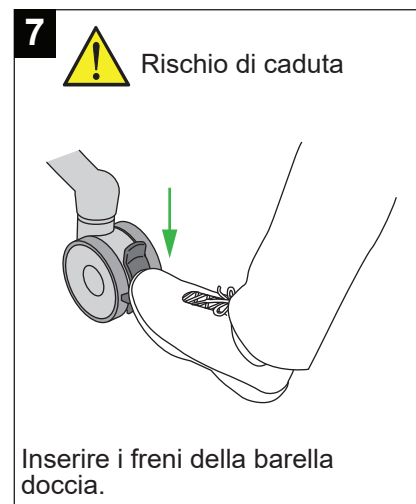
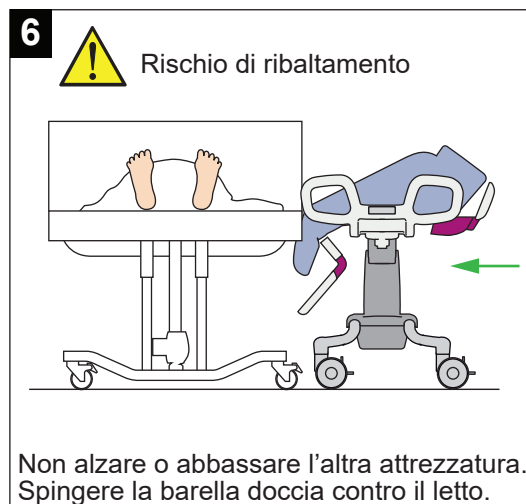


# Carevo

## Trasferimento dal letto

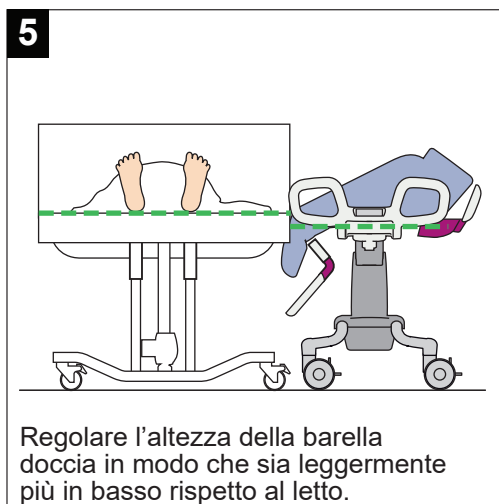


*Continua alla pagina successiva*

## Trasferimento dal letto (continua)

9



Rischio di scivolamento

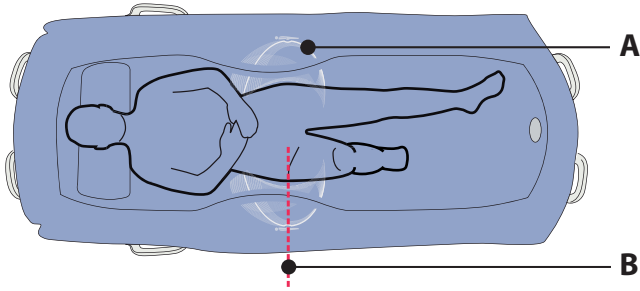


Tenere i lati del materasso sollevati, non piegati.  
Posizionare il paziente correttamente sulla flexi zone.  
Natiche del paziente all'interno del profilo grafico (A).  
Pieghie dell'anca del paziente allineate con la figura umana (B).

10



Sostituire il cuscino del letto con il cuscino per la testa della barella doccia.  
Rimuovere il telino ad alto scorrimento.

11

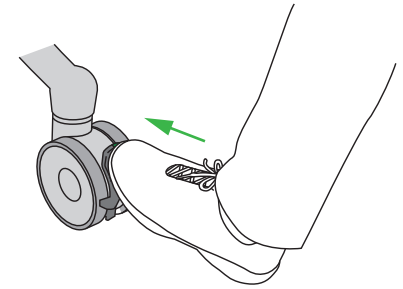

Disinserire i freni della barella doccia.

12




Rischio di intrappolamento  
Rischio di caduta



Tenere i capelli, le braccia e i piedi del paziente vicino al corpo.  
Allontanare la barella doccia dal letto quanto basta per dispiegare in alto e bloccare la sponda laterale della barella doccia.


13

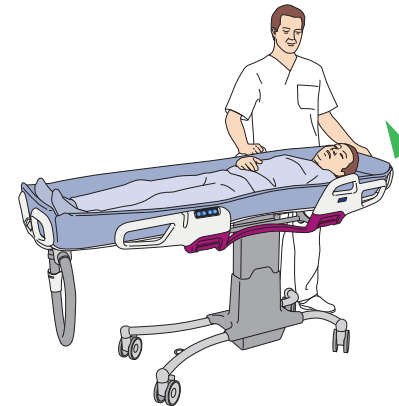

Alzare lo schienale regolabile della barella doccia, se presente.  
Trasportare il paziente.


## Trasferimento del paziente sul letto

1

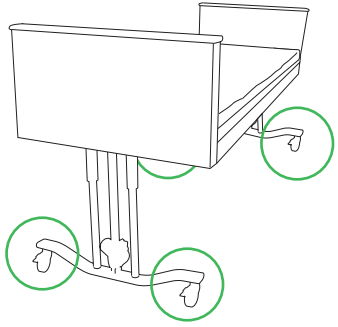

Inserire i freni del letto.  
Abbassare la spondina del letto sul lato del trasferimento.

2

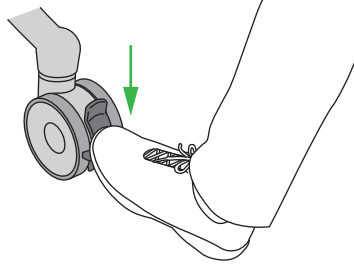


Inserire i freni della barella doccia.  
Abbassare lo schienale regolabile della barella doccia, se presente.

3



Posizionare un telino ad alto scorrimento sotto il paziente.

4

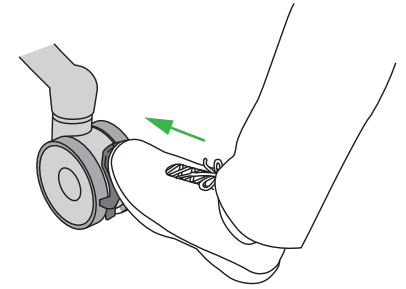

Disinserire i freni della barella doccia.

5



Rischio di intrappolamento




Tenere i capelli, le braccia e i piedi del paziente vicino al corpo.  
Posizionare la barella doccia vicino al letto.  
Ripiegare la sponda laterale della barella doccia sul lato del trasferimento.

6



Rischio di ribaltamento

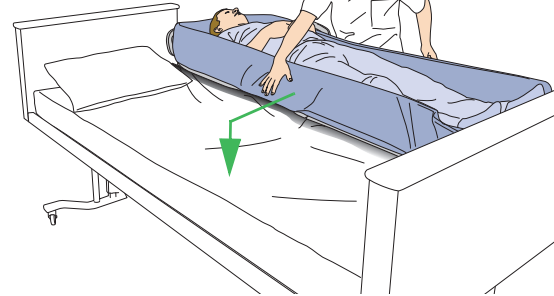


Posizionare immediatamente la barella doccia in modo che sia sovrapposta al letto.  
Abbassare la barella doccia sul letto per avere un trasferimento regolare.

7



Rischio di caduta

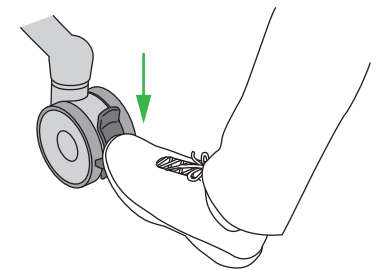


Inserire i freni della barella doccia.

*Continua alla pagina successiva*

## Trasferimento al letto (continua)

8

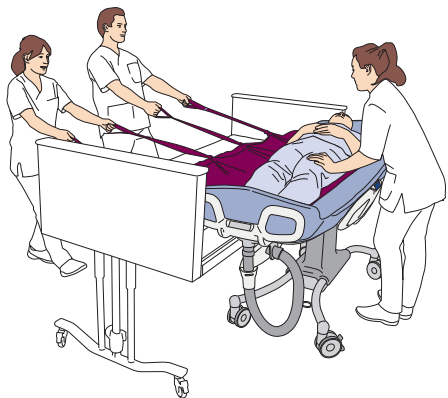


Verificare che il materasso della barella doccia sia sopra il letto.  
Trasferire il paziente con l'ausilio del telino ad alto scorrimento.  
Tenere d'occhio la testa del paziente.

9




Sostituire il cuscino per la testa della barella doccia con il cuscino del letto.  
Rimuovere il telino ad alto scorrimento.

10

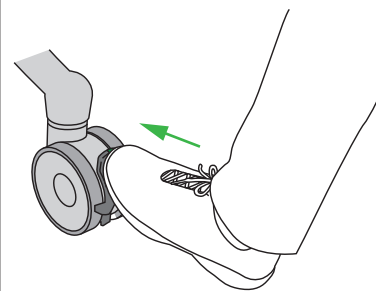

Disinserire i freni della barella doccia.


11

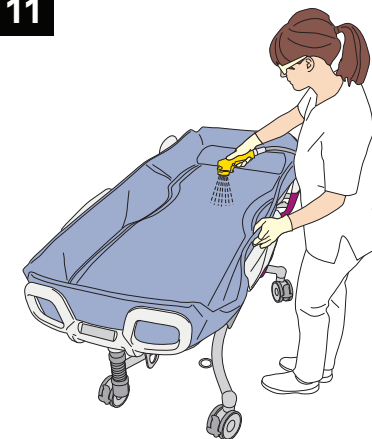

Allontanare la barella doccia dal letto.  
Disinfettare la barella doccia.

## Trasferimento dal sollevapazienti a corsetto

1

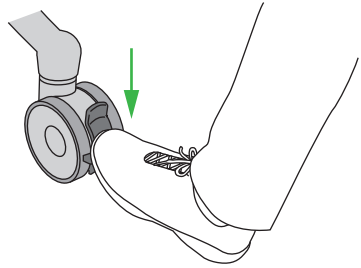

Barella doccia:

- Abbassare all'altezza minima
- Inserire i freni
- Piegare e bloccare le sponde laterali
- Posizionare il cuscino per la testa

2



Rischio di intrappolamento  
Rischio di caduta




Tenere i capelli, le braccia e i piedi del paziente vicino al corpo.  
Sollevare lo schienale regolabile della barella doccia in posizione seduta, se disponibile. Abbassare il paziente sulla barella doccia.

3




Rischio di scivolamento

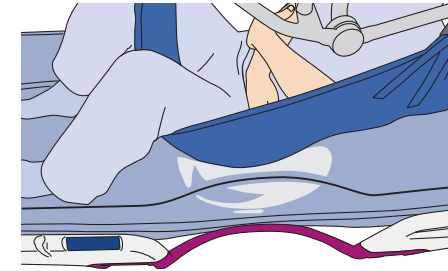


Tenere i lati del materasso sollevati, non piegati.  
Posizionare il paziente correttamente sulla flexi zone.  
Natiche del paziente all'interno del profilo grafico.  
Pieghie dell'anca del paziente allineate con la figura umana.

4

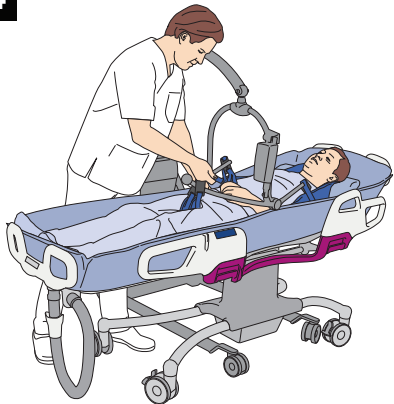

Rimuovere il corsetto dalla barra di sollevamento.  
Spostare il sollevapazienti lontano dalla barella doccia.

5

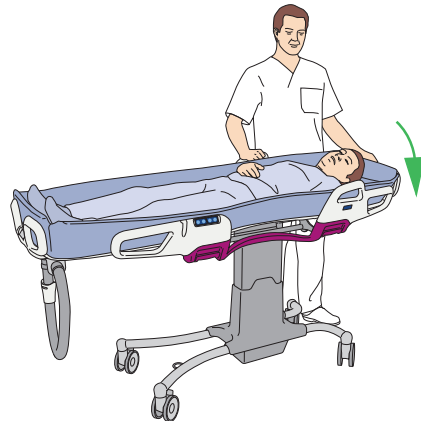


Portare la barella doccia a un'altezza ergonomica.  
Abbassare lo schienale regolabile della barella doccia, se presente.

6



Sfilare il corsetto da sotto il paziente.


7

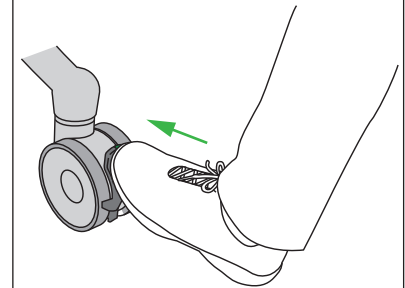

Disinserire i freni della barella doccia.  
Trasportare il paziente.


## Trasferimento al sollevapazienti a corsetto

1

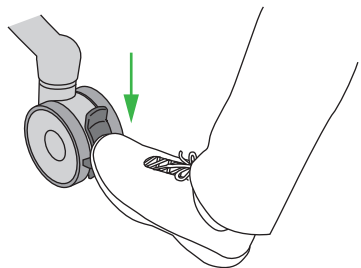


Inserire i freni della barella doccia.

2

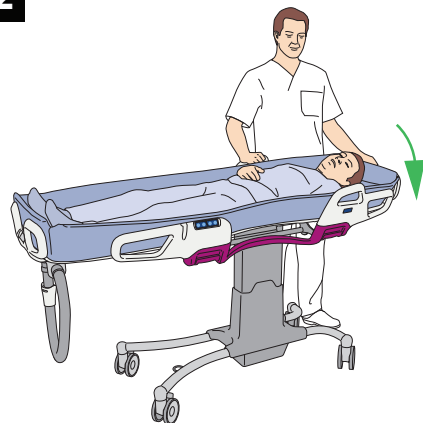

Abbassare lo schienale regolabile della barella doccia, se presente.

3

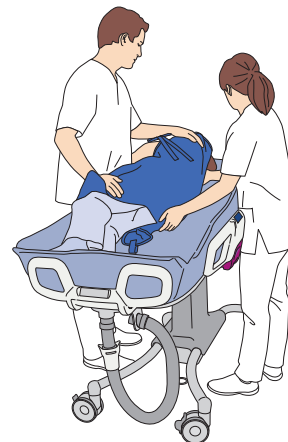

Applicare il corsetto al paziente.

4



Abbassare la barella doccia all'altezza minima. Posizionare la barra di sollevamento sopra la barella doccia. Attaccare il corsetto alla barra di sollevamento.

5




Rischio di intrappolamento  
Rischio di caduta



Tenere i capelli, le braccia e i piedi del paziente vicino al corpo.  
Bloccare le sponde laterali.  
Sollevare il paziente dalla barella doccia.


6

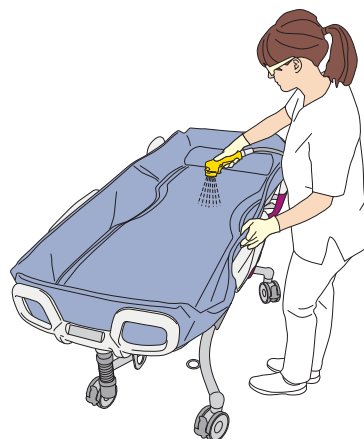

Disinfettare la barella doccia.

## Fare la doccia al paziente

1

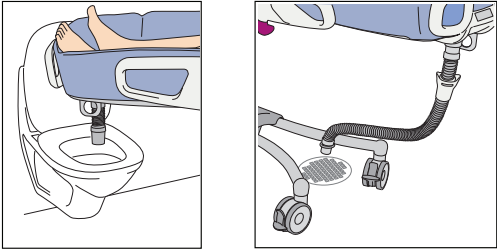


A

B

Posizionare lo scarico superiore della barella doccia sopra la toilette/vuotatoio (A) o posizionare lo scarico inferiore nel supporto del tubo di scarico, sopra lo scarico a pavimento (B).

2

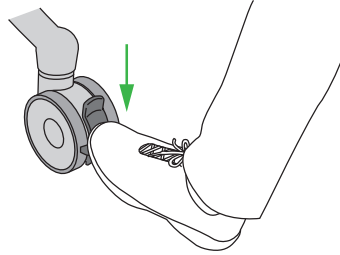


Inserire i freni della barella doccia.

3




Rischio di scottatura

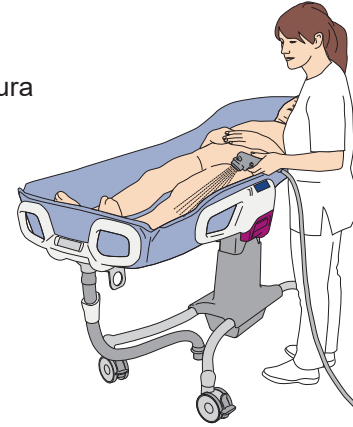


Svestire il paziente.  
Regolare la temperatura dell'acqua.  
Dirigere la doccetta lontano dal paziente.  
Aprire l'acqua.  
Controllare la temperatura con la mano nuda.

4

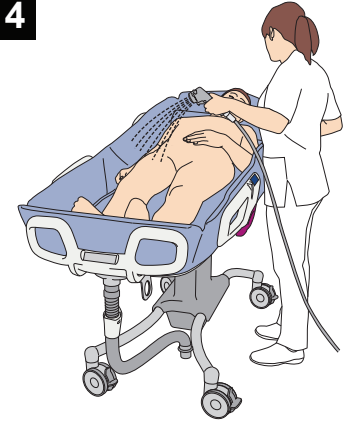


Fare la doccia al paziente.  
Per un bagno con un livello d'acqua poco profondo, chiudere lo scarico del materassino.

5

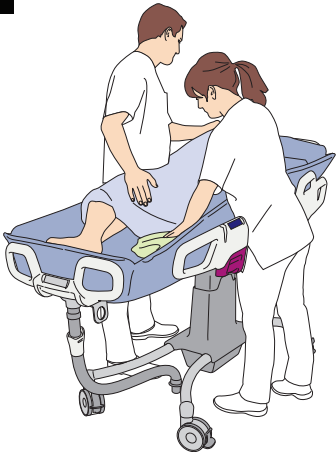

Scaricare l'acqua e asciugare paziente e materasso.

6

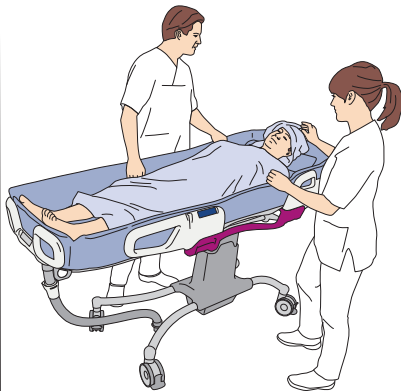


Coprire o vestire il paziente.

7




Inserire nuovamente l'uscita di scarico inferiore nel supporto o collegare lo scarico inferiore allo scarico superiore.

8

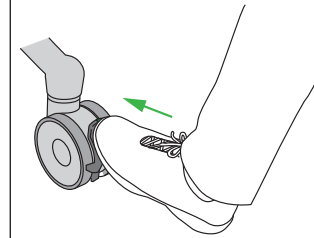

Disinserire i freni della barella doccia.

9

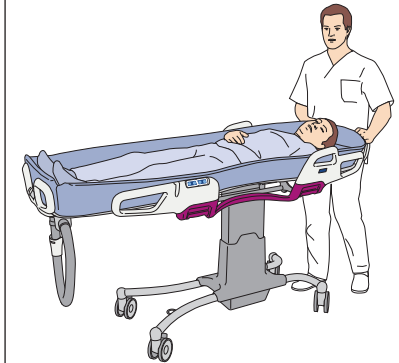

Trasportare il paziente.