

Carevo

ベッドからの移乗



1




ベッドのブレーキをかけます。

2



スライディングシートを患者の下に敷きます。
患者の頭の下にピローを置きます。
移乗側のベッドレールを折りたたみます。

3

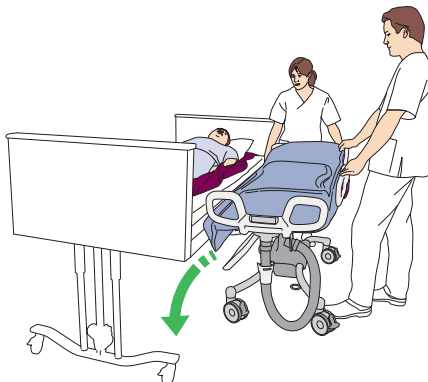


シャワートロリーをベッドの移乗側の横に配置します。移乗側のシャワートロリーのマットレスを下に折りたたみます。

4




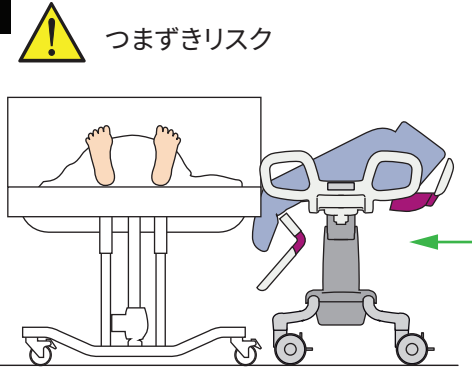
シャワートロリーのマットレスの角を頭部/足部パネルとサポートプレートの間押し付けて固定します。

5

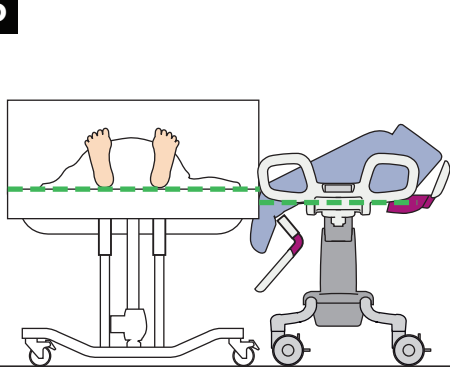


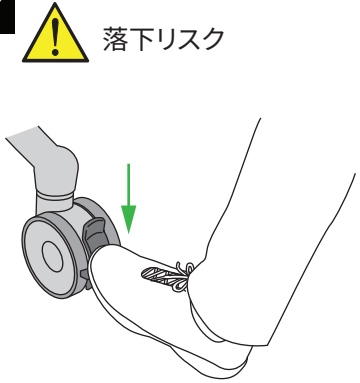
シャワートロリーがベッドよりもわずかに低くなるように高さを調整します。

6  つまずきリスク



その他の設備を上下させないでください。
シャワートロリーをベッドに押し付けます。

7  落下リスク



シャワートロリーにブレーキをかけます。

8  つまずきリスク



その他の設備を上下させないでください。
患者を移乗します。
患者の頭から目を離さないでください。


次ページのステップへ続きます。

ベッドからの移乗(続き)

9



滑るリスク

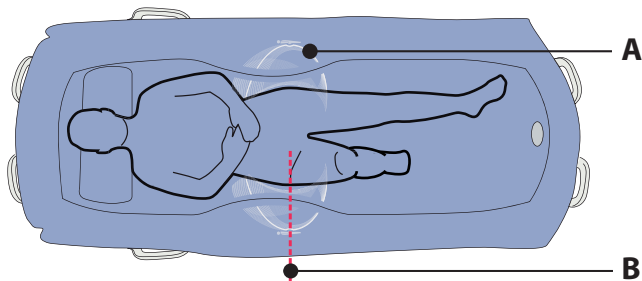


マットレスの側面を上向きにして、折り畳まないでください。
患者をフレキシゾーンに正しく配置します。
患者の臀部が輪郭部分の内側にある(A)。
患者の臀部が人体の図に沿っている(B)。

10



ベッドピローをシャワートロリーのヘッドピローと交換します。
スライディングシートを取り外します。

11

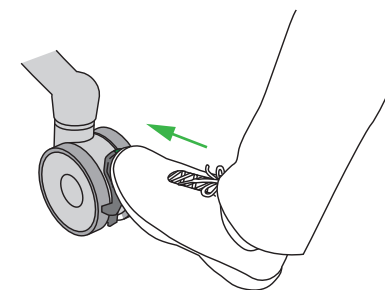


シャワートロリーのブレーキを解除します。

12




挟み込みリスク
落下リスク

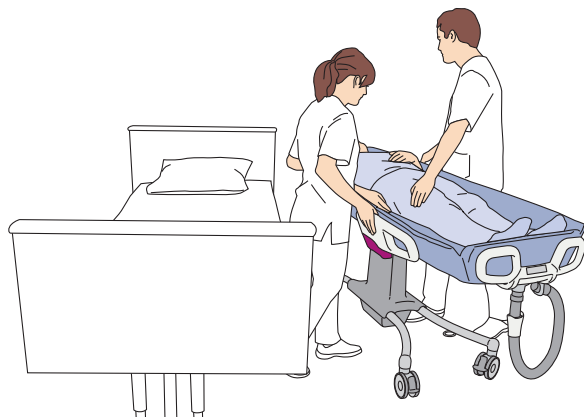

患者の髪、腕、足を体に密着させます。
シャワートロリーをベッドから慎重に離し、シャワートロリーのサイドサポートを上へ折り曲げてロックします。


13

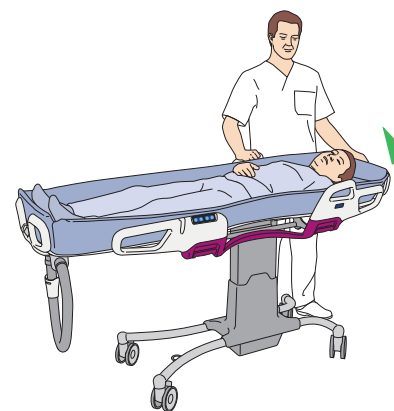

シャワートロリーの調整可能なバックサポートを上げます(該当する場合)。
患者を移乗します。


ベッドへの移乗

1

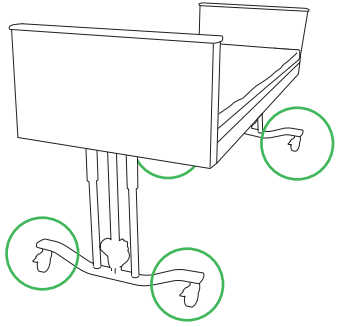

ベッドのブレーキをかけます。
移乗側のベッドレールを下に下げます。

2

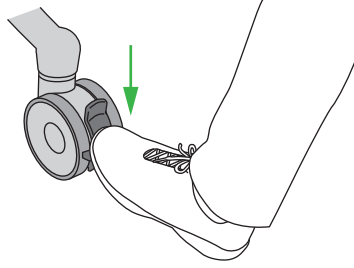


シャワートロリーにブレーキをかけます。
シャワートロリーの調整可能なバックサポートを下げます(該当する場合)。

3



スライディングシートを患者の下に敷きます。

4

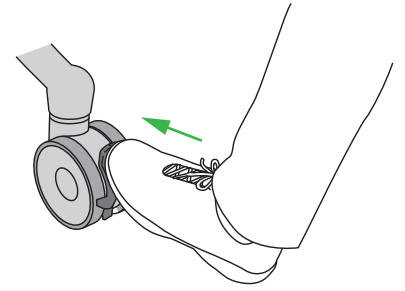

シャワートロリーのブレーキを解除します。

5



挟み込みリスク




患者の髪、腕、足を体に密着させます。
シャワートロリーをベッドの近くに配置します。
移乗側のシャワートロリーサイドサポートを下へ折り曲げます。

6



つまずきリスク

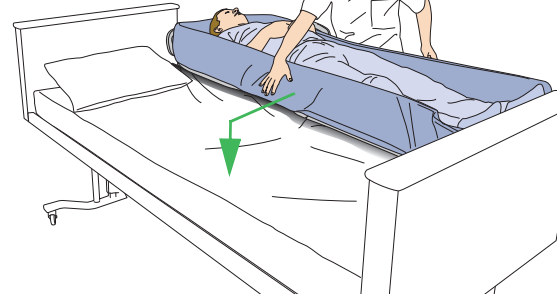


すぐに、シャワートロリーがベッドと重なるように配置します。
均等に移乗させるため、ベッドの上にシャワートロリーを降下させます。

7



落下リスク

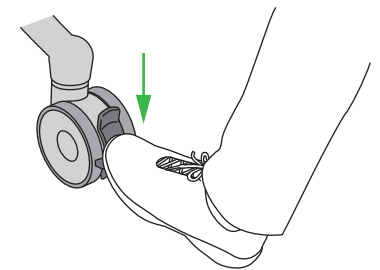


シャワートロリーにブレーキをかけます。

次ページのステップへ続きます。


ベッドへの移乗(続き)

8

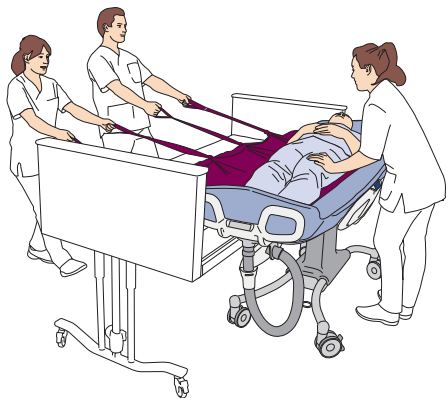


シャワートロリーのマットレスがベッド上にあることを確認してください。
スライディングシートで患者を移乗します
患者の頭から目を離さないでください。

9

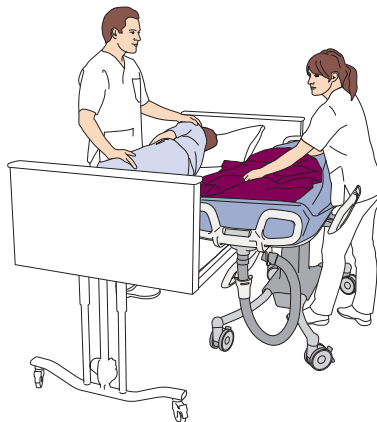


シャワートロリーのヘッドピローをベッドピローと交換してください。
スライディングシートを取り外します。

10

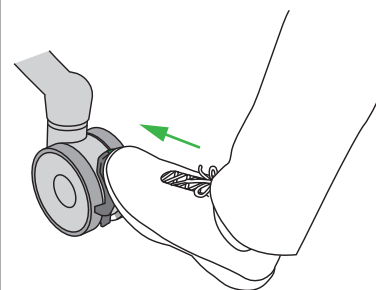

シャワートロリーのブレーキを解除します。


11

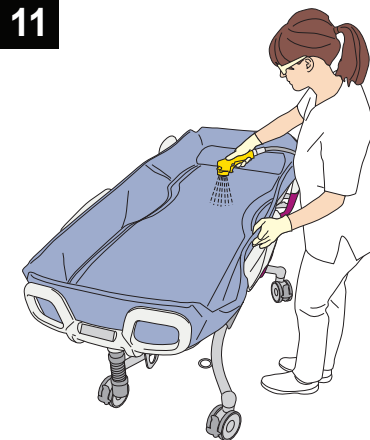

シャワートロリーをベッドから遠ざけるように移動します。
シャワートロリーを消毒します。

スリングリフトからの移乗

1

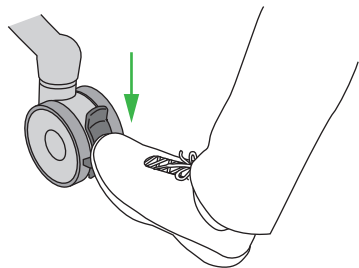


シャワートロリー:

- 最も低い高さまで降下させます。
- ブレーキをかけます。
- サイドサポートを折りたたんでロックします。
- ヘッドピローを置きます。

2



挟み込みリスク
落下リスク

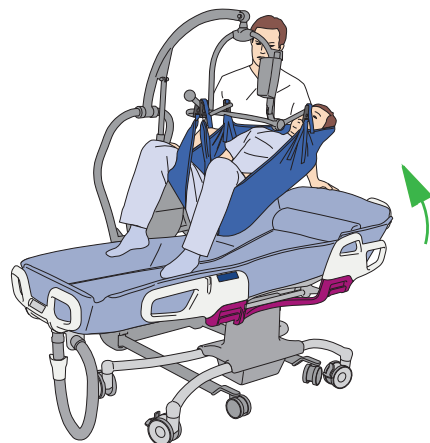


患者の髪、腕、足を体に密着させます。
シャワートロリーの調整可能なバックサポートを、座位まで上昇させます(該当する場合)。患者をシャワートロリーに降下させます。

3




滑るリスク

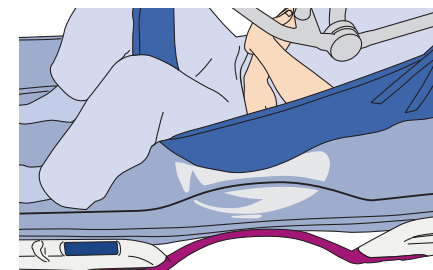


マットレスの側面を上向きにして、折り畳まないでください。
患者をフレキシゾーンに正しく配置します。
患者の臀部が輪郭部分の内側にある。
患者の臀部が人体の図に沿っている。

4

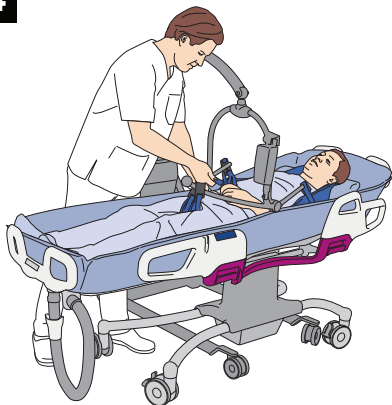

スプレッダーバーからスリングを外します。
シャワートロリーから遠ざかるようにリフトを移動します。

5

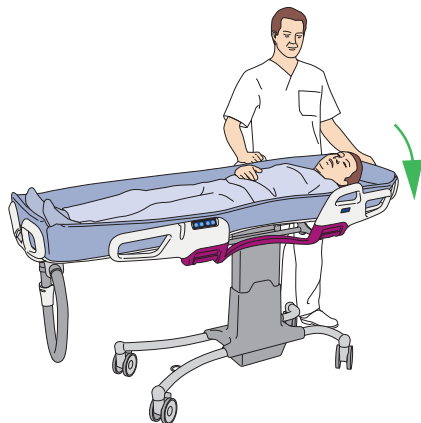


人間工学に基づいた高さまでシャワートロリーを調整します。
シャワートロリーの調整可能なバックサポートを下げます(該当する場合)。

6



患者の下からスリングを外します。


7

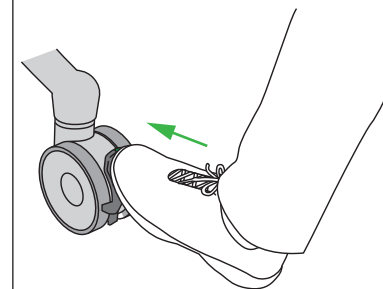

シャワートロリーのブレーキを解除します。
患者を移乗します。


スリングリフトへの移乗

1

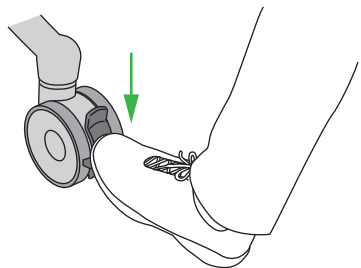

シャワートrolleyにブレーキをかけます。

2

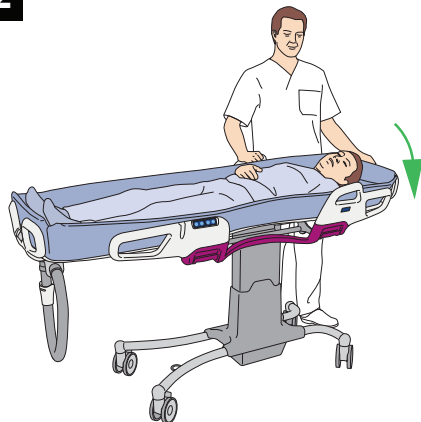

シャワートrolleyの調整可能なバックサポートを下げます(該当する場合)。

3



患者にスリングをあてがいます。

4



シャワートrolleyを最も低い高さまで降下させます。
リフトのスペッダーバーをシャワートrolleyの上に配置します。スリングをスペッダーバーへ取り付けます。

5




挟み込みリスク
落下リスク



患者の髪、腕、足を体に密着させます。
サイドサポートをロックします。
患者をシャワートrolleyから持ち上げます。


6

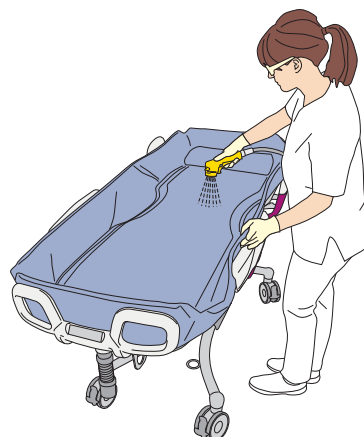

シャワートrolleyを消毒します。

患者にシャワーを使用します。

1

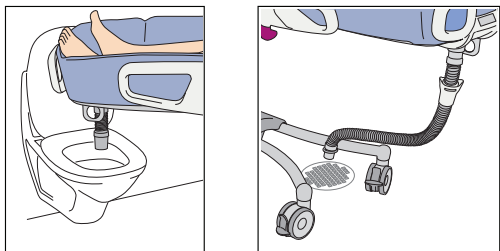


A

B

シャワートロリーの上部排水口を、トイレ/水洗シンクの上に配置します(A)。または、排水ホースホルダーの下部排水口を、床排水口の上に配置します(B)。

2

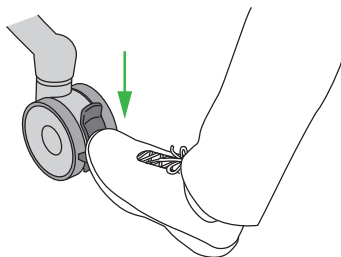


シャワートロリーにブレーキをかけます。

3




やけどのリスク

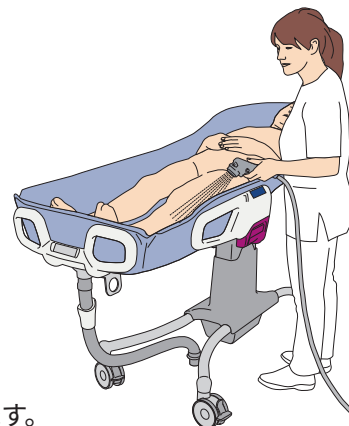


患者の衣服を脱がせます。
水温を設定します。
シャワーハンドルを持って患者から離れた方向に向けます。
水を出します。
ご自分の素手で温度を確認してください。

4

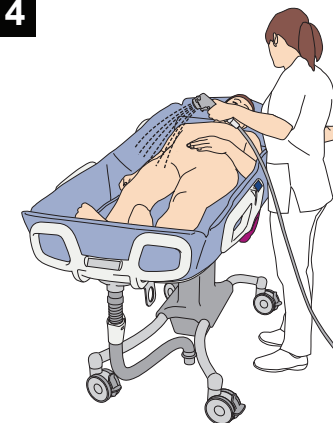


患者にシャワーを使用します。
シャワーで入浴する場合は、マットレスの排水部に排水プラグをはめてください。

5

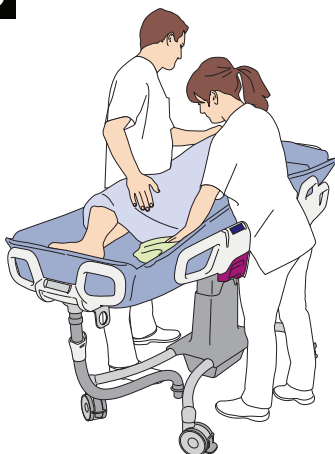


排水して、患者とマットレスの水気をふいて乾かします。

6

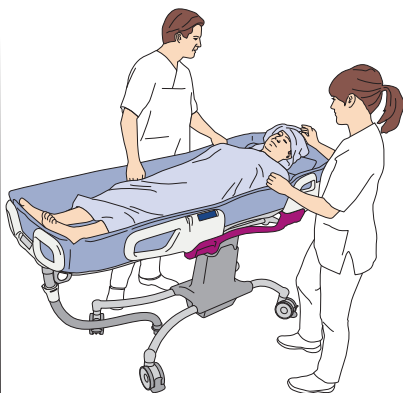


患者に服などを着せます。

7

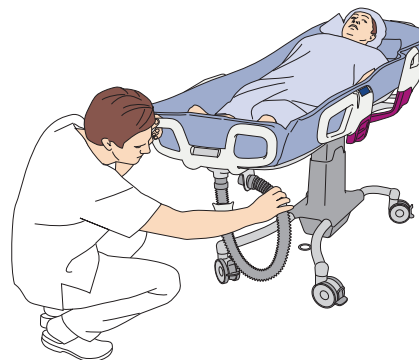


下部排水口をホルダーに戻すか、または下部排水口を上部排水口に取り付けます。

8

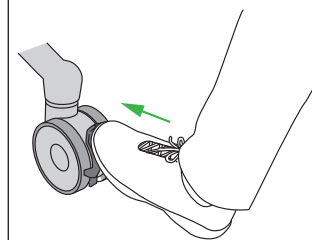

シャワートロリーのブレーキを解除します。

9

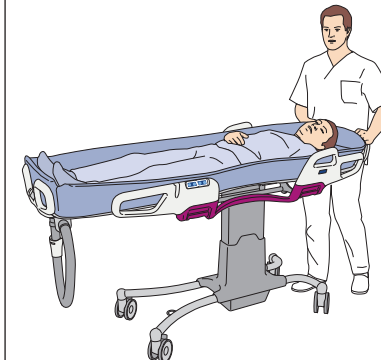

患者を移乗します。