

# Carevo

## Transfer vanuit bed



**1**

Zet het bed op de rem.

**2**

Plaats glijzeil onder zorgvrager.  
Leg een kussen onder het hoofd van de zorgvrager.  
Klap onrusthek aan kant van transfer omlaag.

**3**

Plaats de douchewagen naast het bed aan de kant van de transfer. Klap de matras van de douchewagen aan de kant van de transfer naar.

**4**

Druk hem omlaag en zet de hoeken van de matras van de douchewagen vast tussen het hoofd-/voetpaneel en de bodemplaat.

**5**

Zet de douchewagen net iets lager dan het bed.

**6** Gevaar voor omkantelen

Breng geen andere apparatuur omhoog of omlaag.  
Plaats de douchewagen tegen het bed aan.

**7** Gevaar voor vallen

Activeer de remmen op de douchewagen.

**8** Gevaar voor omkantelen

Breng geen andere apparatuur omhoog of omlaag. Breng de zorgvrager naar bestemming. Let op het hoofd van de zorgvrager.


*Ga door met de stappen op de volgende pagina.*

## Transfer vanuit het bed vervolgd

9



Gevaar voor uitglijden

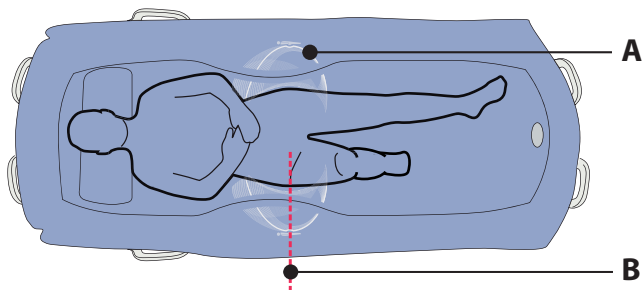


Houd de zijkanten van de matras omhoog, niet gevouwen.  
Plaats de zorgvrager correct op de Flexi Zone.  
Het zitvlak van de zorgvrager binnen de gemarkeerde lijnen (A).  
De kromming van de heup van de zorgvrager afgestemd op de menselijke figuur (B).

10



Vervang het hoofdkussen van het bed door het hoofdkussen van de douchewagen.  
Verwijder het glijzeil.

11

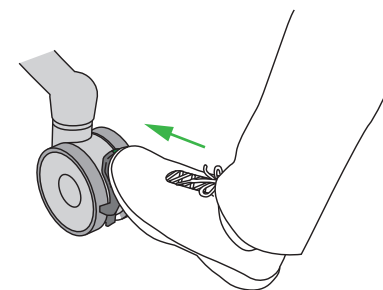

Ontgrendel de remmen van de douchewagen.

12




Gevaar voor beknelling  
Gevaar voor vallen



Houd het haar, de armen en voeten van de zorgvrager dicht bij zijn/haar lichaam.  
Trek de douchewagen een beetje van het bed weg zodat u de zijsteun van de douchewagen recht op kunt zetten en vergrendelen.


13

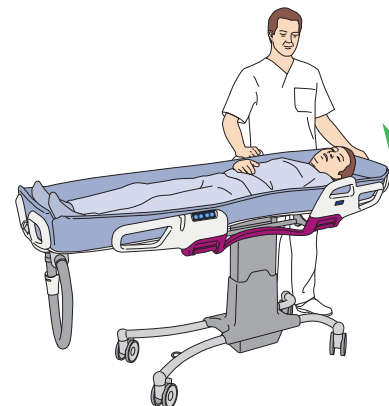

Zet de verstelbare rugsteun van de douchewagen (indien aanwezig) omhoog.  
Verplaats de zorgvrager.


## Transfer naar bed

1

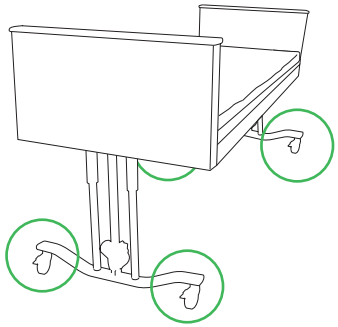

Zet het bed op de rem.  
Klap het onrusthek aan de kant  
van de transfer omlaag.

2

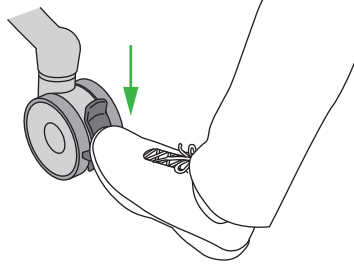


Activeer de remmen op de  
douchewagen.  
Zet de verstelbare rugsteun van de  
douchewagen (indien aanwezig) omlaag.

3



Plaats glijzeil onder zorgvrager.

4

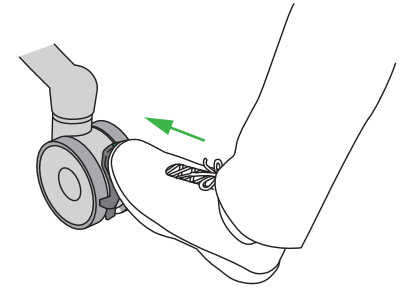

Ontgrendel de remmen  
van de douchewagen.

5



Gevaar voor beknelling




Houd het haar, de armen en voeten van de zorgvrager  
dicht bij zijn/haar lichaam.  
Plaats de douchewagen dicht bij het bed.  
Klap de zijsteun van de douchewagen aan de kant van  
de transfer omlaag.

6



Gevaar voor omkantelen

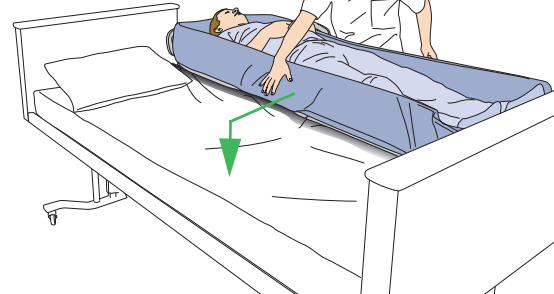


Plaats direct daarna de douchewagen tegen het bed met  
de zijflap van de matras over de bedrand.  
Bring de douchewagen omlaag tot op het bed voor een  
volledig horizontale transfer.

7



Gevaar voor vallen

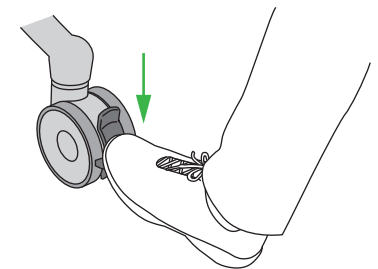


Activeer de remmen  
op de douchewagen.

Ga door met de stappen op de volgende pagina.


## Transfer naar het bed vervolgd

8

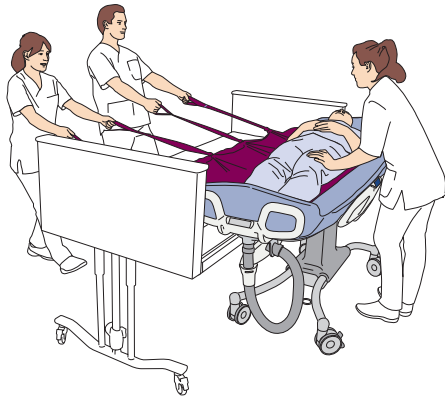


Zorg ervoor dat de matras van de douchewagen op het bed ligt.  
Verplaats de zorgvrager met behulp van een glijzeil.  
Let op het hoofd van de zorgvrager.

9

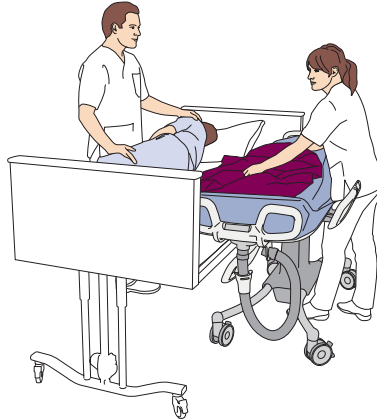


Vervang het hoofdkussen van de douchewagen door het hoofdkussen van het bed.  
Verwijder glijzeil.

10

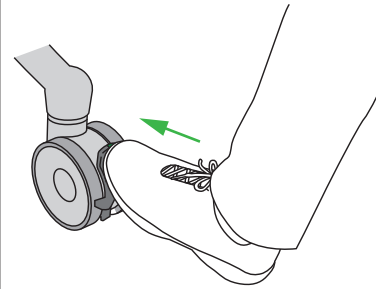

Ontgrendel de remmen van de douchewagen.


11

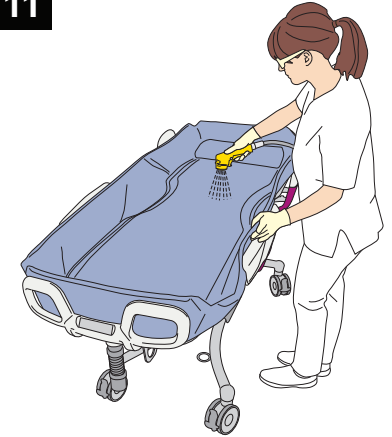

Haal de douchewagen weg van het bed.  
Reinig/desinfecteer de douchewagen.

## Transfer vanuit de tillift

1

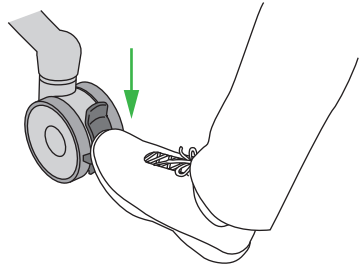


Douchewagen:

- Laat tot op het laagste punt zakken
- Activeer de remmen
- Klap de zijsteunen op en vergrendel ze
- Plaats het hoofdkussen

2



Gevaar voor beknelling  
Gevaar voor vallen

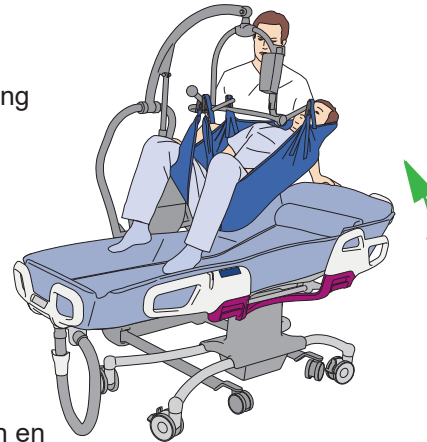


Houd het haar, de armen en voeten van de zorgvrager dicht bij zijn/haar lichaam. Zet de verstelbare rugsteun van de douchewagen (indien aanwezig) omhoog naar een zittende positie. Laat de zorgvrager op de douchewagen zakken.

3




Gevaar voor uitglijden

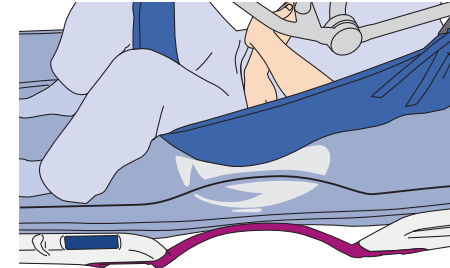


Houd de zijkanten van de matras omhoog, niet gevouwen. Plaats de zorgvrager correct op de Flexi Zone. Het zitvlak van de zorgvrager binnen de gemarkeerde lijnen. De kromming van de heup van de zorgvrager afgestemd op de menselijke figuur.

4

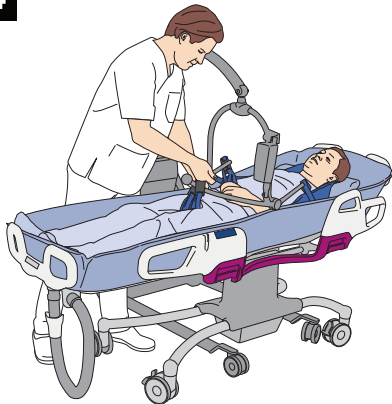

Maak de tilband los van het tiljuk. Haal de lift weg van de douchewagen.

5

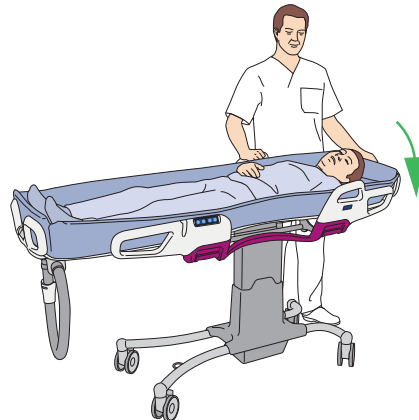


Zet de douchewagen op een ergonomisch verantwoorde hoogte. Zet de verstelbare rugsteun van de douchewagen (indien aanwezig) omlaag.

6



Verwijder de tilband onder de zorgvrager.


7

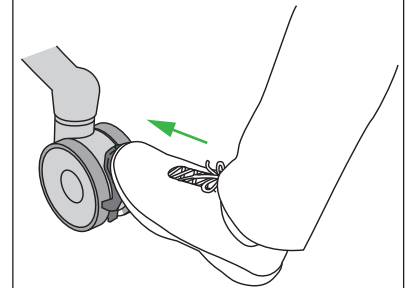

Ontgrendel de remmen van de douchewagen. Verplaats de zorgvrager.


## Transfer naar de tillift

1

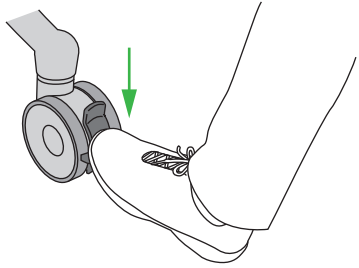


Activeer de remmen op de douchewagen.

2

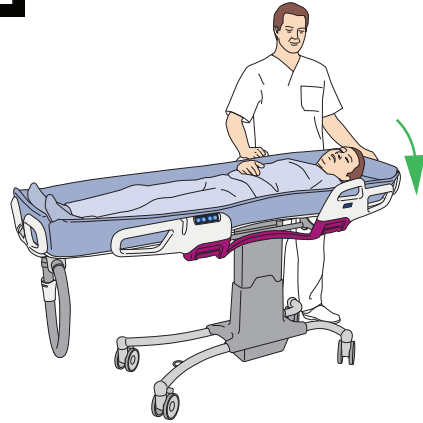

Zet de verstelbare rugsteun van de douchewagen (indien aanwezig) omlaag.

3

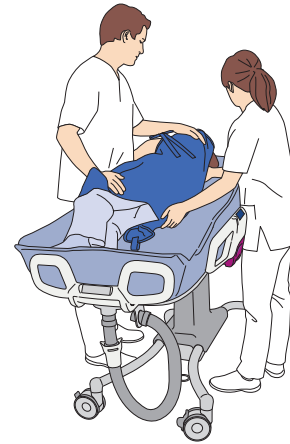

Breng de tilband aan bij de zorgvrager.

4



Laat de douchewagen tot op het laagste punt zakken. Plaats het tiljuk van de lift boven de douchewagen. Bevestig de tilband aan het tiljuk.

5




Gevaar voor beknelling  
Gevaar voor vallen



Houd het haar, de armen en voeten van de zorgvrager dicht bij zijn/haar lichaam. Vergrendel de zijsteunen. Til de zorgvrager uit de douchewagen.


6

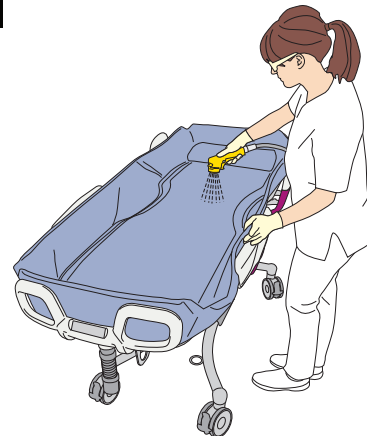

Reinig/desinfecteer de douchewagen.

## De zorgvrager douchen

1

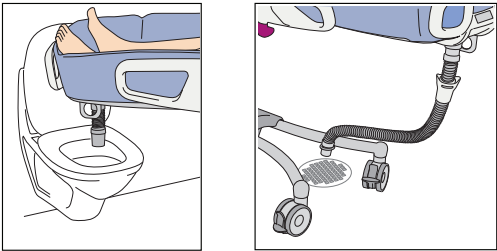


A

B

Plaats het bovenste gedeelte van de afvoer van de douchewagen boven het toilet/de spoelbak (A) of plaats de onderste afvoeropening in de afvoerslanghouder, boven de vloerafvoer (B).

2

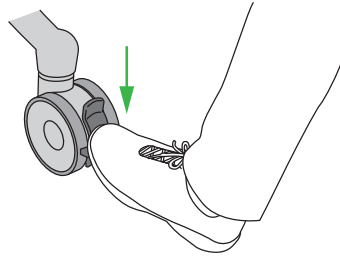


Activeer de remmen op de douchewagen.

3




Gevaar voor verbranding

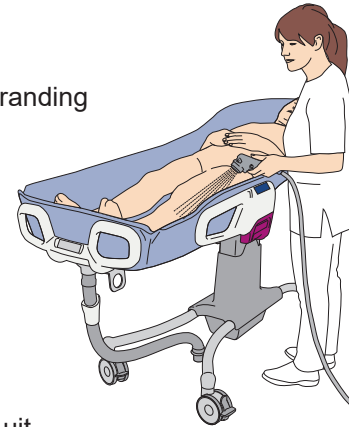


Kleed de zorgvrager uit.  
Stel de watertemperatuur in.  
Richt de douchehandgreep van de zorgvrager af.  
Draai de kraan open.  
Controleer de temperatuur met uw blote hand.

4

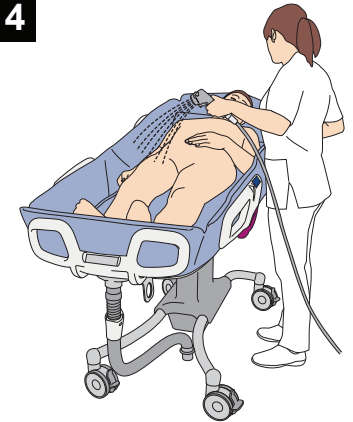


Was de zorgvrager.  
Plaats de afvoerstop in de afvoer van de matras als u de zorgvrager in ondiep water wil baden

5

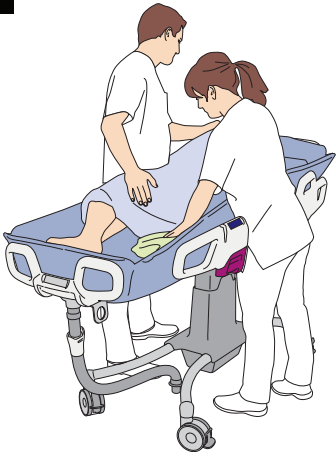

Laat het water wegstromen en droog de zorgvrager en de matras af.

6

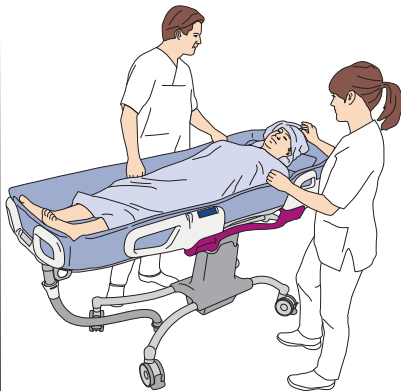


Dek de zorgvrager af of kleed hem/haar aan.

7




Plaats de onderste afvoeropening terug in de houder of bevestig de onderste afvoer aan de bovenste afvoer.

8

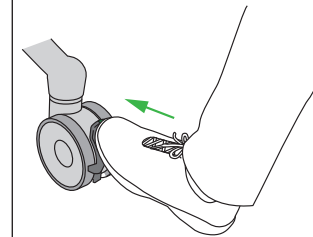

Ontgrendel de remmen van de douchewagen.

9

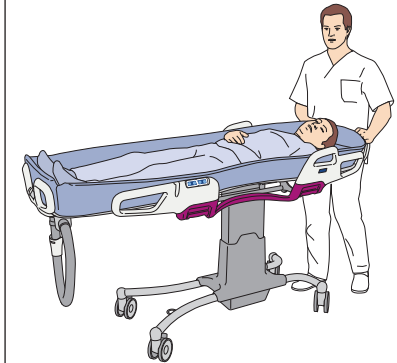

Verplaats de zorgvrager.

