

Limpeza

Desinfectantes permitidos

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accesorios

- Gafas protectoras
- Guantes protectores
- Botella con pulverizador (si no se dispone de Shower Panel)
- Líquido desinfectante
- Toallitas desechables
- Cepillo de limpieza con cerdas blandas
- Cepillo

1

Lleve guantes y gafas protectoras.

2

Asegúrese de que el desinfectante se ha mezclado de acuerdo con lo indicado en:
- la etiqueta del recipiente de desinfectante, o
- la relación de mezcla indicada en las IDU de Shower Panel.

3

Retire el desagüe inferior y el cojín.

4

Enjuague con agua. Empiece en la parte superior del colchón y vaya descendiendo hasta las ruedas.


5

Enjuague el desagüe inferior y el cojín con agua.

Continúe con los pasos de la página siguiente

Limpieza (continuación)

6

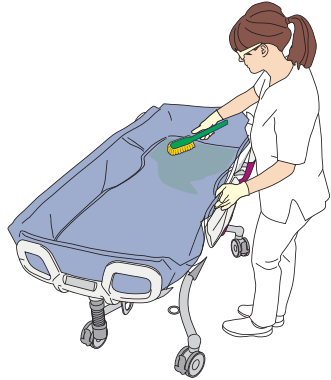


Utilice un cepillo de limpieza de cerdas blandas con desinfectante. Empiece frotando en la parte superior del colchón y vaya descendiendo hasta las ruedas. Utilice un cepillo empapado en desinfectante. Limpie el desagüe superior.

7



Limpie la parte inferior del colchón, las placas de soporte y la parte exterior del desagüe superior.


8

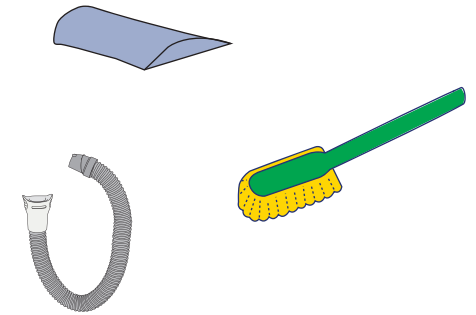

Utilice un cepillo de limpieza con cerdas blandas. Frote el cojín y el desagüe inferior por separado. Evite el contacto con el colchón hasta que el cojín esté desinfectado.

Desinfección

9

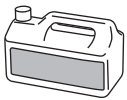


Levante el colchón y colóquelo sobre el panel de los pies y los soportes laterales. La parte inferior del colchón debe quedar mirando hacia arriba. Pulverice desinfectante en la parte inferior del colchón.

10



Limpie la parte inferior del colchón con una toallita desechable.

11

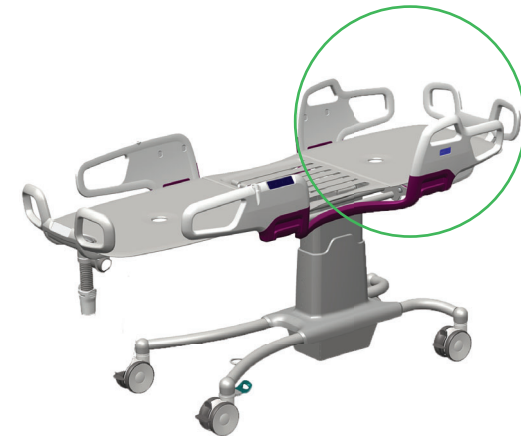


Pulverice desinfectante y limpie las siguientes piezas del lado de la cabeza: panel del la cabeza, soportes laterales, placa de soporte y flexi zone.

Continúe con los pasos de la página siguiente

Desinfección (continuación)

12

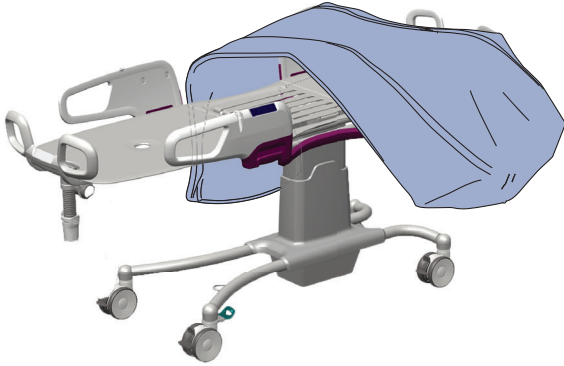


Coloque la parte inferior del colchón, ya desinfectada, sobre el panel de la cabeza y los soportes laterales también desinfectados. El interior del colchón, no desinfectado, debe quedar mirando hacia arriba. Estire los dobleces de las esquinas del colchón.

13




Pulverice desinfectante y limpie el interior del colchón con una toallita desechable. Coloque de nuevo los dobleces de las esquinas del colchón.

14

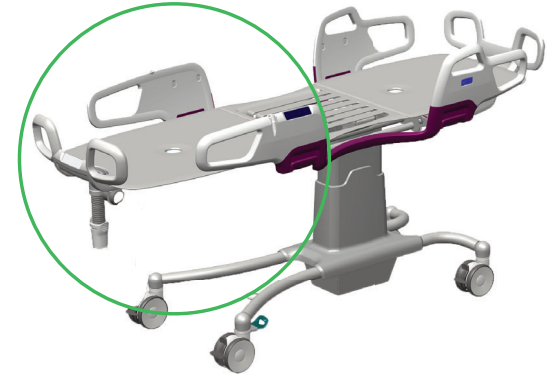


Pulverice desinfectante y limpie las siguientes piezas del extremo de los pies: panel de los pies, soportes laterales, placa de soporte, flexi zone y desagüe superior.

15

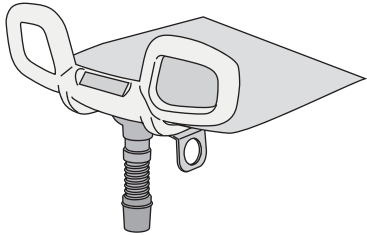


Pulverice desinfectante en el desagüe superior y limpie con un cepillo.

16

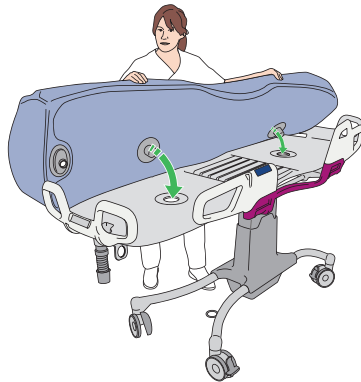

Coloque el colchón en su posición original.

17

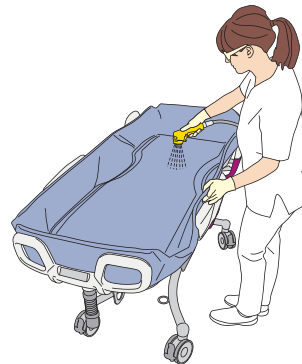


Pulverice desinfectante. Empiece en la parte superior del colchón y vaya descendiendo hasta las ruedas.

18



Limpie con una toallita desechable. Empiece en la parte superior del colchón y vaya descendiendo hasta las ruedas.

19

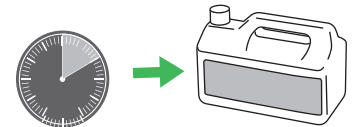


Deje actuar el desinfectante durante el tiempo adecuado.

Continúe con los pasos de la página siguiente


Desinfección (continuación)

20

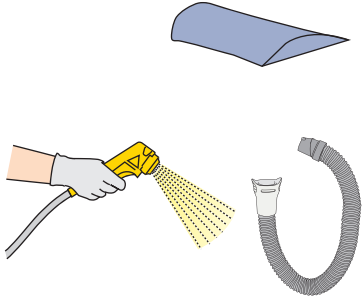


Aplique desinfectante para limpiar el cojín y el desagüe inferior por separado con una toallita desechable.

21

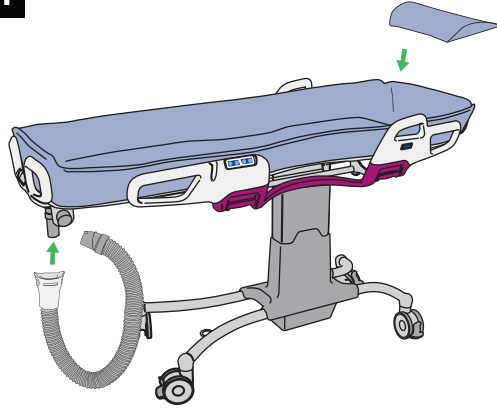

Encaje el desagüe inferior en el desagüe superior y coloque el cojín en el colchón.

22

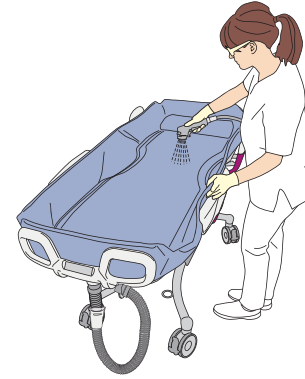

Enjuague todas las piezas con agua fría hasta que no queden restos de desinfectante. Empiece en la parte superior del colchón y vaya descendiendo hasta las ruedas. Enjuague la parte inferior del colchón.

23



Seque por completo todas las piezas con toallitas desechables.