

Nettoyage

Désinfectants autorisés

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accessoires

- Lunettes de protection
- Gants de protection
- Pulvérisateur (en cas d'absence d'un tableau de douche)
- Produit désinfectant
- Lingettes jetables
- Brosse de nettoyage douce
- Goupillon

1

Porter des gants et des lunettes de protection.

2

Vérifier que le désinfectant est bien mélangé comme suit :
 - étiquette du flacon de désinfectant ou
 - rapport de mélange indiqué dans le mode d'emploi du tableau de douche

3

Retirer l'évacuation inférieure et l'oreiller.

4

Rincer à l'eau. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.


5

Rincer l'évacuation inférieure et l'oreiller avec de l'eau.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante

Nettoyage (suite)

6

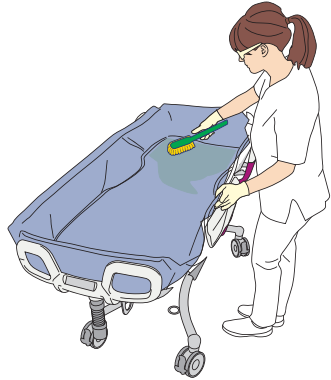


Utiliser une brosse de nettoyage à poils doux avec du désinfectant. Frotter en commençant par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes. Utiliser un goupillon imbibé de désinfectant. Nettoyer l'évacuation supérieure.

7



Nettoyer le dessous du matelas, les plaques de support et l'extérieur de l'évacuation supérieure.

8

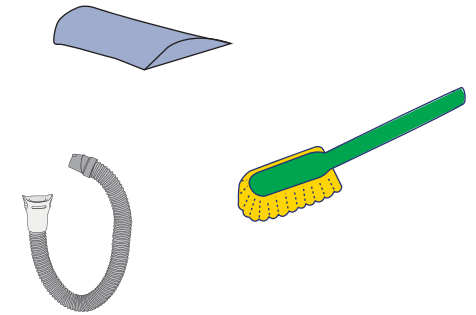

Utiliser une brosse de nettoyage douce. Frotter l'oreiller et l'évacuation inférieure séparément. Éviter tout contact avec le matelas tant que l'oreiller n'a pas été désinfecté.

Désinfection

9




Soulever et placer le matelas sur le panneau côté pieds et les barrières latérales. Surface inférieure du matelas orientée vers le haut. Pulvériser du désinfectant à la surface arrière du matelas.

10



Nettoyer la surface arrière du matelas à l'aide d'une lingette jetable.

11

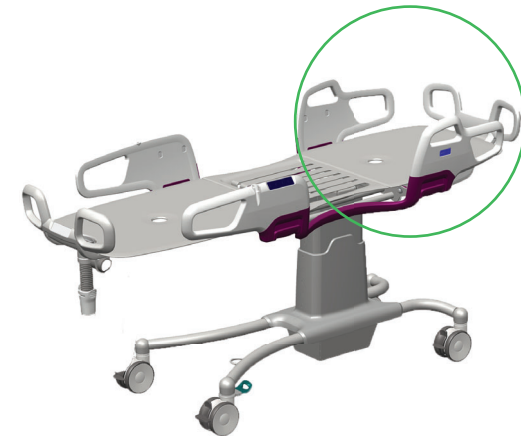


Pulvériser du désinfectant et nettoyer les pièces suivantes côté tête : panneau côté tête, barrières latérales, plaque de support et flexi zone.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante

Désinfection (suite)

12

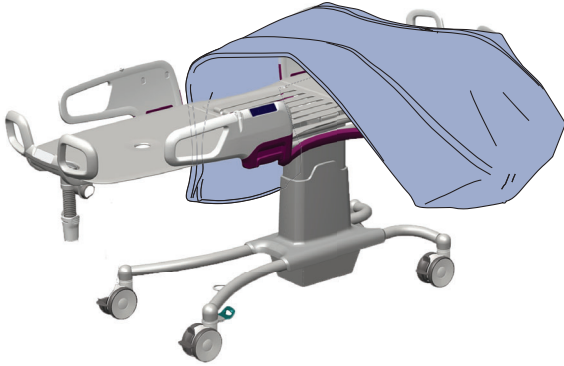


Placer la surface arrière du matelas désinfectée sur le panneau côté tête et les barrières latérales désinfectés. Surface intérieure du matelas non désinfectée vers le haut. Pousser les plis des coins du matelas vers l'extérieur.

13




Pulvériser du désinfectant et nettoyer la surface intérieure du matelas à l'aide d'une lingette jetable. Rentrer les plis des coins du matelas.

14

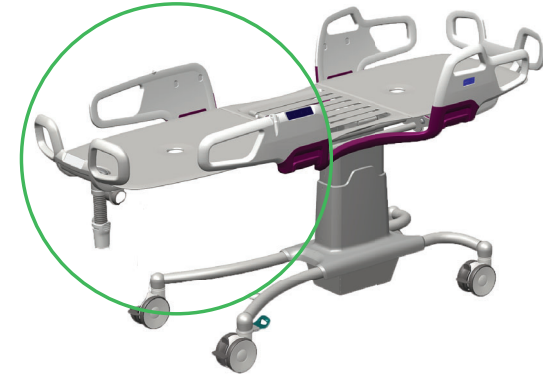


Pulvériser du désinfectant et nettoyer les pièces suivantes côté pieds : panneau côté pieds, barrières latérales, plaque de support, flexi zone et évacuation supérieure.

15

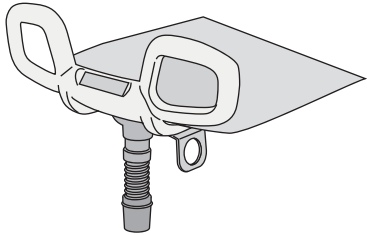


Pulvériser du désinfectant sur l'évacuation supérieure et nettoyer à l'aide d'un goupillon.

16

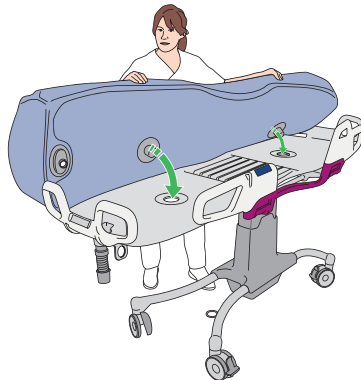

Remettre le matelas dans sa position d'origine.

17

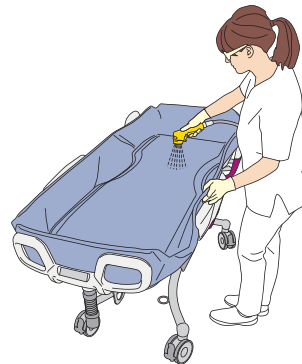


Pulvériser du désinfectant. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.

18



Nettoyer à l'aide d'une lingette jetable. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes.

19

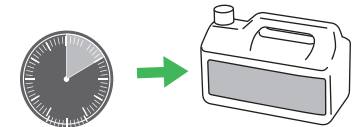


Prévoir un temps de contact approprié avec le désinfectant.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante


Désinfection (suite)

20

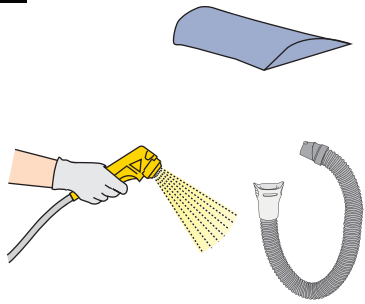


Pulvériser du désinfectant pour nettoyer l'oreiller et l'évacuation inférieure séparément à l'aide d'une lingette jetable.

21

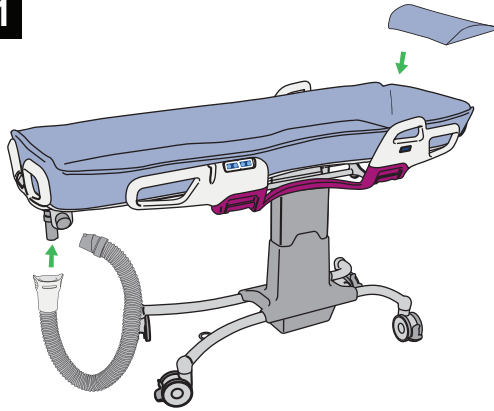

Raccorder l'évacuation inférieure à l'évacuation supérieure et placer l'oreiller sur le matelas.

22

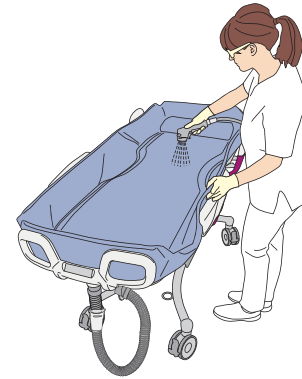

Rincer toutes les pièces à l'eau froide jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace visible de désinfectant. Commencer par le haut du matelas et descendre jusqu'aux roulettes. Rincer le dessous du matelas.

23



Bien essuyer chaque pièce à l'aide de lingettes jetables.