




Pulizia

Disinfettanti ammessi

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accessori


- Occhiali protettivi
- Guanti protettivi
- Flacone spray (se non è disponibile uno Shower Panel)
- Liquido disinfettante
- Asciugamani monouso
- Spazzola a setole morbide
- Spazzola lavabottiglie

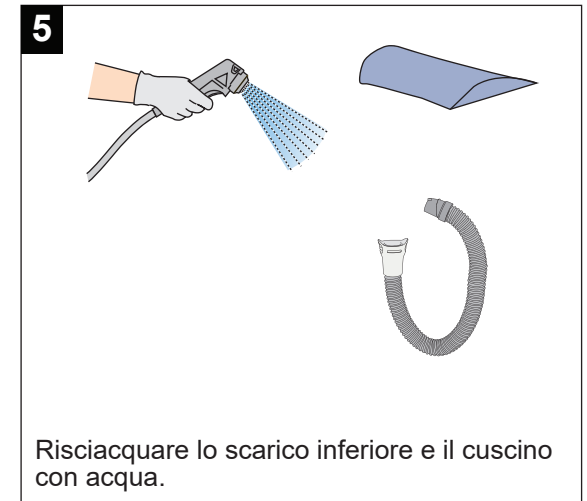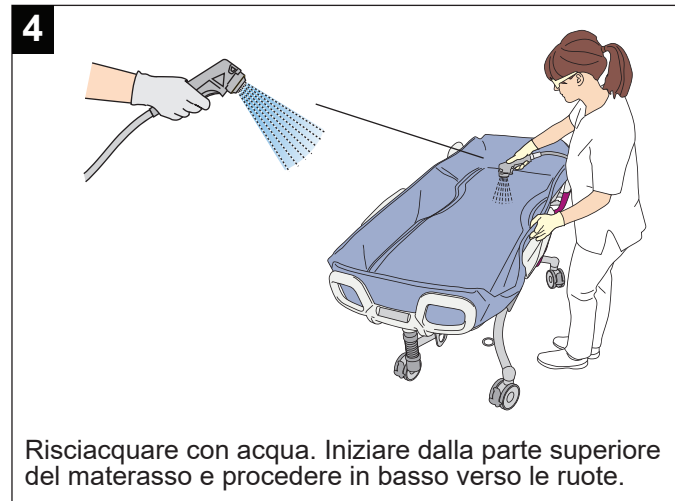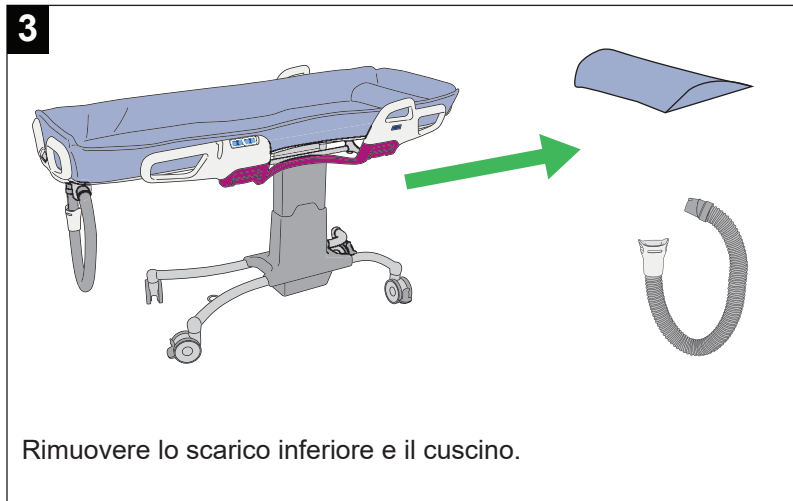

Continua alla pagina successiva

Pulizia (continua)

6

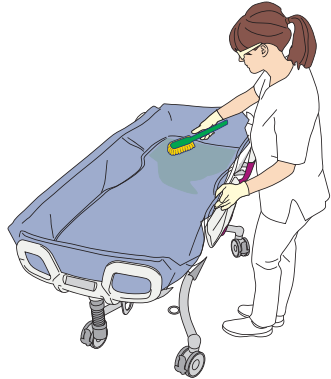


Utilizzare una spazzola a setole morbide con disinfettante. Strofinare dalla parte superiore del materasso e procedere in basso verso le ruote. Utilizzare una spazzola lavabottiglie imbevuta di disinfettante. Pulire lo scarico superiore.

7



Pulire la parte inferiore del materasso, le piastre di supporto e l'esterno del drenaggio superiore.

8

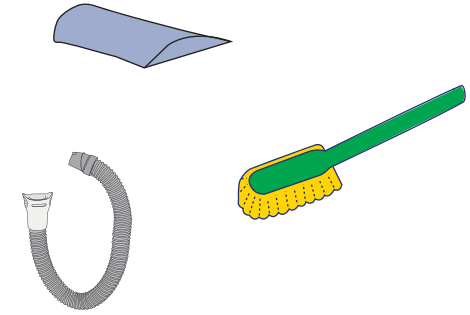

Utilizzare una spazzola a setole morbide. Strofinare il cuscino e lo scarico inferiore separatamente. Evitare il contatto con il materasso fino a quando non è stato disinfettato il cuscino.

Disinfezione

9




Sollevare e posizionare il materasso sopra il pannello lato piedi e le sponde laterali. La parte posteriore del materasso deve essere rivolta verso l'alto. Spruzzare il disinfettante sul retro del materasso.

10



Pulire la parte posteriore del materasso con un asciugamano monouso.

11

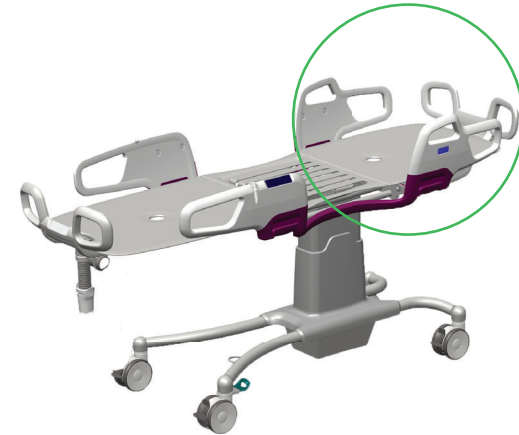


Spruzzare il disinfettante e pulire le seguenti parti sul lato testa: pannello lato testa, sponde laterali, piastra di supporto e flexi zone, utilizzando un asciugamano monouso.

Continua alla pagina successiva

Disinfezione (continua)

12

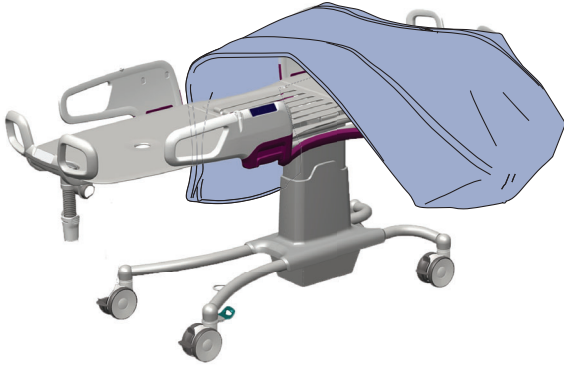


Posizionare la parte posteriore disinfettata del materasso sul pannello lato testa e sulle sponde laterali disinfettate. La parte interna non disinfettata del materasso deve essere rivolta verso l'alto. Spianare le pieghe degli angoli del materasso verso l'esterno.

13




Spruzzare il disinfettante e pulire la parte interna del materasso con un asciugamano monouso. Ripiegare le pieghe degli angoli del materasso verso l'interno.

14

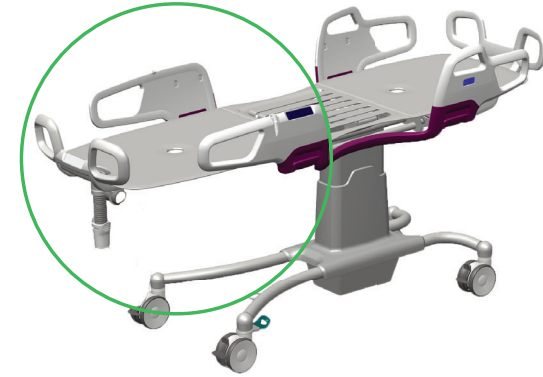


Spruzzare il disinfettante e pulire le seguenti parti sul lato piedi: pannello lato piedi, sponde laterali, piastra di supporto, flexi zone e scarico superiore, utilizzando un asciugamano monouso.

15

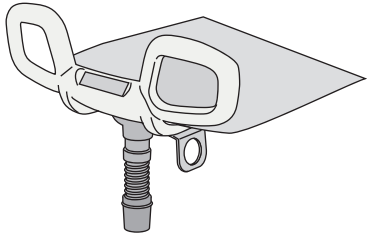


Spruzzare il disinfettante sullo scarico superiore e pulirlo con una spazzola lavabottiglie.

16

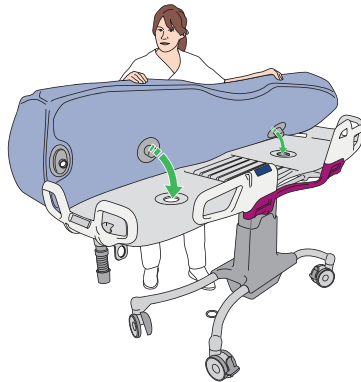

Posizionare il materasso nella sua posizione originaria.

17

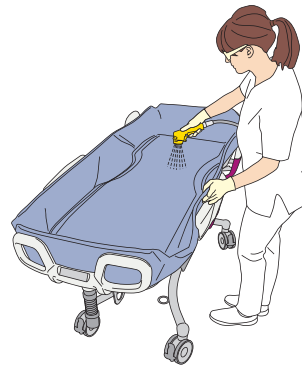


Spruzzare il disinfettante. Iniziare dalla parte superiore del materasso e procedere in basso verso le ruote.

18



Pulire con un asciugamano monouso. Iniziare dalla parte superiore del materasso e procedere in basso verso le ruote.

19

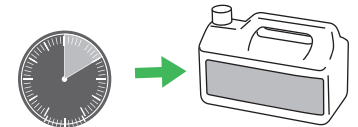


Attendere un tempo di contatto appropriato per il disinfettante.

Continua alla pagina successiva


Disinfezione (continua)

20

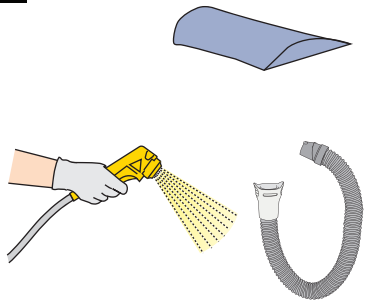


Spruzzare il disinfettante e pulire il cuscino e lo scarico inferiore separatamente con un asciugamano monouso.

21

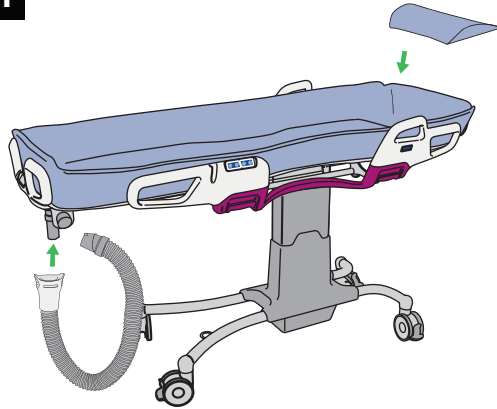

Collegare lo scarico inferiore allo scarico superiore e posizionare il cuscino sul materasso.

22

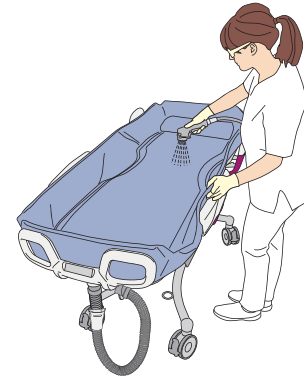

Risciacquare ogni parte con acqua fredda fino a quando non vi sono più tracce di disinfettante.
Iniziare dalla parte superiore del materasso e procedere in basso verso le ruote.
Risciacquare sotto il materasso.

23



Asciugare completamente ogni parte con asciugamani monouso.