

## 洗浄


### 使用可能な消毒薬

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

### 用具


- 保護用めがね
- 保護用手袋
- スプレーボトル (Shower Panelを内蔵していない場合)
- 消毒薬
- 使い捨てタオル
- 毛先の柔らかい洗浄ブラシ
- ボトル用ブラシ

1

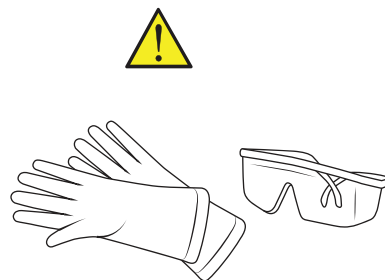


保護用手袋とめがねを装着します。

2

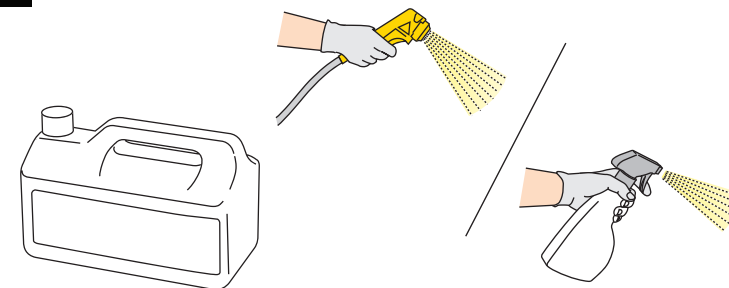


消毒薬が以下の規定通りに配合されていることを確認します。  
消毒薬ボトルのラベル、または  
Shower Panelの取扱説明書に記載されている混合比

3

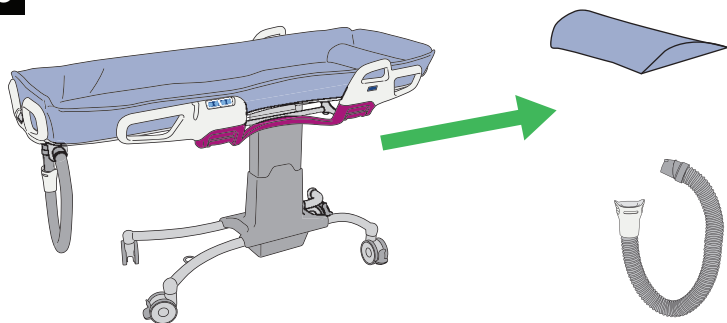


下部排水管と枕を外します。

4

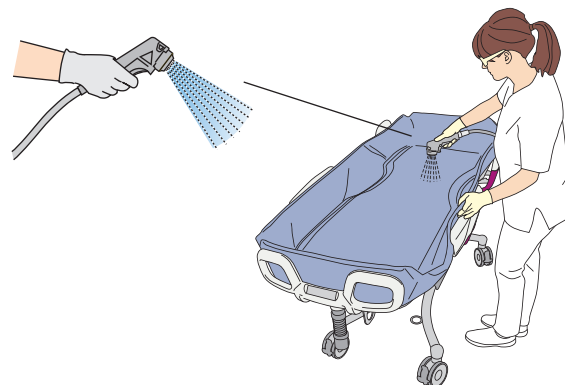

水ですすぎます。マットレスの上部からキャスターへと進めます。

5

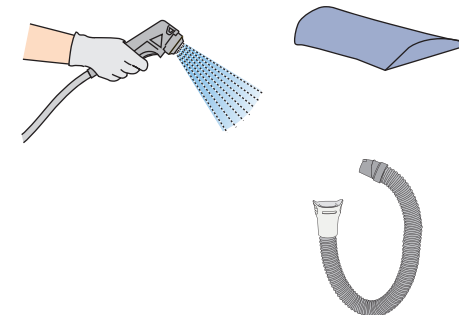


下部排水管と枕を水ですすぎます。

次ページのステップに続きます

## 洗浄(続き)

6

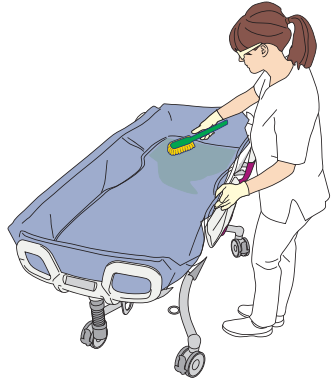


毛先の柔らかい洗浄ブラシと消毒薬を使います。マットレス上部からキャスターに向かってブラシでこすります。消毒薬を染み込ませたボトル用ブラシを使います。上部排水口を洗浄します。

7



マットレスの下側、サポートプレート、上部排水口の外側を洗浄します。


8

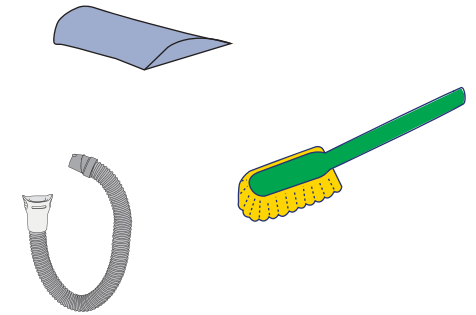

毛先の柔らかい洗浄ブラシを使います。枕と下部排水管を個別にこすります。枕の消毒が済むまでマットレスに触れないようにします。

## 消毒

9

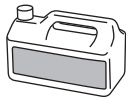


マットレスを持ち上げてフットパネルとサイドサポートの上に置きます。マットレスの裏側を上に向けます。マットレスの裏側に消毒薬をスプレーします。

10



使い捨てタオルでマットレスの裏側を拭きます。

11

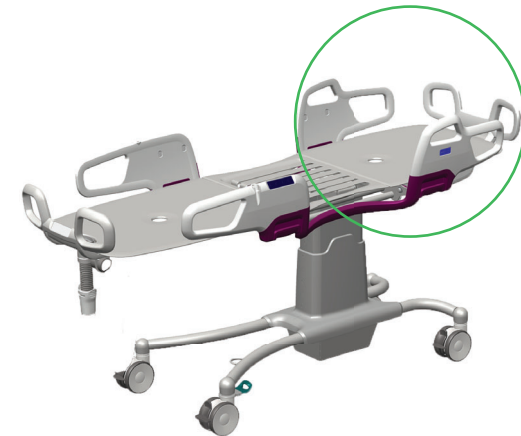


頭部側の以下の部品に消毒薬をスプレーして洗浄します：ヘッドパネル、サイドサポート、サポートプレート、フレキシゾーン(使い捨てタオルを使用)。

次ページのステップに続きます

## 消毒(続き)

12

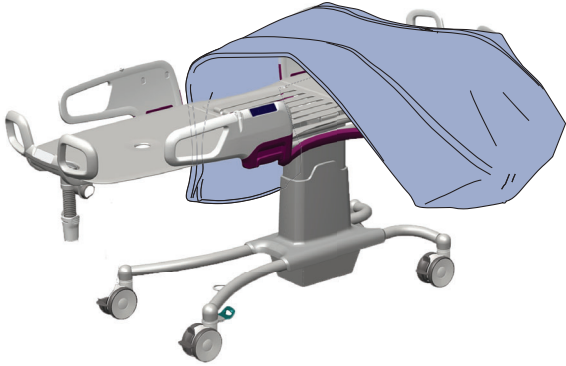


消毒したヘッドパネルとサイドサポートの上に裏返したマットレスを置きます。消毒していないマットレスの内側を上に向けます。マットレスの角の折り目を押し出します。

13




消毒薬をスプレーし、使い捨てタオルでマットレスの内側を洗浄します。マットレスの角の折り目を押し込みます。

14

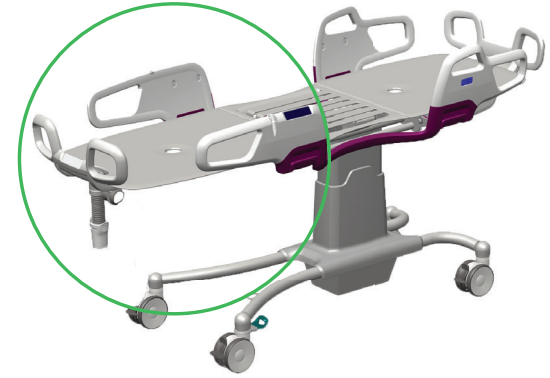


足部側の以下の部品に消毒薬をスプレーして洗浄します：フットパネル、サイドサポート、サポートプレート、フレキシゾーン、上部排水口(使い捨てタオルを使用)。

15

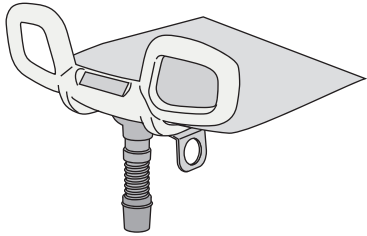


上部排水口に消毒薬をスプレーして、ボトル用ブラシで洗浄します。

16

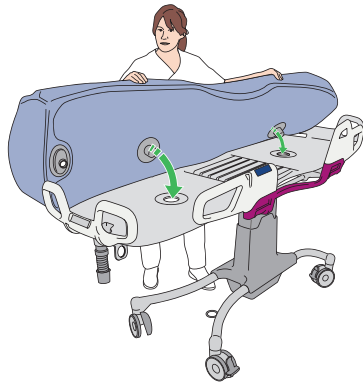

マットレスを元の位置に戻します。

17

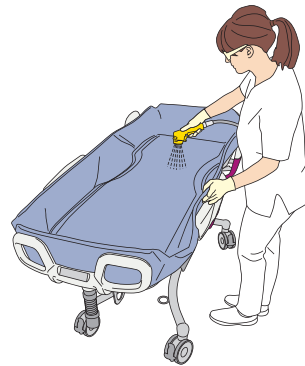


消毒薬をスプレーします。マットレスの上部からキャスターへと進めます。

18



使い捨てタオルで拭きます。マットレスの上部からキャスターへと進めます。

19

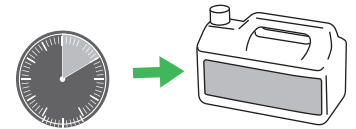


消毒薬の適切な接触時間を確保してください。

次ページのステップに続きます


## 消毒(続き)

20

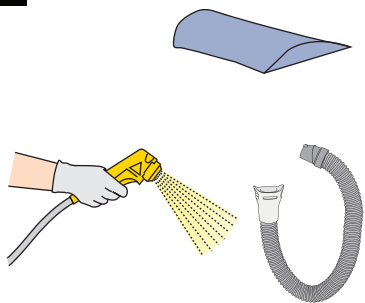


枕と下部排水管に消毒薬をスプレーし、使い捨てタオルで個別に拭きます。

21

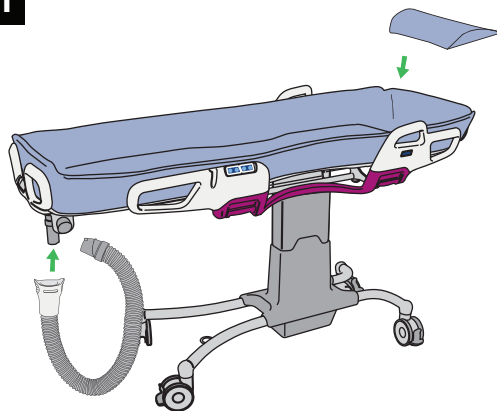

下部排水管を上部排水口に取り付け、枕をマットレスの上に置きます。

22

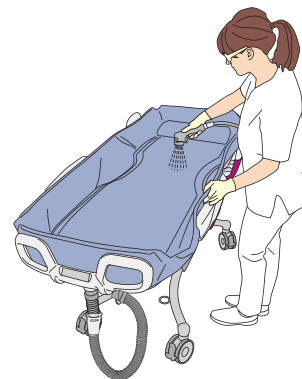

消毒薬の痕跡がなくなるまで冷水ですべての部品をすすぎます。  
マットレスの上部からキャスターへと進めます。マットレスの下側もすすぎます。

23



使い捨てタオルで、各部分が完全に乾くまで拭きます。