

Reinigen

Toegestane desinfectiemiddelen

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accessoires

- Veiligheidsbril
- Beschermende handschoenen
- Sproeiflacon (indien er geen Shower panel beschikbaar is)
- Desinfectiemiddel
- Wegwerphanddoeken
- Zachte reinigingsborstel
- Flessenborstel

1

Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril

2

Controleer of het desinfectiemiddel is verdund overeenkomstig:
- het label op de verpakking van het desinfectiemiddel of
- de mengverhouding in de gebruiksaanwijzing van het Shower panel

3

Verwijder het onderste gedeelte van de afvoer en het kussen.

4

Spoel met water. Werk vanaf de bovenkant van de matras omlaag in de richting van de zwenkwielen.


5

Spoel het onderste gedeelte van de afvoer en het kussen met water.

Ga door met de stappen op de volgende pagina.

Reinigen vervolgd

6

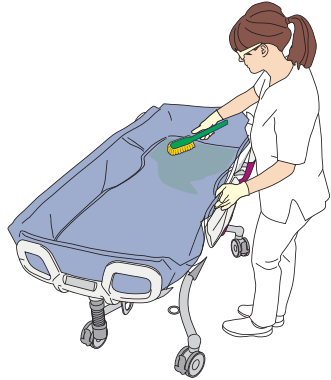


Gebruik een zachte schoonmaakborstel met desinfectiemiddel. Schrob vanaf de bovenkant van de matras omlaag in de richting van de zwenkwielen. Gebruik een in desinfectiemiddel gedrenkte flessenborstel. Reinig het bovenste gedeelte van de afvoer.

7



Reinig de onderkant van de matras, de bodemplaat en de buitenkant van het bovenste gedeelte van de afvoer.

8

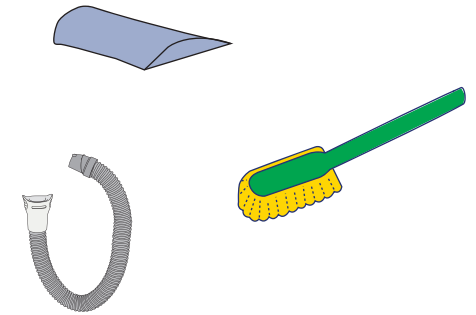

Gebruik een zachte schoonmaakborstel. Schrob het onderste gedeelte van de afvoer en het kussen afzonderlijk. Vermijd contact met de matras totdat het kussen is gedesinfecteerd.

Desinfecteren

9




Til de matras op en leg hem over het voetpaneel en de zijsteunen. De onderkant van de matras moet omhoog wijzen. Smit desinfectiemiddel op de onderkant van de matras.

10



Reinig de onderkant van de matras met een wegwerphanddoek.

11

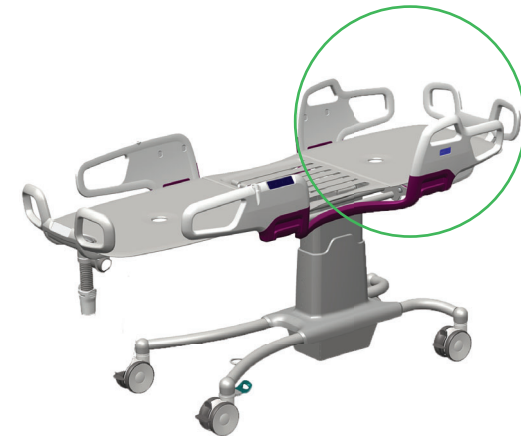


Smit desinfectiemiddel op en reinig de volgende onderdelen van het hoofdeinde: hoofdpaneel, zijsteunen, bodemplaat en flexzone; reinig deze met een wegwerphanddoek.

Ga door met de stappen op de volgende pagina.

Desinfecteren vervolgd

12

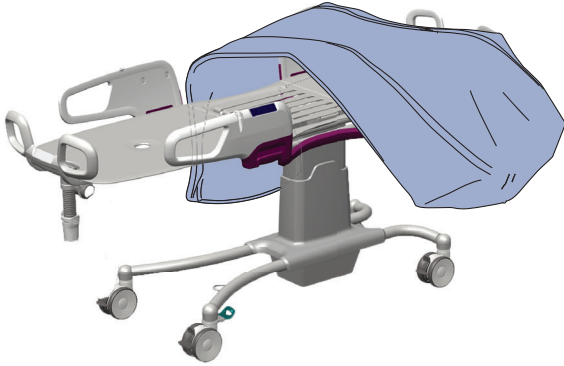


Leg de gedesinfecteerde onderkant van de matras over het gedesinfecteerde hoofdpaneel en de zijsteunen. De niet-gedesinfecteerde kant van de matras moet omhoog wijzen. Duw de plooiën in de matrashoeken naar buiten.

13




Spuit desinfectiemiddel op het binnenste deel van de matras en reinig dit met een wegwerphanddoek. Druk de plooiën in de matrashoeken naar binnen.

14

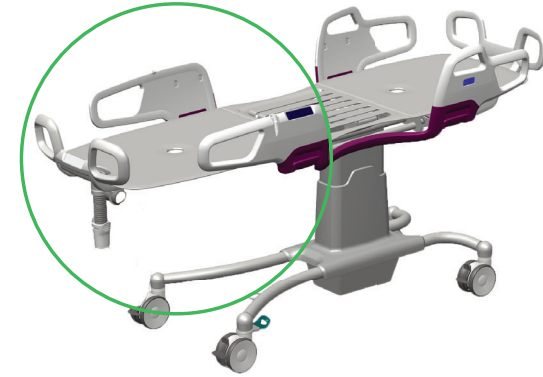


Spuit desinfectiemiddel op en reinig de volgende onderdelen van het voeteneinde: voetpaneel, zijsteunen, bodemplaat, flexizone en bovenste gedeelte van de afvoer; reinig deze met een wegwerphanddoek.

15

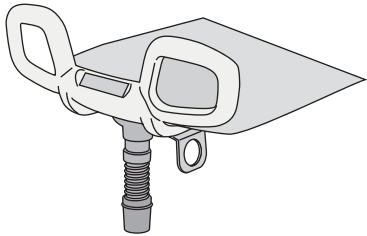


Spuit desinfectiemiddel op het bovenste gedeelte van de afvoer en reinig met een flessenborstel.

16

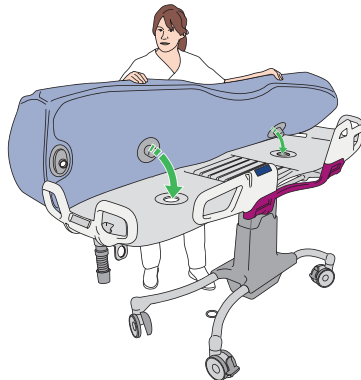

Leg de matras terug in de oorspronkelijke positie.

17

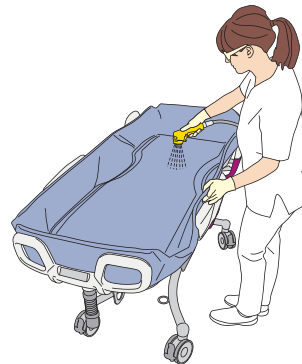


Spuit desinfectiemiddel op deze kant. Werk vanaf de bovenkant van de matras omlaag in de richting van de zwenkwielen.

18



Reinig deze met een wegwerphanddoek. Werk vanaf de bovenkant van de matras omlaag in de richting van de zwenkwielen.

19

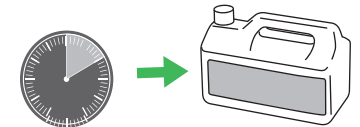


Laat het desinfectiemiddel gedurende de toepasselijke contacttijd inwerken.

Ga door met de stappen op de volgende pagina.


Desinfecteren vervolgd

20

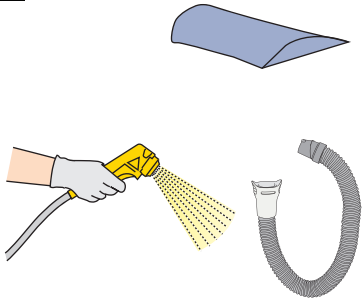


Spuit desinfectiemiddel op het kussen en het onderste gedeelte van de afvoer om deze afzonderlijk met een wegwerphanddoek te reinigen.

21

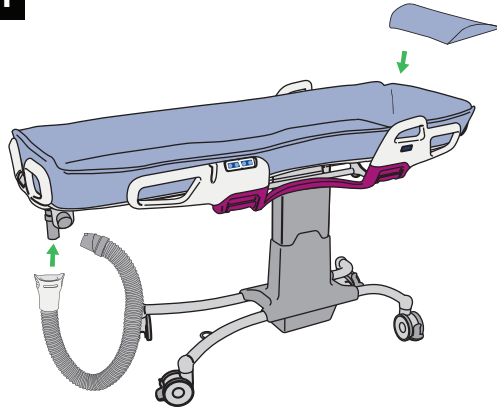

Bevestig het onderste gedeelte van de afvoer aan het bovenste gedeelte en plaats het kussen op de matras.

22

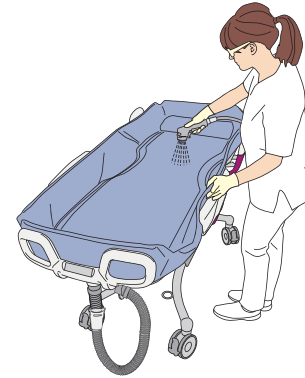

Spoel alle onderdelen met koud water na totdat er geen sporen van het desinfectiemiddel meer zijn. Werk vanaf de bovenkant van de matras omlaag in de richting van de zwenkwielen. Spoel ook onder de matras.

23



Wrijf alle onderdelen volledig droog met behulp van wegwerphanddoeken.

