
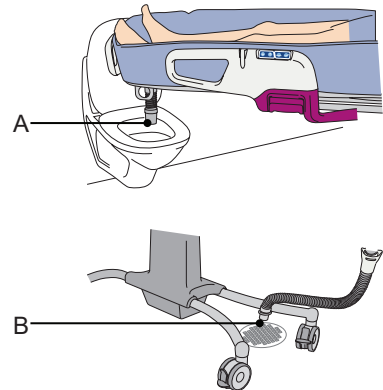


# Tableau de douche et de désinfection


## Doucher le patient

**1**  Serrer les freins.




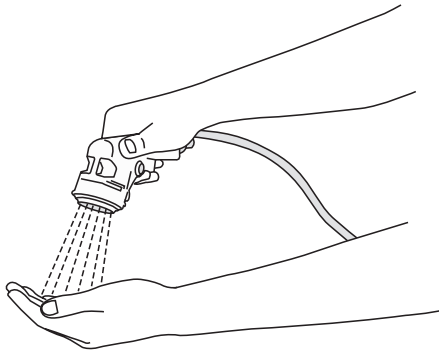
Déplacer le patient vers le tableau de douche et de désinfection.  
(A) - Positionner le trou de drainage au-dessus de la cuvette des toilettes ou du vidoir, ou  
(B) - Placer la sortie de drainage sur le siphon de sol.  
Serrer les freins.

**2**




Régler la température souhaitée.

**3**  Risque de brûlures.



Saisir la douchette et la diriger à l'écart du patient. Mettre la main sous l'eau pour évaluer la température. Appuyer sur la gâchette de la douchette et ajuster le débit.

**4**

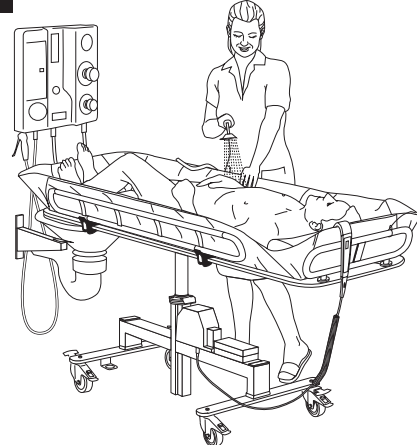

Doucher le patient.


## Nettoyer et désinfecter un fauteuil ou chariot de douche

1



Porter des gants et des lunettes de protection.

2

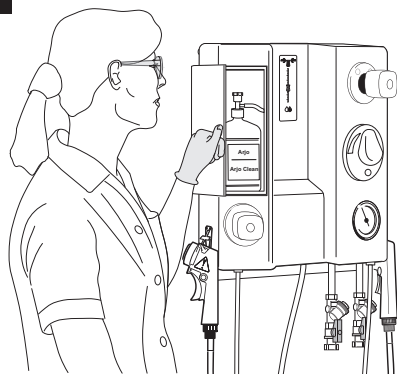


Ouvrir la porte du panneau et vérifier l'approvisionnement en désinfectant dans la bouteille.

3




Ne pas désinfecter près du patient.

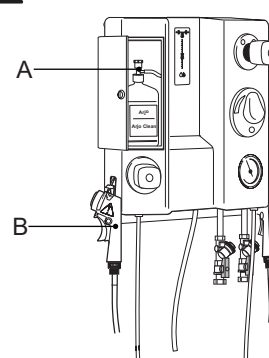


Vérifier que le tuyau est bien raccordé au dispositif d'aspiration (A). Retirer la douchette de désinfection (B) du crochet.

4

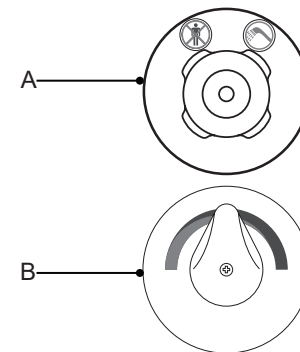

Ouvrir le flux de désinfection au maximum (A). Régler la température à une valeur aussi basse que possible (B).

5

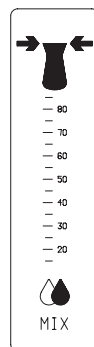

Pulvériser du désinfectant sur le fauteuil ou le chariot de douche en surveillant le débitmètre. Si nécessaire, ajuster le rapport de mélange du désinfectant (voir le mode d'emploi).

6



Désinfecter le fauteuil ou chariot de douche.