


## Desinfektionsmittelregler

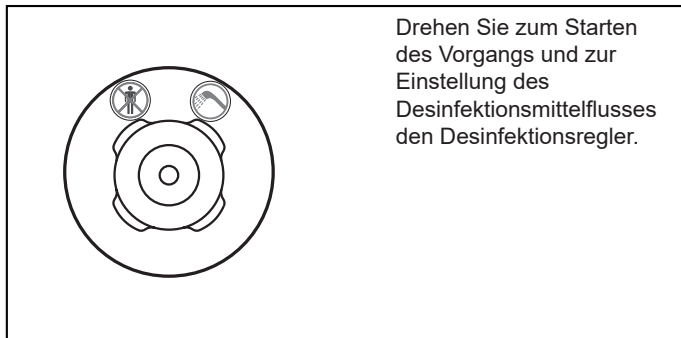


Drehen Sie zum Starten des Vorgangs und zur Einstellung des Desinfektionsmittelflusses den Desinfektionsregler.

## Verschließbares Desinfektionsmittelfach



Die Desinfektionsmittelflasche befindet sich hinter einer verschlossenen Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung stets verschlossen ist und der Schlüssel an einem sicheren Ort aufbewahrt wird.

## Durchflussmesser

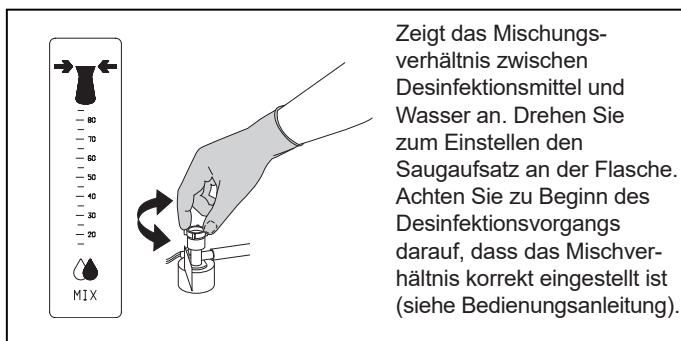


Zeigt das Mischungsverhältnis zwischen Desinfektionsmittel und Wasser an. Drehen Sie zum Einstellen den Saugaufsatz an der Flasche. Achten Sie zu Beginn des Desinfektionsvorgangs darauf, dass das Mischverhältnis korrekt eingestellt ist (siehe Bedienungsanleitung).

## Wasserregler




Drehen Sie den Wasserregler, um das Wasser einzuschalten und den Wasserfluss einzustellen.

## Reinigungs- und Desinfektionsduschgriff

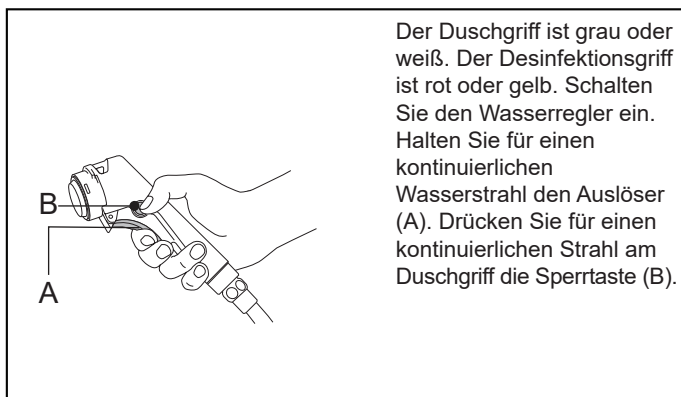


Der Duschgriff ist grau oder weiß. Der Desinfektionsgriff ist rot oder gelb. Schalten Sie den Wasserregler ein. Halten Sie für einen kontinuierlichen Wasserstrahl den Auslöser (A). Drücken Sie für einen kontinuierlichen Strahl am Duschgriff die Sperrtaste (B).

## Temperaturregler

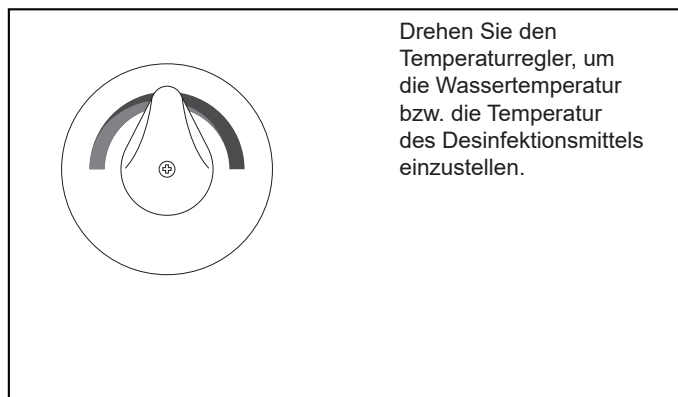


Drehen Sie den Temperaturregler, um die Wassertemperatur bzw. die Temperatur des Desinfektionsmittels einzustellen.

## Thermometer

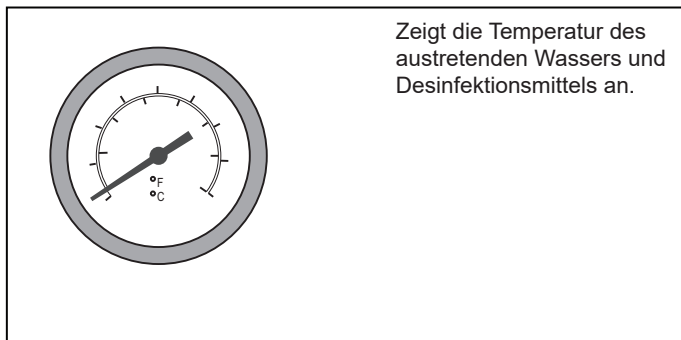

Zeigt die Temperatur des austretenden Wassers und Desinfektionsmittels an.

## Spülhebel oder Spültaste

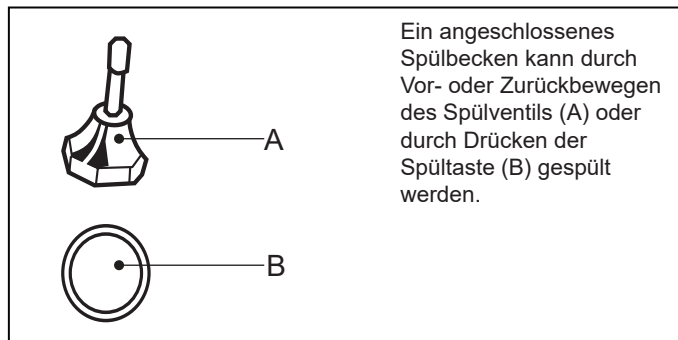

Ein angeschlossenes Spülbecken kann durch Vor- oder Zurückbewegen des Spülventils (A) oder durch Drücken der Spültaste (B) gespült werden.