

Alenti

Forflytning fra en oprejst stilling

1




Aktivér bremserne på Alenti-liften.

2



Skub håndstøtten tilbage.

3

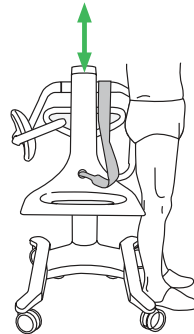


Tilpas højden på Alenti-liften. Sørg for, at sædet flugter med bagsiden af plejemodtagerens knæ. Hjælp plejemodtageren med at sætte sig ned.

4




Risiko for fald

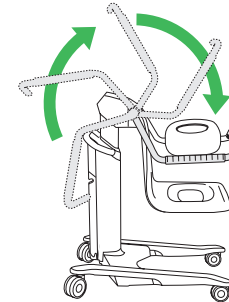

Skub håndstøtten fremad.

5

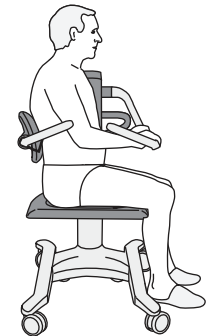

Sørg for, at plejemodtageren sidder i opret stilling midt på sædet.

6



Sørg for, at plejemodtageren sidder med:

- balderne ved bagenden af sædet,
- ryggen imod ryglænet og
- hænderne på håndstøtten.

7



Fastgør om nødvendigt plejemodtageren med sikkerhedsselen.

8



Risiko for fald



Tilpas Alenti-liften til en sikker og ergonomisk højde.

9



Frigør bremserne.

10



Brug altid forflytningshåndtagene til at forflytte plejemodtageren.

Forflytning til en oprejst stilling

1



Sænk Alenti-liften, indtil plejemodtagerens fødder er i kontakt med gulvet.

2




Aktivér bremserne på liften.

3



Skub håndstøtten tilbage og væk fra plejemodtageren.

4

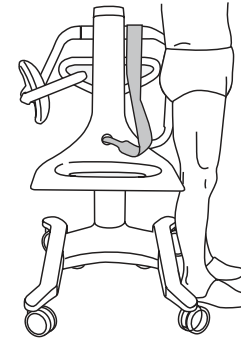

Frigør sikkerhedsselen, anbring selen omkring den øverste del af håndtagsarmen til håndstøtten, og hjælp plejemodtageren med at rejse sig op.

Forflytning fra et stå- og rejsehjælpemiddel

1



Skub håndstøtten tilbage.

2




Mens plejemodtageren har ryggen mod Alenti-liftens sæde, skal stå- og rejsehjælpemidlet placeres så tæt som muligt på liften.

3




Aktivér bremserne på liften.

4

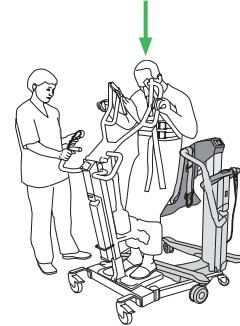


Sænk plejemodtageren ned på Alenti-liftens sæde. Hægt sejlet af.

5

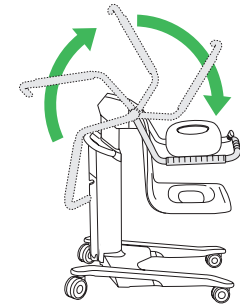

Skub håndstøtten fremad, så plejemodtageren kan holde fast i den.

6

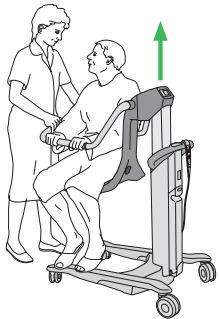

Løft Alenti-liften, indtil plejemodtagerens fødder er fri af stå- og rejsehjælpemidlet. Fjern sejlet fra plejemodtageren.

7



Risiko for fald




Sørg for, at plejemodtageren sidder med:

- balderne ved bagenden af sædet,
- ryggen imod ryglænet og
- hænderne på håndstøtten.

8



Risiko for fald

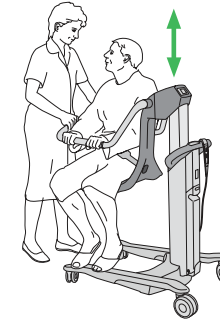

Fastgør om nødvendigt plejemodtageren med sikkerhedsselen. Fjern stå- og rejsehjælpemidlet. Tilpas Alenti-liften til en ergonomisk højde.

9



Frigør bremserne.


Forflytning til et stå- og rejsehjælpemiddel

1



Sænk Alenti-liften.

2

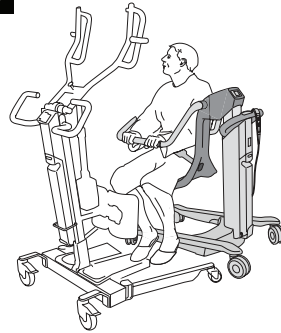

Anbring stå- og rejsehjælpemidlet foran plejemodtageren.

3



Lad bremserne på Alenti-liften være ulåste.

4



Aktivér bremserne


Anvend bremserne på stå- og rejsehjælpemidlet.

5




Skub håndstøtten tilbage og væk fra plejemodtageren.

6

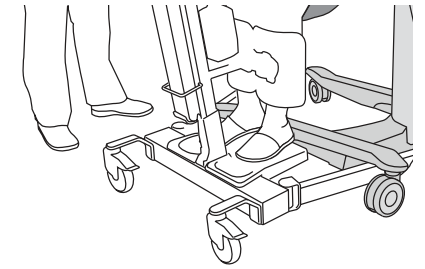

Anbring plejemodtagerens fødder på fodstøtten på stå- og rejsehjælpemidlet.

7

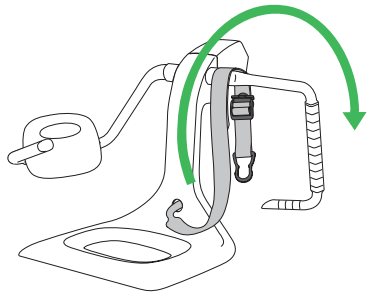

Tag sikkerhedsselen af, og anbring den omkring den øverste del af håndstøtten.

8



Anbring sejlet omkring plejemodtageren. Fastgør sejlet på stå- og rejsehjælpemidlet. Løft forsigtigt stå- og rejsehjælpemidlet.

9




Frigør bremserne på stå- og rejsehjælpemidlet, og bevæg langsomt det og plejemodtageren væk fra Alenti-liften.

Forflytning fra seng – siddende stilling

1




Aktivér
bremserne

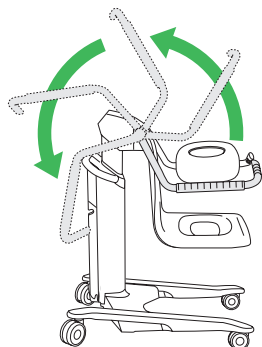

Aktivér bremserne på sengen.
Skub håndstøtten tilbage.

2

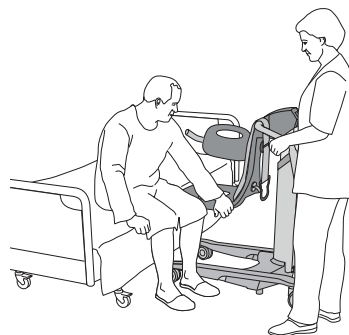


Anbring Alenti-liftens front på siden af sengen med sædet på Alenti-liften placeret lavere end sengen.

3



Aktivér bremserne på Alenti-liften.

4

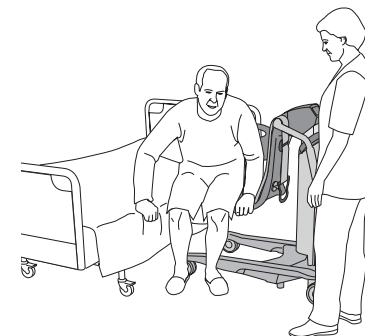

Lad plejemodtageren flytte sig selv fra sengen til Alenti-liften.

5



Skub håndstøtten fremad, så plejemodtageren kan holde fast i den.

6



Risiko for fald




Sørg for, at plejemodtageren sidder med:

- balderne ved bagenden af sædet,
- ryggen imod ryglænet og
- hænderne på håndstøtten.

7



Risiko for fald

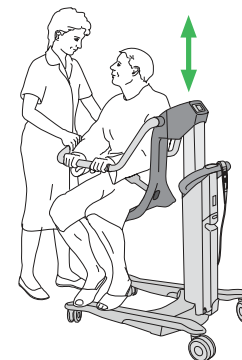

Fastgør om nødvendigt plejemodtageren med sikkerhedsselen.
Tilpas Alenti-liften til en ergonomisk højde.


8



Frigør bremserne.

Forflytning til seng – siddende stilling

1

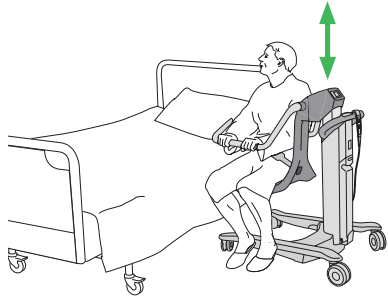

Tilpas Alenti-liften til en passende højde. Anbring Alenti-liften, så dens front vender mod siden af sengen.


2



Aktivér
bremserne

Aktivér bremserne på Alenti-liften. Aktivér bremserne på sengen.

3

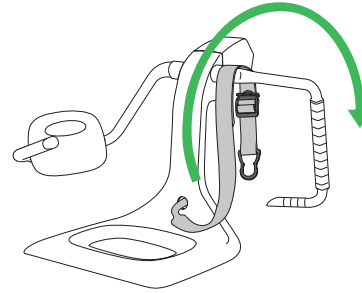


Tag sikkerhedsselen af, og anbring den omkring den øverste del af håndstøttens håndtagarm.

4




Skub håndstøtten tilbage og væk fra plejemodtageren.

5

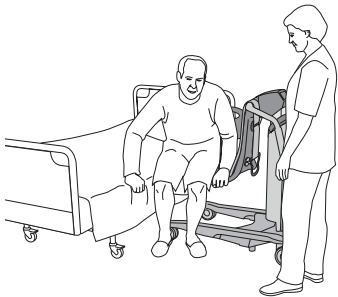

Lad plejemodtageren flytte sig selv til sengen fra Alenti-liften.


6

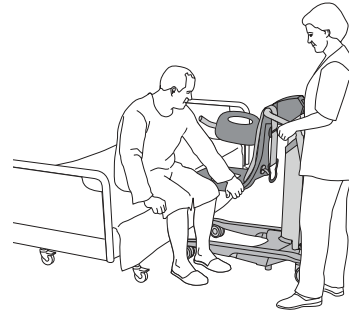

Sørg for, at plejemodtageren sidder sikkert i en opret stilling på kanten af sengen, inden Alenti-liften trækkes væk.


Badning af plejemodtageren

1

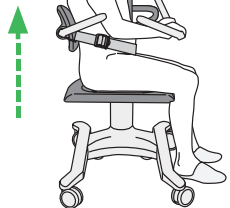

Sænk badekarret til den laveste højde. Hæv liften, så der er plads mellem plejemodtagerens genitalier og kanten på badekarret.

2

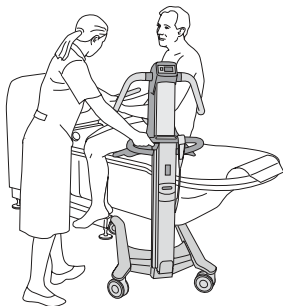


Anbring liften diagonalt i forhold til hovedenden af badekarret.

3




Risiko for klemskader

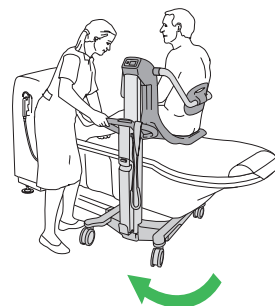


Hjælp plejemodtageren med at flytte vedkommendes ben over kanten af badekarret, mens liften drejes i position.

4

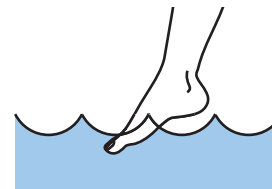

Lad plejemodtageren mærke vandet. Tilpas vandtemperaturen efter behov.

5

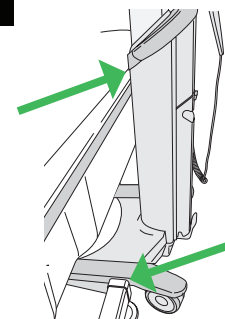

Centrér liften over badekarret, indtil den stopper mod kanten af badekarret.

6





Risiko for klemskader



Sænk liften til en højde, der er behagelig for plejepersonalet. Hæv badekarret. Sørg for, at ingen kropsdele kommer i klemme.

7

Valgfri

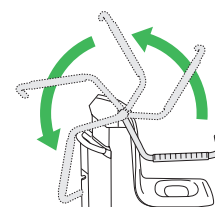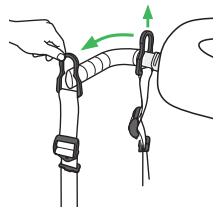

Hvis plejemodtageren ønsker det og er i stand til det:

1. Tag sikkerhedsselen af ryglænet.
2. Læn plejemodtageren fremover.
3. Skub ryglænet tilbage.
4. Læn plejemodtageren mod kanten af badekarret.
5. Skub håndstøtten tilbage og væk fra plejemodtageren.


8



Badning af plejemodtageren.

Efter badet

1

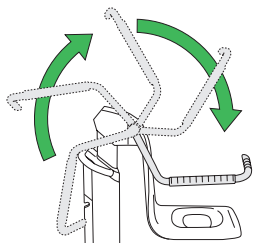


Åbn for afløbet.
Hvis håndstøtten er skubbet væk, skal den skubbes fremad foran plejemodtageren.

2



Risiko for fald

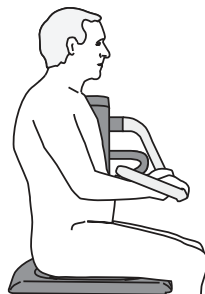

Sørg for, at plejemodtageren sidder med:


- balderne ved bagenden af sædet,
- ryggen imod ryglænet og
- hænderne på håndstøtten.

3




Læn plejemodtageren fremad, og drej håndtagsarmen til ryglænet fremad. Fastgør sikkerhedsselen.

4

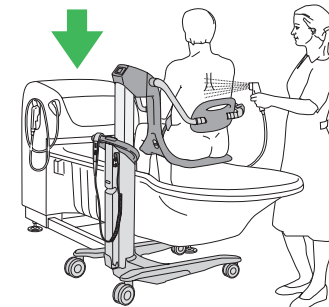


Sænk badekarret til dets laveste position. Tænd for bruseren, og lad plejemodtageren mærke på vandet med hånden. Tilpas vandtemperaturen efter behov. Giv plejemodtageren brusebad.

5

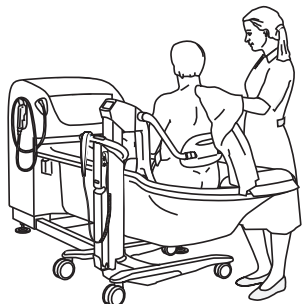

Tør plejemodtageren, og svøb vedkommende ind i håndklæder, så han/hun føler sig varm og behageligt tilpas.

6

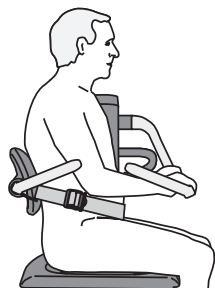

Sørg for, at plejemodtageren sidder i opret stilling midt på sædet.

7



Hæv liften, så der er plads mellem plejemodtagerens genitalier og kanten på badekarret. Vask og tør plejemodtagerens fødder.

8



Risiko for klemeskader

Hjælp plejemodtageren med at flytte benene over kanten af badekarret, samtidig med at liften drejes væk fra badekarret.

9



Risiko for at tippe

Sørg for, at Alenti-liften er helt fri fra omkringstående forhindringer. Sænk liften.