


Transfer vanuit staande positie

1




Activeer de remmen op de Alenti-lift.

2

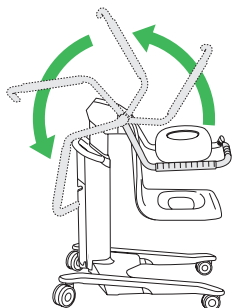

Klap de handsteun naar achteren.

3

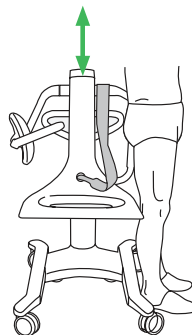


Stel de hoogte van de Alenti-lift af. Zorg ervoor dat de zitting gelijk komt met de knieholtes van de zorgvrager. Help de zorgvrager bij het plaatsnemen op de stoel.

4




Gevaar voor vallen

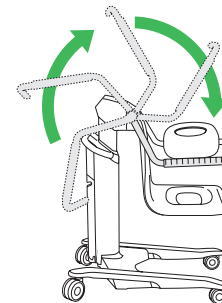

Klap de handsteun naar voren.

5

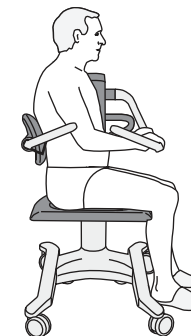

Zorg ervoor dat de zorgvrager rechtop in het midden van de zitting zit.

6



Zorg ervoor dat de zorgvrager als volgt zit:

- billen tegen de achterkant van de zitting,
- rug tegen de rugsteun en
- handen op de handsteun.

7




Breng de veiligheidsriem aan bij de zorgvrager.

8



Gevaar voor vallen

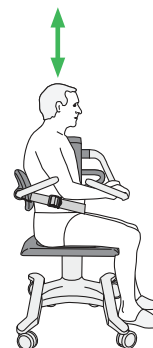

Stel de Alenti-lift op een veilige en ergonomische hoogte af.

9



Ontgrendel de rem.


10



Gebruik de transferhendels om de zorgvrager te verplaatsen.

Transfer naar staande positie

1

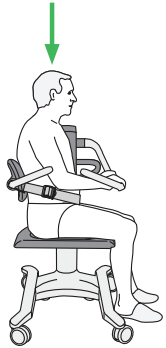

Breng de Alenti-lift omlaag totdat de voeten van de zorgvrager op de vloer rusten.

2




Activeer de remmen op de lift.

3



Klap de handsteun weg van de zorgvrager.

4

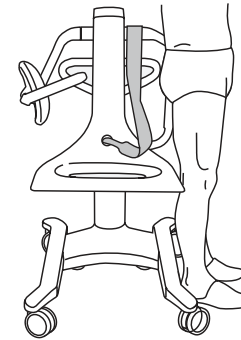

Haal de veiligheidsriem los, doe de riem rond het bovenste deel van de voorste beugel en help de zorgvrager met opstaan.

Transfer vanuit een actieve tillift

1



Klap de handsteun naar achteren.

2




Plaats de actieve tillift zo dicht mogelijk bij de Alenti-lift terwijl de zorgvrager met de rug naar de zitting van de lift zit.

3




Activeer de remmen op de lift.

4

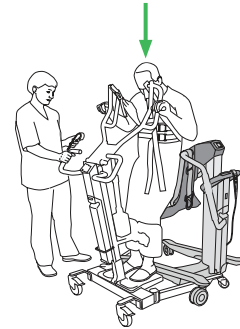


Laat de zorgvrager op de zitting van de Alenti-lift zakken. Maak de tilband los.

5

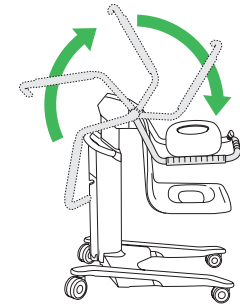

Klap de handsteun naar voren zodat de zorgvrager hem kan vasthouden.

6

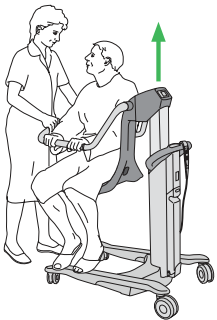

Breng de Alenti-lift omhoog totdat de voeten van de zorgvrager vrij komen van de actieve tillift. Verwijder de tilband.

7



Gevaar voor vallen

Zorg ervoor dat de zorgvrager als volgt zit:


- billen tegen de achterkant van de zitting,
- rug tegen de rugsteun en
- handen op de handsteun.



8



Gevaar voor vallen

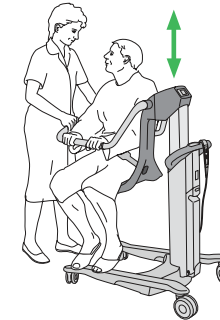

Breng de veiligheidsriem aan bij de zorgvrager. Verwijder de actieve lift. Stel de Alenti-lift af op een ergonomische hoogte.

9



Ontgrendel de rem.


Transfer naar een actieve tillift

1



Laat de Alenti-lift zakken.

2

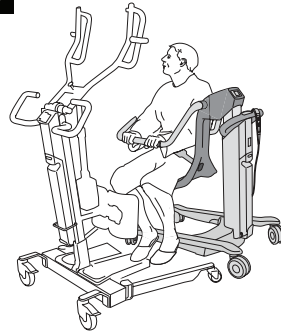

Plaats de actieve tillift vóór de zorgvrager.

3



Laat de remmen van de Alenti-lift ontgrendeld.

4



Activeer de remmen


Zet de actieve tillift op de rem.

5




Klap de handsteun weg van de zorgvrager.

6

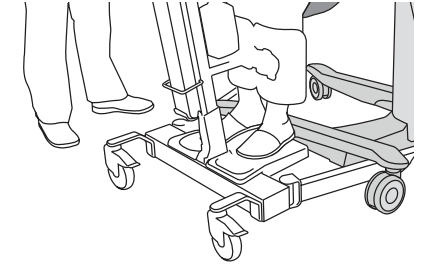

Plaats de voeten van de zorgvrager op de voetsteun van de actieve lift.

7

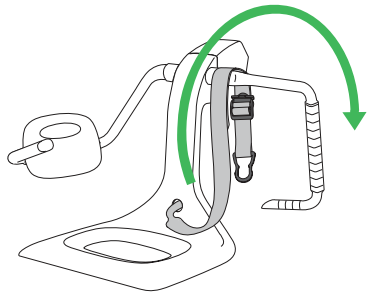

Haal de veiligheidsriem los en plaats hem rondom het bovenste deel van de handsteun.

8



Breng de tilband aan rondom de zorgvrager. Bevestig de tilband aan de tillift. Laat de actieve lift rustig omhoog komen.

9




Ontgrendel de remmen van de actieve lift en verplaats die samen met de zorgvrager rustig weg van de Alenti-lift.

Transfer vanuit bed - zittend

1




Activeer de remmen

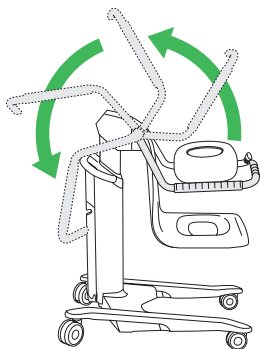

Zet het bed op de rem.
Klap de handsteun naar achteren.

2

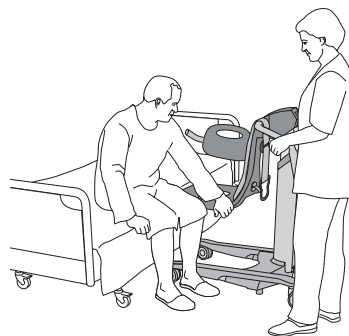


Plaats de voorkant van de Alenti-lift naar de zijkant van het bed, met de zitting van de Alenti-lift lager dan het bed.

3




Activeer de remmen op de Alenti-lift.

4

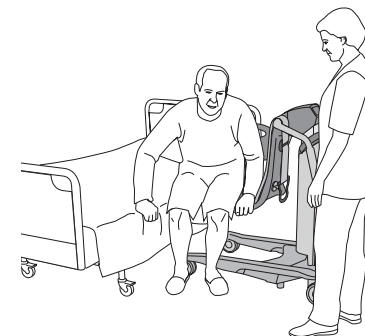

Laat de zorgvrager zichzelf vanaf het bed naar de Alenti-lift verplaatsen.

5

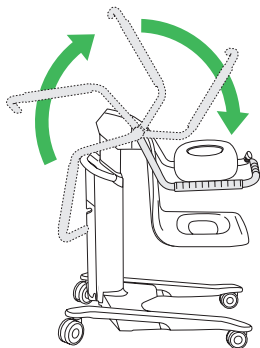

Klap de handsteun naar voren zodat de zorgvrager hem kan vasthouden.

6



Gevaar voor vallen




Zorg ervoor dat de zorgvrager als volgt zit:

- billen tegen de achterkant van de zitting,
- rug tegen de rugsteun en
- handen op de handsteun.

7



Gevaar voor vallen

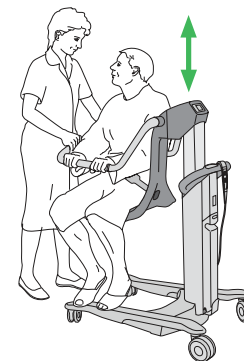

Breng de veiligheidsriem aan bij de zorgvrager.
Stel de Alenti-lift af op een ergonomische hoogte.


8



Ontgrendel de rem.

Transfer naar bed - zittend

1

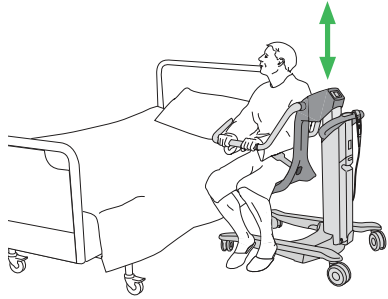

Stel de Alenti-lift af op een gepaste hoogte. Plaats de Alenti-lift met de voorkant naar de zijkant van het bed gericht.


2



Activeer de remmen

Activeer de remmen op de Alenti-lift. Zet het bed op de rem.

3

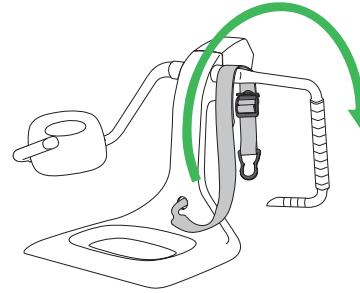


Haal de veiligheidsriem los en doe hem rondom het bovenste deel van de voorste beugel.

4




Klap de handsteun weg van de zorgvrager.

5

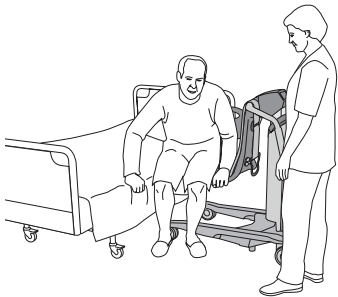

Laat de zorgvrager zichzelf vanaf de Alenti-lift naar het bed verplaatsen.


6

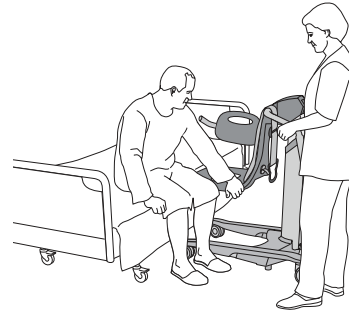

Zorg ervoor dat de zorgvrager veilig rechtop op de zijkant van het bed zit voordat de Alenti-lift wordt weggetrokken.


De zorgvrager wassen

1

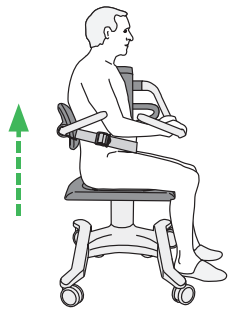

Zet de badkuip in de laagste stand. Breng de lift omhoog zodat er ruimte is tussen de genitaliën van de zorgvrager en de rand van de badkuip.

2

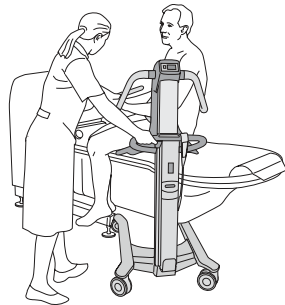

Plaats de lift diagonaal tot het hoofdeinde van de badkuip.

3




Risico van beknelling




Help de zorgvrager om zijn/haar benen over de rand van de badkuip te plaatsen terwijl u de lift op zijn plaats draait.

4

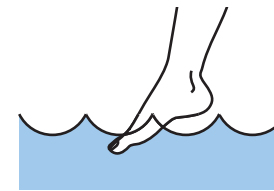

Laat de zorgvrager het water voelen. Pas de temperatuur zo nodig aan.

5

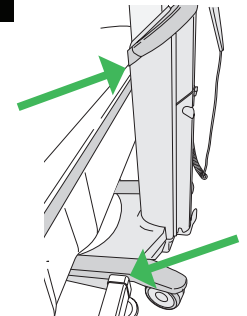


Plaats de lift boven het midden van de badkuip tot hij tegen de badkuip komt.

6





Risico van beknelling

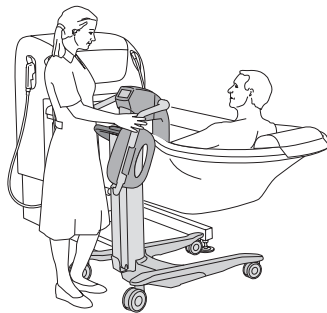

Laat de lift tot een voor de zorgverlener comfortabele hoogte zakken. Breng de badkuip omhoog. Zorg dat er geen lichaamsdelen bekneld raken.

7

Optioneel

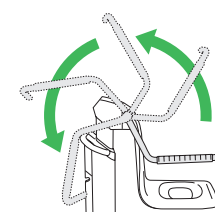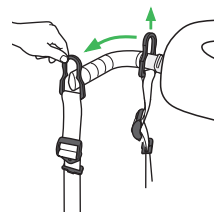

Indien de zorgvrager dit wenst en hiertoe in staat is:

1. Maak de veiligheidsriem los van de rugsteun.
2. Laat de zorgvrager naar voren leunen.
3. Klap de rugsteun naar achteren.
4. Laat de zorgvrager naar achteren tegen de badkuip leunen.
5. Klap de handsteun weg van de zorgvrager.


8



De zorgvrager wassen.

Na het bad

1

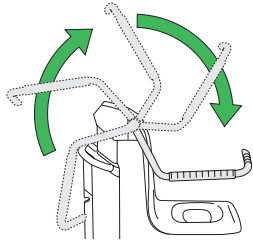

Open de afvoer.
Als de handsteun is weggeklapt,
klap hem dan naar voren zodat hij
zich voor de zorgvrager bevindt.

2



Gevaar
voor vallen



Zorg ervoor dat
de zorgvrager
als volgt zit:


- billen tegen de achterkant
van de zitting,
- rug tegen de rugsteun en
- handen op de handsteun.

3



Laat de zorgvrager naar voren
leunen en draai de beugel aan
rugzijde naar voren.
Maak de veiligheidsriem vast.

4

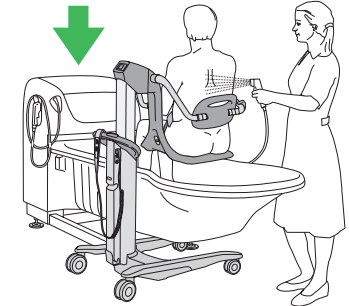


Zet de badkuip in de laagste stand.
Zet de douche aan en laat de zorgvrager
het water met de hand voelen.
Pas de temperatuur zo nodig aan.
Douch de zorgvrager

5




Droog de zorgvrager af en leg
handdoeken om hem/haar heen,
zodat hij/zij warm blijft en zich
prettig voelt.

6

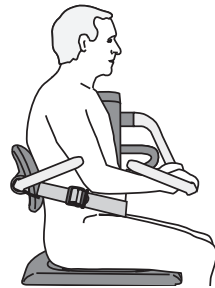

Zorg ervoor dat de
zorgvrager rechtop in het
midden van de zitting zit.

7

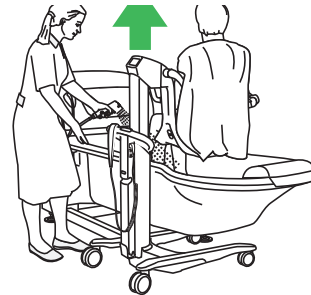

Breng de lift omhoog zodat er
ruimte is tussen de genitaliën
van de zorgvrager en de rand
van de badkuip. Douch en droog
de voeten van de zorgvrager.

8



Risico van
beknelling



Help de zorgvrager om zijn/
haar benen over de rand van
de badkuip te krijgen, terwijl u de
lift van de badkuip vandaan draait.

9



Gevaar voor
omkantelen



Zorg ervoor dat er
voldoende afstand is tussen
de Alenti-lift en obstakels in
de buurt. Laat de lift zakken.