

Alenti


Flytte pasienten fra stående stilling

1




Aktiver bremsene på Alenti-løfteren.

2



Fell håndstøtten bakover.

3

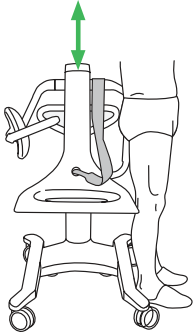

Juster høyden på Alenti-løfteren. Pass på at setet er på linje med baksiden av pasientens knær. Hjelp pasienten med å sette seg.

4




Risiko for å falle



Fell håndstøtten fremover.

5

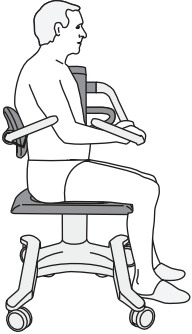

Påse at pasienten sitter oppreist midt på setet.


6



Pass på at pasienten sitter med:

- baken mot setets bakre kant,
- ryggen mot ryggstøtten og
- hendene på håndstøtten.

7

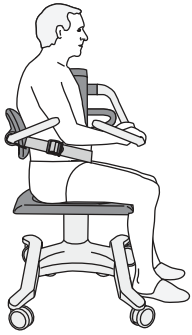

Sikre pasienten med sikkerhetsbeltet.

8




Risiko for å falle



Juster Alenti-løfteren til en trygg og ergonomisk høyde.

9



Frigjør bremsene.

10



Bruk forflytningshåndtakene til å flytte pasienten.

Flytte pasienten til stående stilling

1



Senk Alenti-løfteren til pasientens føtter berører gulvet.

2




Aktiver bremsene på løfteren.

3



Fell håndstøtten bakover og bort fra pasienten.


4

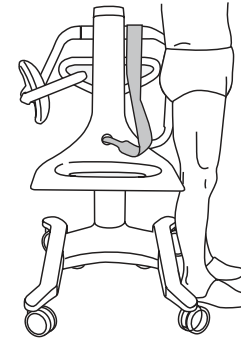

Løsne sikkerhetsbeltet, legg beltet rundt øvre del av håndstøttebøylen og hjelp pasienten med å reise seg.

Flytting fra et stå- og oppreisningshjelpemiddel

1

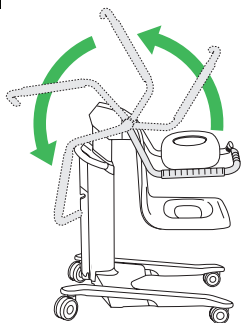

Fell håndstøtten bakover.

2




Plasser stå- og oppreisningshjelpemiddelet så nær løfteren som mulig, med pasientens rygg mot setet på Alenti-løfteren.

3



Aktiver bremsene på løfteren.

4

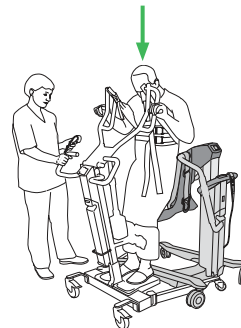


Senk pasienten ned i Alenti-løfteren. Hekt løs seilet.

5



Fell armstøtten frem, slik at pasienten kan holde seg i den.

6

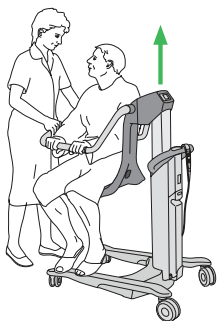

Hev Alenti-løfteren til pasientens føtter går klar av stå- og oppreisningshjelpemiddelet. Ta av seilet.

7



Risiko for å falle




Pass på at pasienten sitter med:

- baken mot setets bakre kant,
- ryggen mot ryggstøtten og
- hendene på håndstøtten.

8



Risiko for å falle

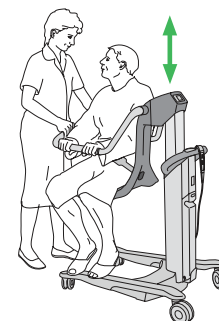

Sikre pasienten med sikkerhetsbeltet. Fjern stå- og oppreisningshjelpemiddelet. Juster Alenti-løfteren til en ergonomisk arbeidshøyde.

9



Frigjør bremsene.


Flytting til et stå- og oppreisningshjelpemiddel

1



Senk Alenti-løfteren.

2

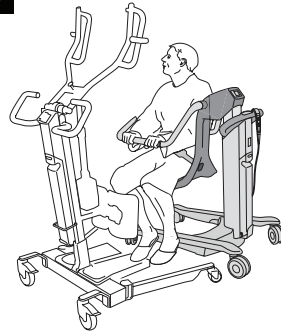

Plasser stå- og oppreisningshjelpemiddelet foran pasienten.

3



La bremsene på Alenti-løfteren være ulåst.

4



Sett på bremsene


Sett på bremsene på stå- og oppreisningshjelpemiddelet.

5




Fell håndstøtten bakover og bort fra pasienten.

6

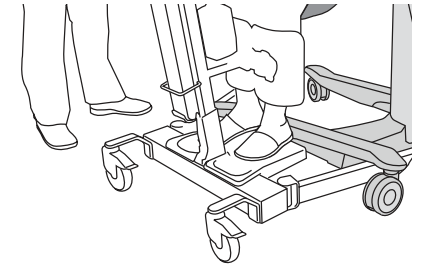

Plasser pasientens føtter på fotstøtten på stå- og oppreisningshjelpemiddelet.

7

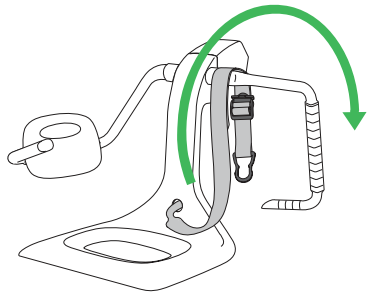

Ta av sikkerhetsbeltet og legg det rundt den øvre delen av håndstøtten.

8



Legg seilet rundt pasienten. Ffest seilet til stå- og oppreisningshjelpemiddelet. Hev stå- og oppreisningshjelpemiddelet varsomt.

9



Frigjør bremsene på stå- og oppreisningshjelpemiddelet, og flytt det og pasienten bort fra Alenti-løfteren.

Flytting fra sengen – sittende

1




Sett på
bremsene



Sett på bremsene på sengen.
Fell håndstøtten bakover.

2

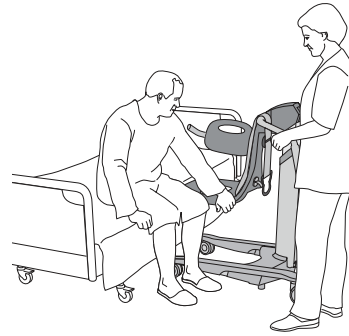


Plasser fronten på Alenti-løfteren mot siden
på sengen, med setet på Alenti-løfteren lavere
enn sengen.

3




Aktiver bremsene
på Alenti-løfteren.

4

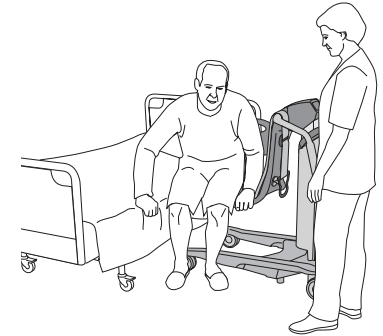

La pasienten flytte seg selv fra sengen
til Alenti-løfteren.

5

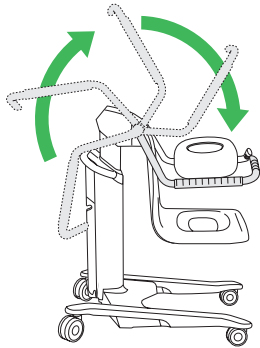


Fell armstøtten frem, slik at pasienten
kan holde seg i den.

6



Risiko
for å falle

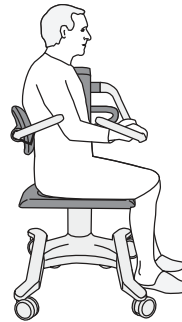


Pass på at pasienten sitter med:

- baken mot setets bakre kant,
- ryggen mot ryggstøtten og
- hendene på håndstøtten.

7



Risiko
for å falle

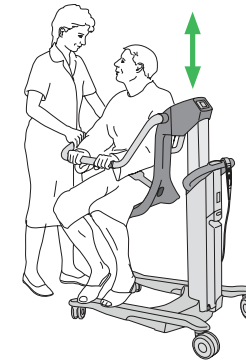

Sikre pasienten med sikkerhetsbeltet.
Juster Alenti-løfteren til en ergonomisk
arbeidshøyde.


8



Frigjør bremsene.

Flytting til sengen – sittende

1

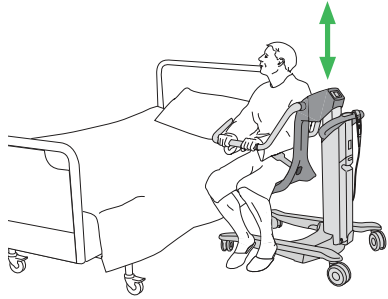

Juster Alenti-løfteren til passende høyde.
Plasser Alenti-løfteren med fronten vendt mot siden på sengen.


2



Sett på
bremsene

Aktiver bremsene
på Alenti-løfteren.
Sett på bremsene
på sengen.

3

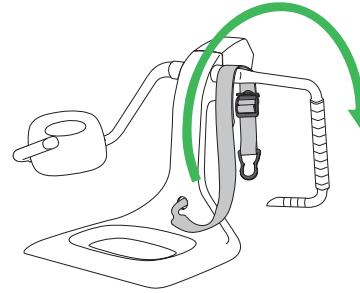


Ta av sikkerhetsbeltet og legg det rundt
den øvre delen av håndstøttebøylen.

4




Fell håndstøtten bakover og bort
fra pasienten.

5

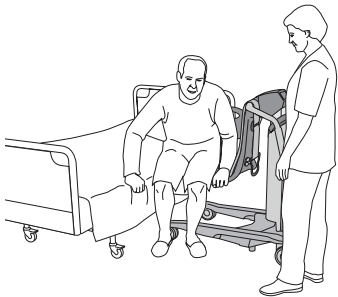

La pasienten flytte seg selv til sengen
fra Alenti-løfteren.


6

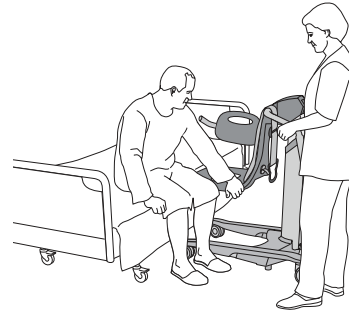

Pass på at pasienten sitter trygt oppreist på siden av sengen
før Alenti-løfteren trekkes bort.


Bade pasienten

1

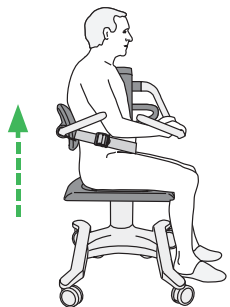

Senk badekaret til laveste stilling. Hev løfteren slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.

2

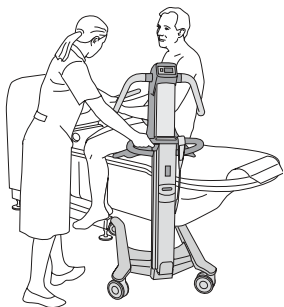


Plasser løfteren diagonalt mot hodeenden av badekaret.

3




Risiko for klemming

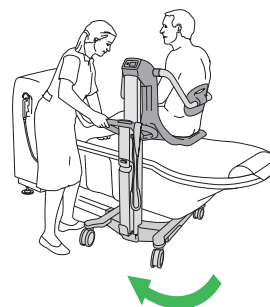


Hjelp pasienten med å flytte bena over badekarkanten mens løfteren svinges på plass.

4

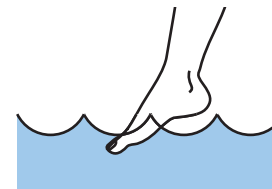

La pasienten kjenne på vannet. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

5

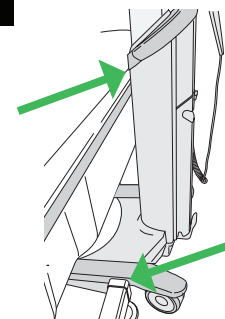

Plasser løfteren midt over badekaret til den stopper mot badekaret.

6





Risiko for klemming



Senk løfteren til en behagelig høyde for pleieren. Hev badekaret. Pass på at ingen kroppsdeler kommer i klem.

7

Ekstrautstyr

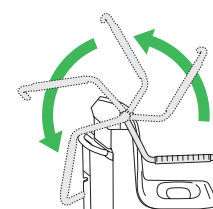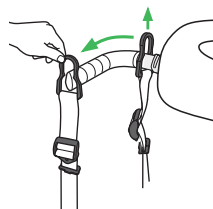

Hvis pasienten ønsker det og er i stand til det:

1. Fjern sikkerhetsbeltet fra ryggstøtten.
2. Len pasienten forover.
3. Fell ryggstøtten bakover.
4. Len pasientens rygg mot badekaret.
5. Fell håndstøtten bakover og bort fra pasienten.


8



Bade pasienten.

Etter badet

1

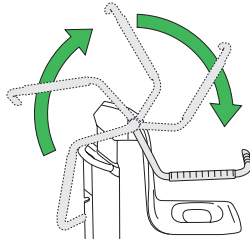


Åpne avløpet.
Hvis håndstøtten er felt bort, feller du den tilbake foran pasienten.

2




Risiko
for å falle

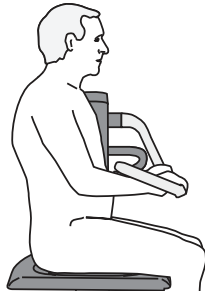

Pass på at pasienten sitter med:


- baken mot setets bakre kant,
- ryggen mot ryggstøtten og
- hendene på håndstøtten.

3

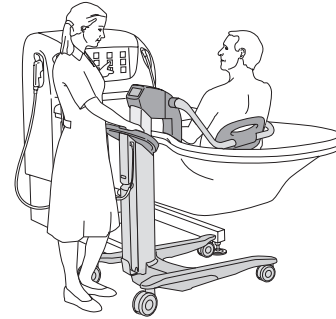

Len pasienten forover, og roter ryggstøttebøylen fremover.
Fest sikkerhetsbeltet.

4

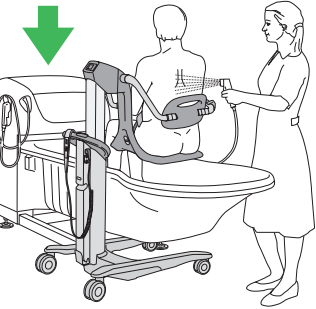


Senk badekaret til laveste stilling.
Sett på dusjen og la pasienten kjenne på vannet med hånden. Juster temperaturen hvis det er nødvendig. Dusj pasienten.

5



Tørk pasienten, og dekk ham/henne til med håndklær slik at vedkommende har det varmt og behagelig.

6

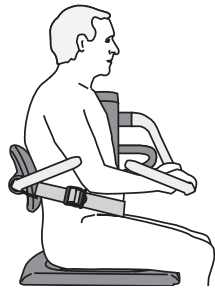

Påse at pasienten sitter oppreist midt på setet.

7



Hev løfteren slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.
Dusj og tørk pasientens føtter.

8



Risiko for
klemming



Hjelp pasienten med å flytte bena over badekarkanten mens løfteren roteres bort fra badekaret.

9



Risiko for velt



Sørg for at Alenti-løfteren går helt klar av hindringer i omgivelsene. Senk løfteren.