


Перемещение из положения стоя

1



Включите тормоза подъемника Alenti.

2



Отведите опору для рук назад.

3



Отрегулируйте высоту подъемника Alenti. Убедитесь, что сиденье находится на одном уровне по высоте с подколенными ямками пациента. Помогите пациенту сесть.

4



Риск падения



Опустите опору для рук вперед.

5



Убедитесь, что пациент сидит вертикально по центру сиденья.

6



Убедитесь, что пациент сидит так:

- его ягодицы находятся у заднего края сиденья,
- спина прислоняется к спинке,
- руки лежат на опоре для рук.

7



Зафиксируйте пациента с помощью ремня безопасности.

8




Риск падения



Установите подъемник Alenti на безопасную и удобную высоту.

9



Отпустите тормоза на подъемнике.

10



Для транспортировки пациента используйте рукоятки для транспортировки.

Перемещение в положение стоя

1



Опускайте подъемник Alenti до тех пор, пока стопы пациента не коснутся пола.

2




Включите тормоза подъемника.

3



Отведите опору для рук назад, в сторону от пациента.


4

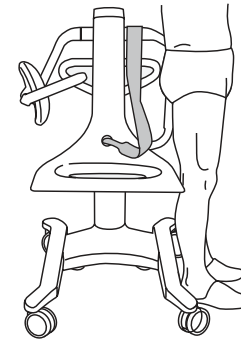

Отстегните ремень безопасности, перекиньте ремень через верхнюю часть рукоятки опоры для рук и помогите пациенту встать.

Перемещение из оборудования для подъема и удержания в вертикальном положении

1

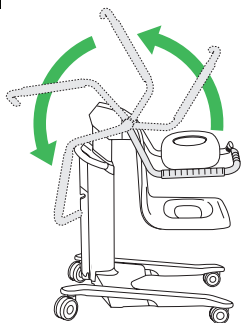

Отведите опору для рук назад.

2




Повернув пациента спиной к сиденью подъемника Aenti, расположите оборудование для подъема и удержания в вертикальном положении как можно ближе к подъемнику.

3




Включите тормоза подъемника.

4

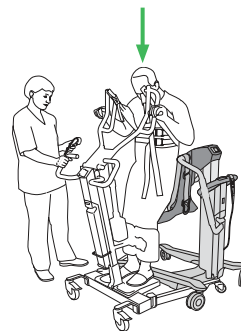


Опустите пациента на сиденье подъемника Aenti. Отцепите стропу.

5

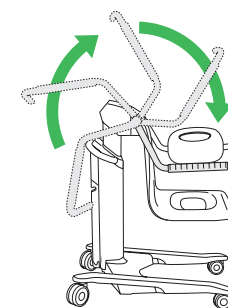

Поверните опору для рук вперед, чтобы пациент мог держаться за нее.

6

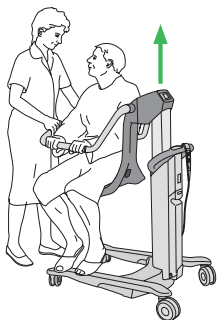

Поднимите подъемник Aenti, чтобы стопы пациента поднялись над оборудованием для подъема и удержания в вертикальном положении. Уберите стропу из-под пациента.

7



Риск падения




Убедитесь, что пациент сидит так:

- его ягодицы находятся у заднего края сиденья;
- спина прислоняется к спинке;
- руки лежат на опоре для рук.

8



Риск падения

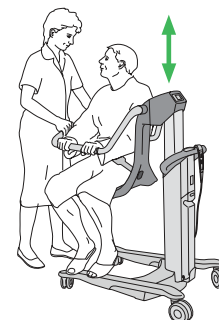

Зафиксируйте пациента с помощью ремня безопасности. Уберите оборудование для подъема и удержания в вертикальном положении. Установите подъемник Aenti на удобную высоту.


9



Отпустите тормоза на подъемнике.

Перемещение в оборудовании для подъема и удержания в вертикальном положении

1




Опустите подъемник Alenti.

2




Расположите оборудование для подъема и удержания в вертикальном положении перед пациентом.

3



Оставьте тормоза подъемника Alenti отключенными.

4



Задействуйте тормоза

Включите тормоза оборудования для подъема и удержания в вертикальном положении.

5



Отведите опору для рук назад, в сторону от пациента.

6



Расположите стопы пациента на опоре для стоп оборудования для подъема и удержания в вертикальном положении.

7



Поднимите ремень безопасности и перекиньте его через верхнюю часть опоры для рук.

8



Оберните стропу вокруг пациента. Присоедините стропу к оборудованию для подъема и удержания в вертикальном положении. Аккуратно поднимите оборудование для подъема и удержания в вертикальном положении.

9




Отключите тормоза оборудования для подъема и удержания в вертикальном положении и медленно отодвиньте его от подъемника Alenti.

Перемещение с кровати — из положения сидя

1




Задействуйте тормоза

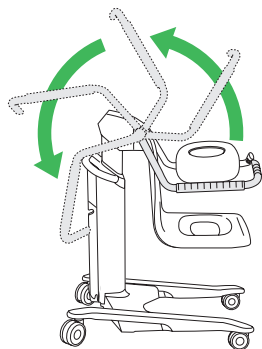

Зафиксируйте тормоза на колесах кровати. Отведите опору для рук назад.

2

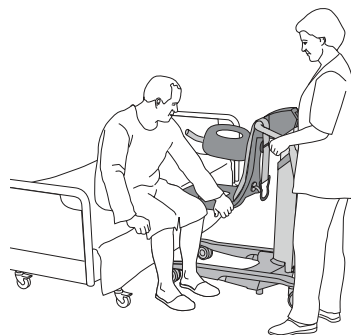


Расположите переднюю часть подъемника Alenti у боковой стороны кровати, установите сиденье подъемника Alenti ниже уровня кровати.

3




Включите тормоза подъемника Alenti.

4

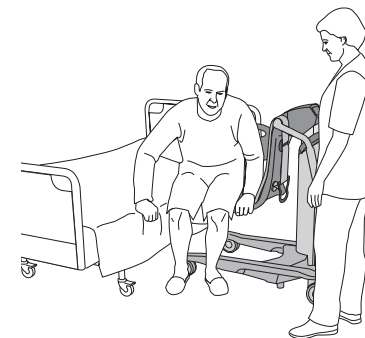

Теперь пациент может переместиться с кровати на подъемник Alenti.

5

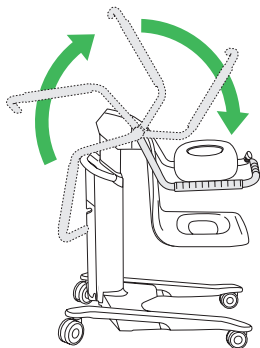

Поверните опору для рук вперед, чтобы пациент мог держаться за нее.

6



Риск падения




Убедитесь, что пациент сидит так:

- его ягодицы находятся у заднего края сиденья;
- спина прислоняется к спинке;
- руки лежат на опоре для рук.

7



Риск падения

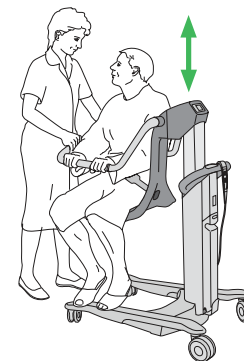

Зафиксируйте пациента с помощью ремня безопасности. Установите подъемник Alenti на удобную высоту.


8



Отпустите тормоза на подъемнике.

Перемещение в кровать — из положения сидя

1

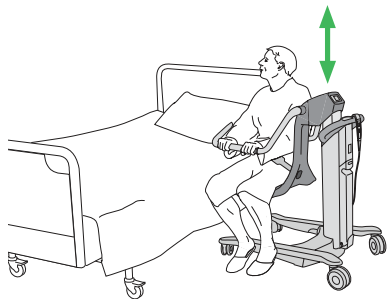

Установите подъемник Aenti на соответствующую высоту. Расположите подъемник Aenti так, чтобы его передняя часть была обращена к боковой стороне кровати.


2



Задействуйте тормоза

Включите тормоза подъемника Aenti. Зафиксируйте тормоза на колесах кровати.

3

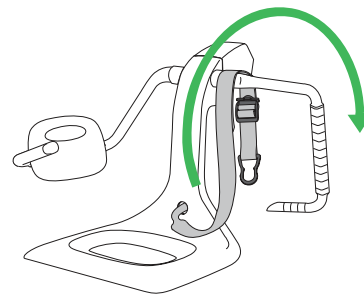


Поднимите ремень безопасности и перекиньте его через верхнюю часть рукоятки опоры для рук.

4




Отведите опору для рук назад, в сторону от пациента.

5

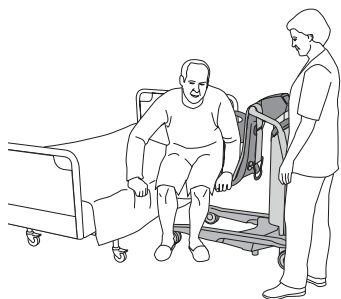

Теперь пациент может переместиться на кровать с подъемника Aenti.


6

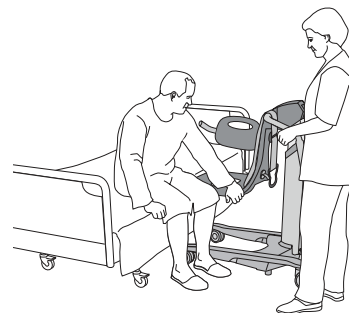

Прежде чем отодвигать подъемник Aenti, убедитесь, что пациент сидит прямо и безопасно на боковой стороне кровати.

Купание пациента

1

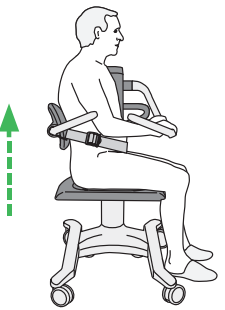

Опустите ванну на самую низкую высоту. Поднимите подъемник так, чтобы между краем ванны и половыми органами пациента было достаточно места.

2



Расположите подъемник по диагонали к головному концу ванны.

3



Риск защемления


Помогите пациенту перенести ноги через край ванны, одновременно поворачивая подъемник в нужное положение.

4



Дайте пациенту попробовать воду. При необходимости отрегулируйте температуру.

5

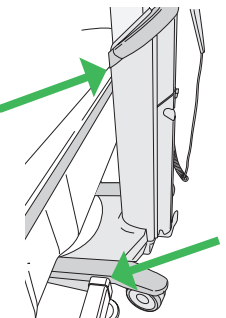

Расположите подъемник над ванной так, чтобы его опоры касались края ванны.

6



Риск защемления

Опустите подъемник до уровня, удобного для лица, осуществляющего уход. Поднимите ванну. Следите, чтобы никакие части тела не оказались зажатыми.


7 Дополнительно



При наличии возможности и по желанию пациента:

1. Снимите ремень безопасности со спинки.
2. Наклоните пациента вперед.
3. Откиньте спинку назад.
4. Помогите пациенту откинуться на спинку ванны.
5. Отведите опору для рук назад, в сторону от пациента.


8



Купание пациента.

После купания

1

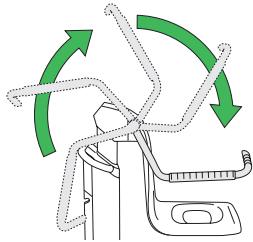


Откройте слив.
Если опора для рук была отведена назад, поверните ее вперед и установите перед пациентом.

2



Риск падения

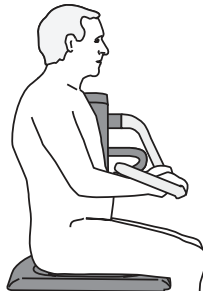

Убедитесь, что пациент сидит так:


- его ягодицы находятся у заднего края сиденья,
- спина прислоняется к спинке,
- руки лежат на опоре для рук.

3



Наклоните пациента вперед, поверните вперед рукоятку спинки. Застегните ремень безопасности.

4

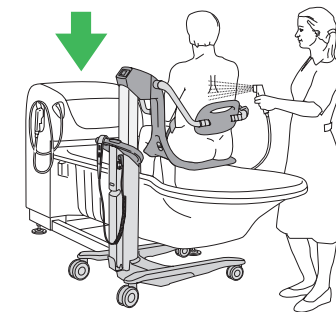


Опустите ванну в самое нижнее положение. Включите душ и дайте пациенту попробовать воду рукой. При необходимости отрегулируйте температуру. Вымойте пациента под душем.

5




Вытрите пациента, накройте его полотенцами для согревания и удобства.

6

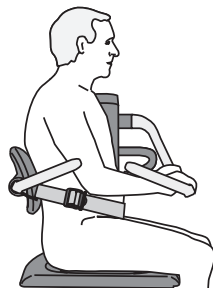

Убедитесь, что пациент сидит вертикально по центру сиденья.

7

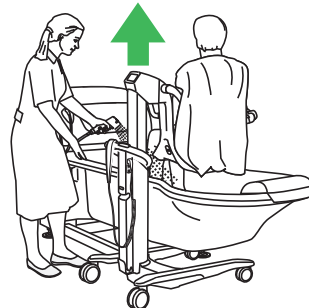

Поднимите подъемник так, чтобы между краем ванны и половыми органами пациента было достаточно места. Вымойте и вытрите ноги пациента.

8



Риск защемления



Помогите пациенту перенести ноги через край ванны, одновременно поворачивая подъемник в сторону от ванны.

9



Риск опрокидывания



Убедитесь, что подъемнику Alenti не мешают другие устройства. Опустите подъемник.