


Alenti


Förflyttning från en stående position

1




Aktivera bromsarna på Alenti-lyften.

2

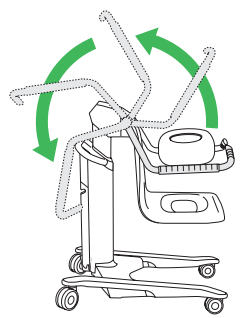


Vik bort armstödet.


3

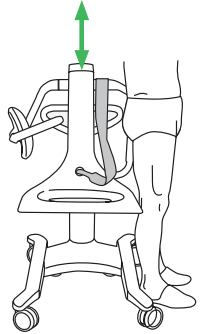

Justera höjden på Alenti-lyften. Kontrollera att sitsen är i samma höjd som baksidan av patientens knän. Hjälpt patienten att sätta sig ned.


4

 Fallrisk

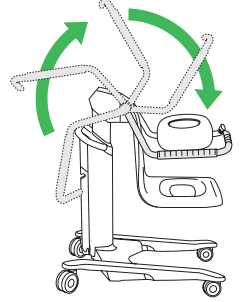


Vik fram armstödet.

5



Kontrollera att patienten sitter upprätt mitt på sitsen.


6



Kontrollera att patienten sitter med:


- stjärten mot sitsens rygg,
- ryggen mot ryggstödet och
- händerna på armstödet.


7



Använd säkerhetsbältet.


8

 Fallrisk




Justera Alenti-lyften till en säker och ergonomisk höjd.

9



Lossa bromsarna.

10

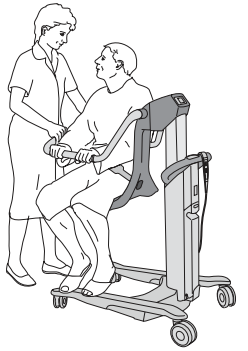

Använd transporthandtagen för att förflytta patienten.

Förflyttning till en stående position

1



Sänk Alenti-lyften tills patientens fötter är i kontakt med golvet.

2




Aktivera bromsarna på lyften.

3



Vik bort armstödet från patienten.

4

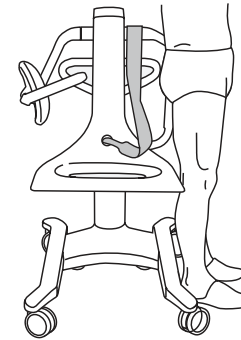

Lossa säkerhetsbältet, placera det runt övre delen av armstödet och hjälp patienten att ställa sig upp.

Förflyttning från ett stå- och lyfthjälpmiddel

1



Vik bort armstödet.

2




Placera stå- och lyfthjälpmidlet så nära Alenti-lyften som möjligt, och se till att patienten har ryggen mot Alenti-lyftens sits.

3




Aktivera bromsarna på lyften.

4

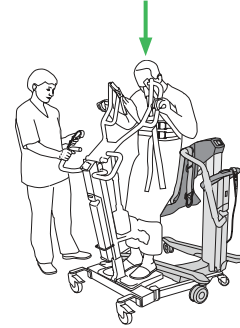


Sänk ned patienten på Alenti-lyftens sits. Haka av selen.

5

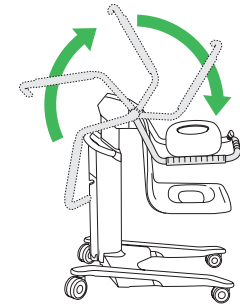

Vik fram armstödet så att patienten kan hålla i det.

6

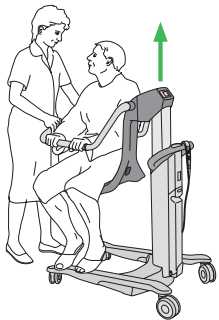

Höj Alenti-lyften tills patientens fötter inte längre är i kontakt med stå- och lyfthjälpmidlet. Ta av selen från patienten.

7



Fallrisk




Kontrollera att patienten sitter med:

- stjärten mot sitsens rygg,
- ryggen mot ryggstödet och
- händerna på armstödet.

8



Fallrisk

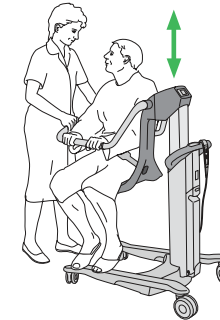




Använd säkerhetsbältet. Ta bort stå- och lyfthjälpmidlet. Justera Alenti-lyften till en ergonomisk höjd.

9



Lossa bromsarna.

Förflyttning till ett stå- och lyfthjälpmiddel

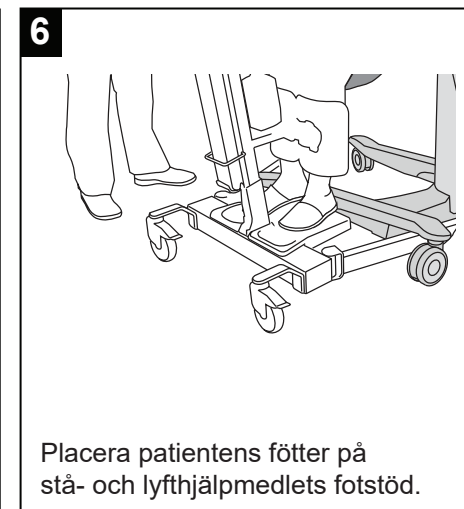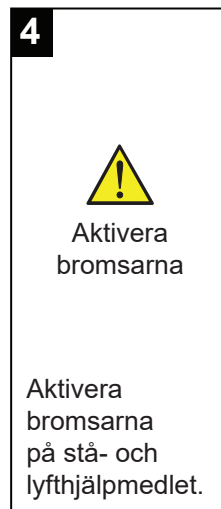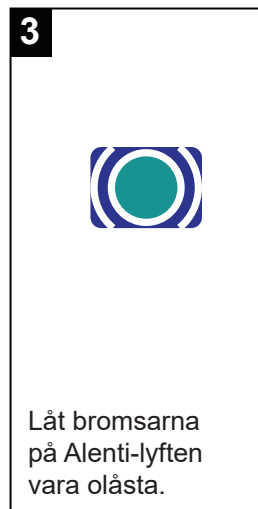


Förflyttning från säng – sittande

1




Aktivera
bromsarna

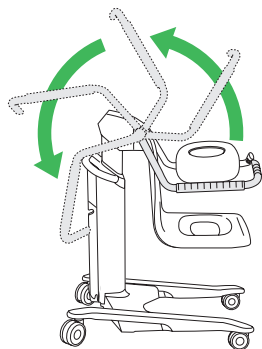

Lås bromsarna på sängen.
Vik bort armstödet.

2

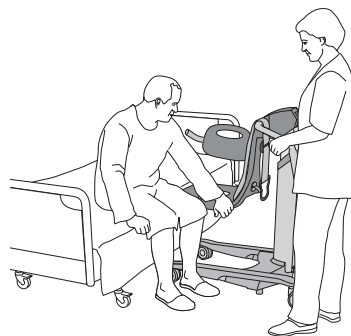


Placera Alenti-lyften med framsidan vänd mot sidan av sängen och med Alenti-lyftens sits i lägre nivå än sängen.

3



Aktivera bromsarna på Alenti-lyften.

4

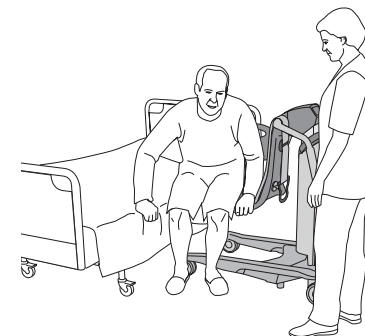

Låt patienten flytta sig från sängen till Alenti-lyften.

5



Vik fram armstödet så att patienten kan hålla i det.

6



Fallrisk




Kontrollera att patienten sitter med:

- stjärten mot sitsens rygg,
- ryggen mot ryggstödet och
- händerna på armstödet.

7



Fallrisk

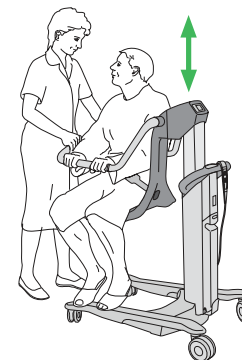

Använd säkerhetsbältet.
Justera Alenti-lyften till en ergonomisk höjd.


8



Lossa bromsarna.

Förflyttning till säng – sittande

1

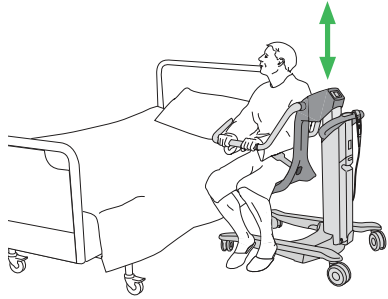

Justera Alenti-lyften till en lämplig höjd.
Placera Alenti-lyften med framsidan vänd
mot sidan av sängen.


2



Aktivera
bromsarna


Aktivera bromsarna
på Alenti-lyften.
Lås bromsarna på sängen.

3

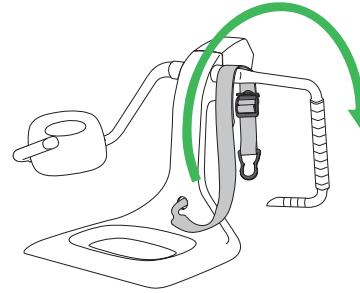


Lossa säkerhetsbältet och placera
det runt övre delen av armstödet.

4

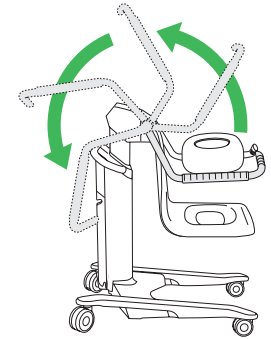


Vik bort armstödet från patienten.

5

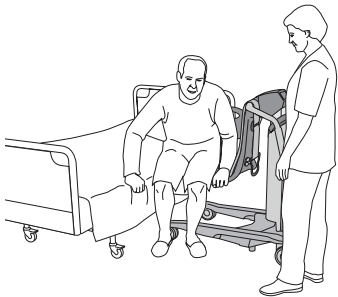

Låt patienten flytta sig till sängen från Alenti-lyften.


6

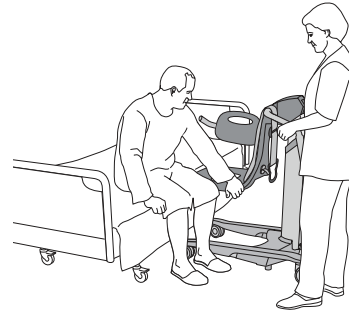

Se till att patienten sitter säkert i upprätt ställning
på sängkanten innan Alenti-lyften dras bort.


Bada patienten

1

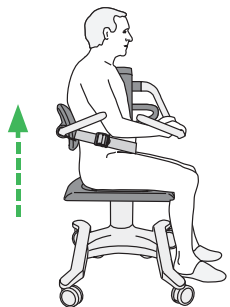

Sänk badkaret till dess lägsta nivå. Höj upp lyften så att patientens genitalier går fria från badkarets kant.

2

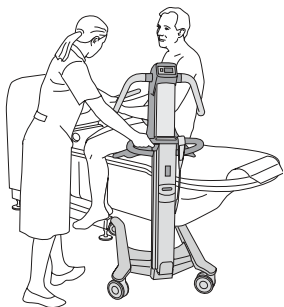


Placera lyften diagonalt i förhållande till badkarets huvudände.

3



Klämrisik

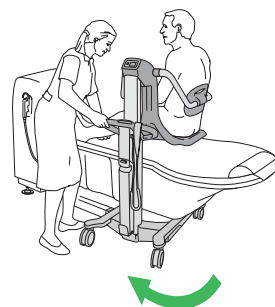


Hjälp patienten flytta benen över badkarskanten samtidigt som du vrider lyften till rätt position.

4



Låt patienten känna på vattnet. Justera vattentemperaturen vid behov.

5

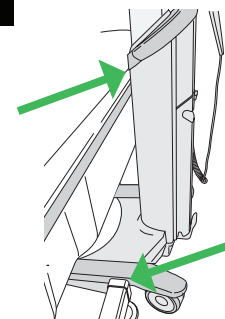


Placera lyften centralt över badkaret tills den tar stopp mot karet.

6





Klämrisik

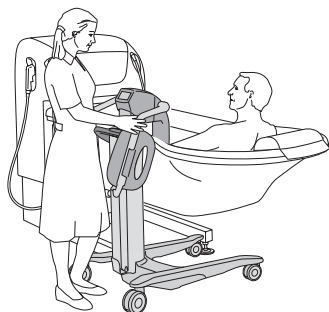

Sänk lyften till bekväm höjd för vårdpersonalen. Höj badkaret. Se till att inga kroppsdelar kommer i kläm.

7

Tillval

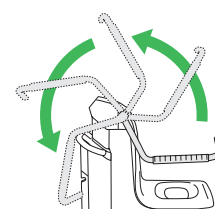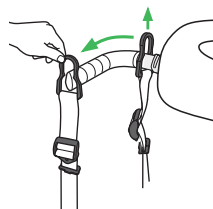

Om patienten önskar och klarar av det:

1. Ta bort säkerhetsbältet från ryggstödet.
2. Luta patienten framåt.
3. Vik undan ryggstödet.
4. Luta patienten bakåt mot badkaret.
5. Vik bort armstödet från patienten.


8



Bada patienten.

Efter badet

1

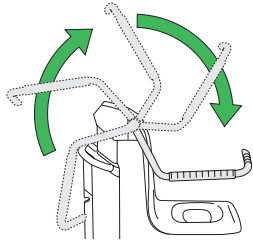


Öppna avtappningen.
Om armstödet vikts undan,
vik fram det igen framför patienten.

2



Fallrisk

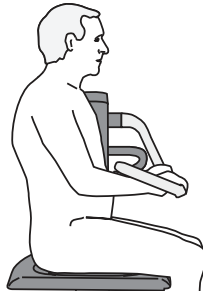

Kontrollera att patienten sitter med:


- stjärten mot sitsens rygg,
- ryggen mot ryggstödet och
- händerna på armstödet.

3



Luta patienten framåt
och vrid fram ryggstödet.
Fäst säkerhetsbältet.

4

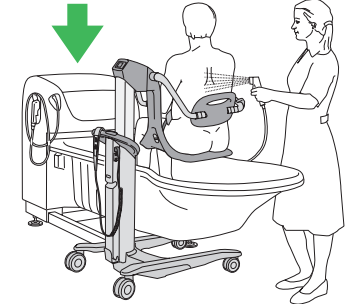


Sänk badkaret maximalt. Sätt på duschen
och låt patienten känna på vattnet med
handen. Justera vattentemperaturen
vid behov. Vid dusch av patient.

5




Torka patienten och lägg
handdukar över honom/
henne så att det känns
varmt och behagligt.

6

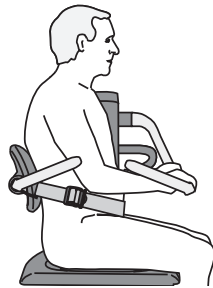

Kontrollera att
patienten sitter
upprätt mitt på sitsen.

7

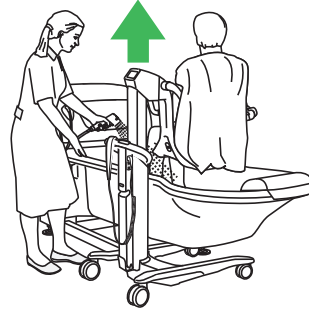

Höj upp lyften så att patientens
genitalier går fria från badkarets
kant. Dusch och torka
patientens fötter.

8



Klämrisk



Hjälp patienten att flytta
benen över badkarskanten
och vrid samtidigt undan
lyften från badkaret.

9



Vältrisk



Kontrollera att Alenti-lyften
går helt fritt med avseende
på omgivande hinder.
Sänk ned lyften.