


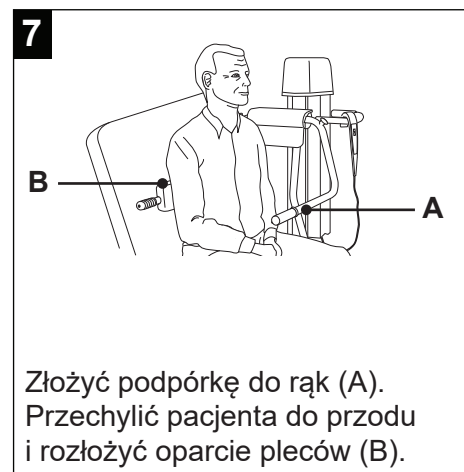
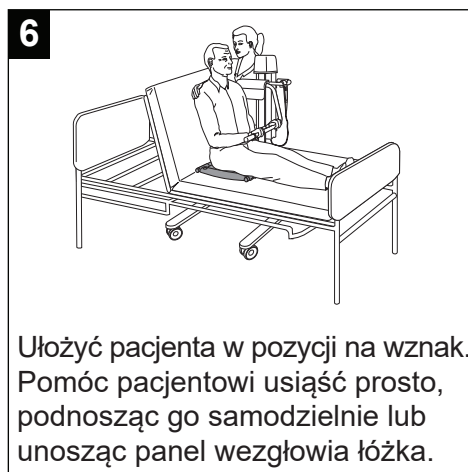
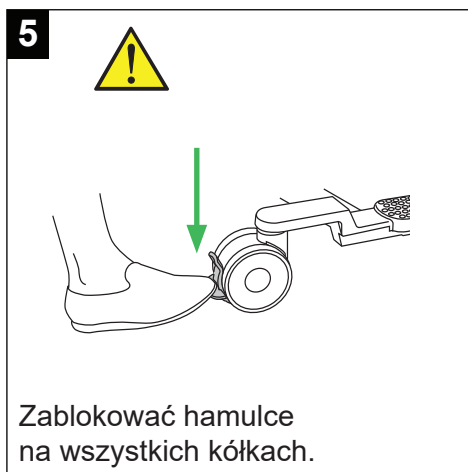
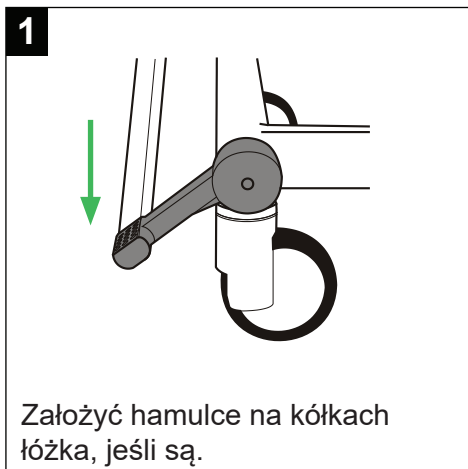
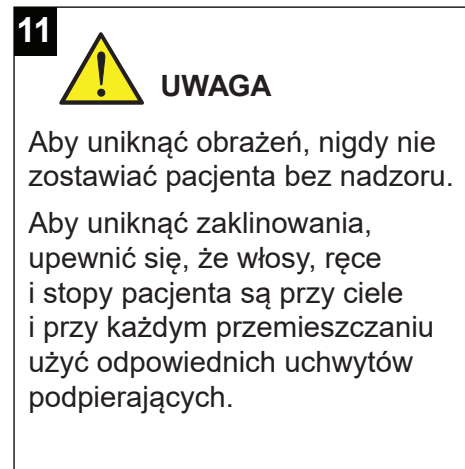
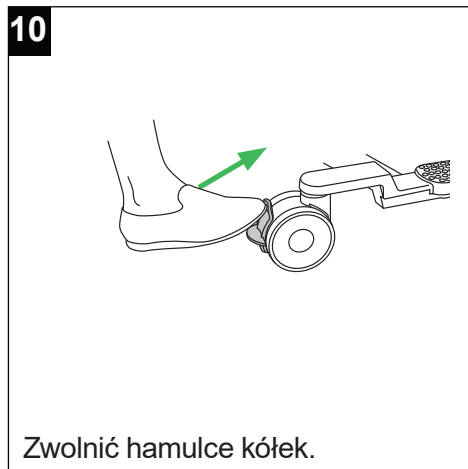








## Przenoszenie z łóżka

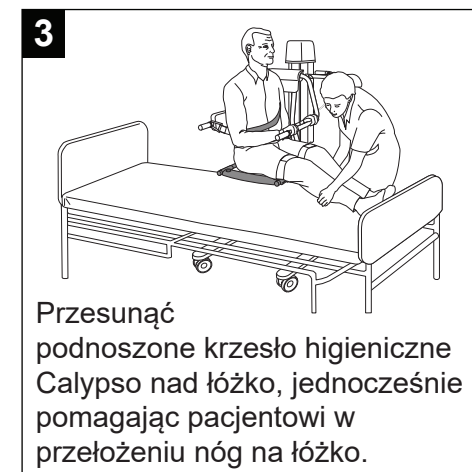

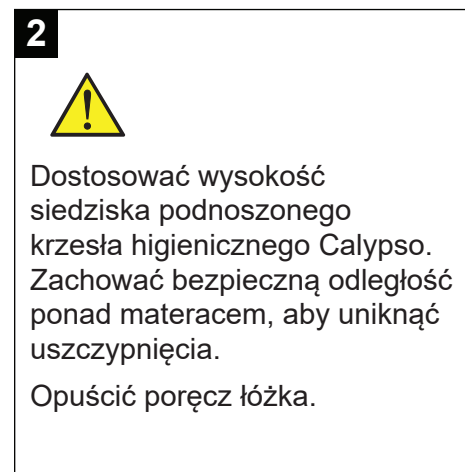

## Przenoszenie na łóżko

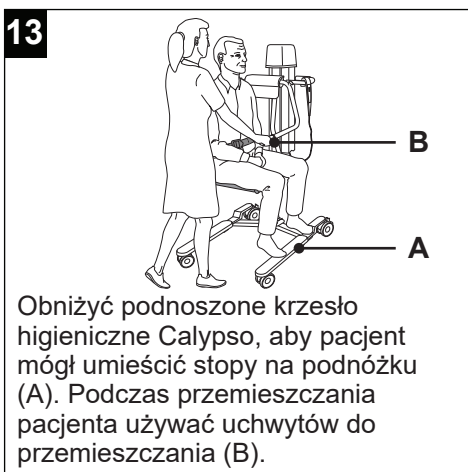

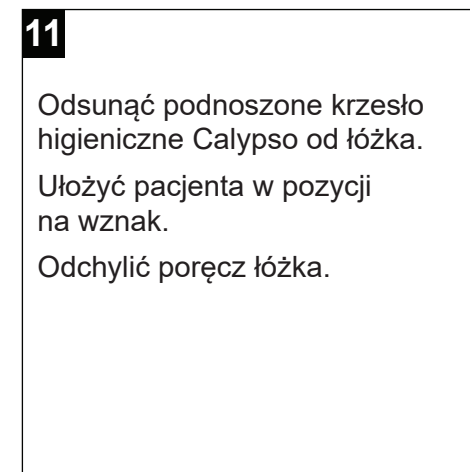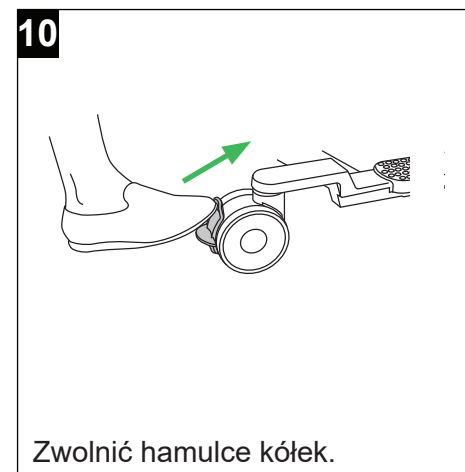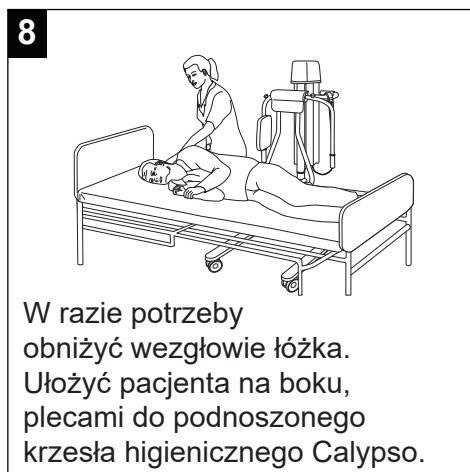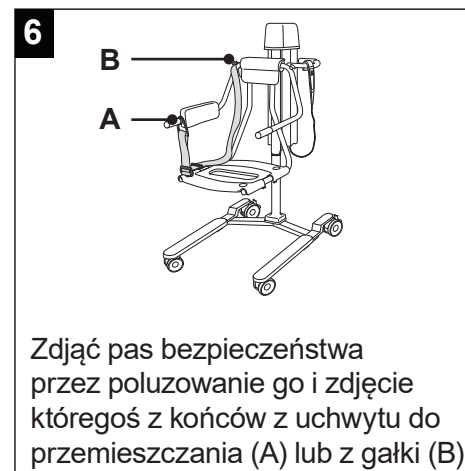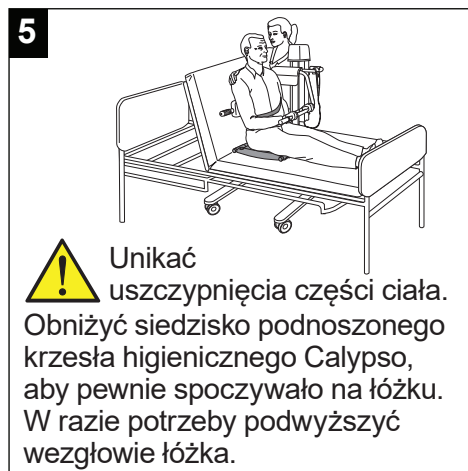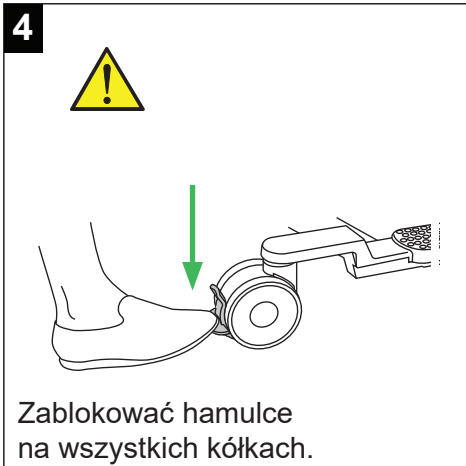

## Przenoszenie z wózka

1

### WSKAZÓWKA

Aby pacjent mógł podnieść się z wózka inwalidzkiego na podnoszone krzesło higieniczne Calypso, powinien być na tyle silny, aby przesunąć się w bok z jednego siedziska na drugie i/lub wstać.

2




Zablokować hamulce wózka inwalidzkiego.

Ustawić podnoszone krzesło higieniczne Calypso przy wózku inwalidzkim.

3


Ustawić podnoszone krzesło higieniczne Calypso w taki sposób, aby jego siedzisko znajdowało się nieco wyżej niż siedzisko wózka inwalidzkiego. Jeśli to możliwe, przesunąć siedzisko wózka inwalidzkiego nad siedzisko krzesła.

4

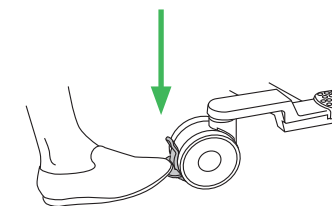


Zablokować hamulce na podnoszonym krześle higienicznym Calypso.

5

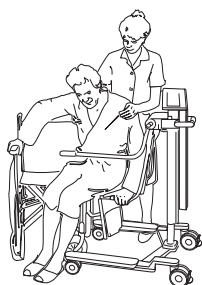


Pomóc pacjentowi przenieść się na podnoszone krzesło higieniczne Calypso.

6

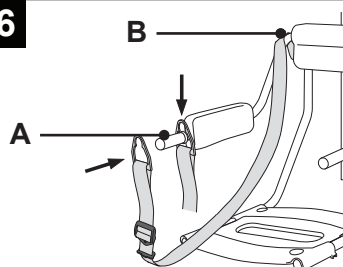

Przymocować pas bezpieczeństwa do uchwyty do przemieszczania (A). Drugi koniec pasa bezpieczeństwa przypiąć do gałki (B).

7

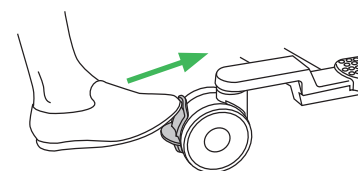

Zwolnić hamulce na podnoszonym krześle higienicznym Calypso.

8



Podczas przemieszczania pacjenta trzymać za uchwyty do przemieszczania (B).


## Przenoszenie na wózek

1

### WSKAZÓWKA

Aby pacjent mógł przenieść się z podnoszonego krzesła higienicznego Calypso na wózek inwalidzki, powinien być na tyle silny, aby przesunąć się w bok z jednego siedziska na drugie i/lub wstać.

2

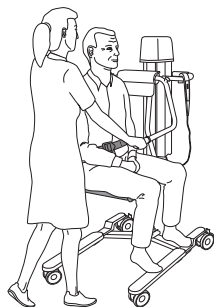

Pacjent powinien mieć stopy umieszczone na podnóżkach, a ręce na podpórcę.

3



Zablokować hamulce wózka inwalidzkiego.


Usunąć podłokietniki wózka inwalidzkiego i odchylić podnóżki.

Ustawić podnoszone krzesło higieniczne Calypso przy wózku inwalidzkim.

4


Ustawić podnoszone krzesło higieniczne Calypso w taki sposób, aby jego siedzisko znajdowało się nieco wyżej niż siedzisko wózka inwalidzkiego. Jeśli to możliwe, przesunąć siedzisko wózka inwalidzkiego nad siedzisko krzesła.

5

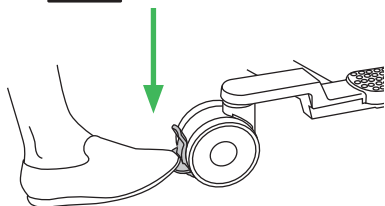


Zablokować hamulce na podnoszonym krześle higienicznym Calypso.

6

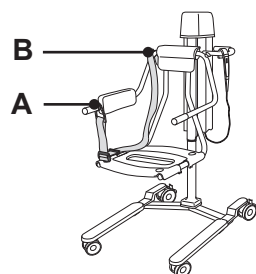

Zdjąć pas bezpieczeństwa przez poluzowanie go i zdjęcie któregoś z końców z uchwytu do przemieszczania (A) lub z gałki (B).

7

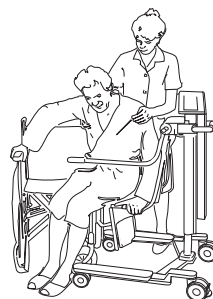

Pomóc pacjentowi przenieść się na wózek inwalidzki.

8

Pacjent powinien siedzieć w wózku inwalidzkim wygodnie i bezpiecznie.

## Kąpiel pacjenta

1



### UWAGA

Zwracać uwagę na nieruchome obiekty podczas obniżania.

Trzymać ręce i stopy pacjenta blisko ciała.

Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.


Nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru.

2




Unikać zakleszczenia części ciała.

Unieść podnoszone krzesło higieniczne Calypso, aby udostępnić krawędź wanny. Przenieść pacjenta nad wannę.

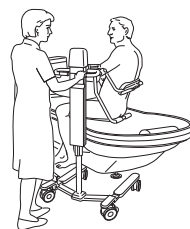


3

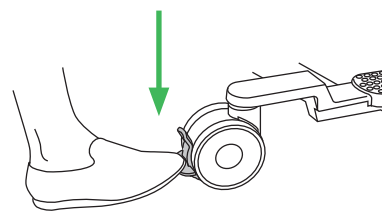


Zablokować hamulce na podnoszonym krześle higienicznym Calypso.

4

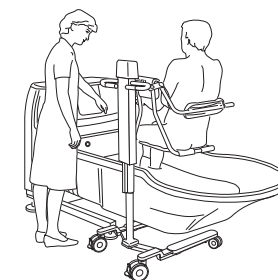

Podnieść wannę na wygodną wysokość.

5

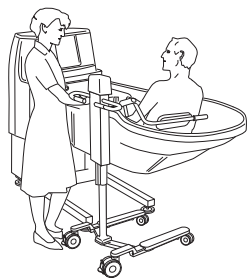


Obniżyć siedzisko podnoszonego krzesła higienicznego Calypso, aby oparło się o dno wanny. Zdjąć pas bezpieczeństwa.

6




Podciągnąć do przodu podpórkę do rąk. Lekko odchylić oparcie pleców. Wykąpać pacjenta.

7

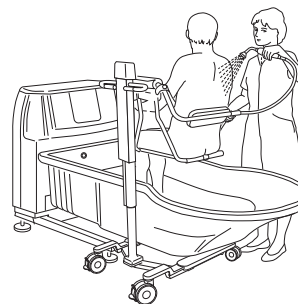

Opuścić podpórkę do rąk. Podnieść oparcie pleców. Zapiąć pas bezpieczeństwa. Umyć pacjenta pod prysznicem

8

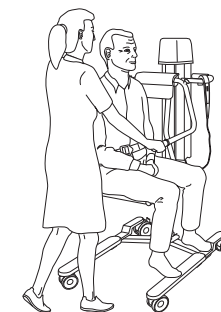

Osuszyć pacjenta. Okryć lub ubrać pacjenta. Przewieźć pacjenta z powrotem do pokoju.

