


Перемещение пациента с кровати

1

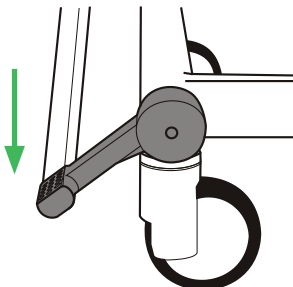

Зафиксируйте тормоза на кровати, если это применимо.

2



Опустите ограждение кровати. Поверните пациента на бок лицом в противоположную сторону от гигиенического кресла-подъемника Calypso.

3



Расположите сиденье над кроватью как можно ближе к пациенту.

4



Опустите сиденье так, чтобы оно прижалось к кровати

5



Приведите в действие тормоза на всех колесах.

6



Переверните пациента на спину. Посадите пациента вертикально, поддерживая его руками или подняв головную секцию кровати.

7




Опустите опору для рук (A). Наклоните пациента вперед и опустите спинку (B).

8




 Застегните ремень безопасности.

Разместите пациента в центре сиденья, спиной к спинке (B) и руками на опоре для рук (A).

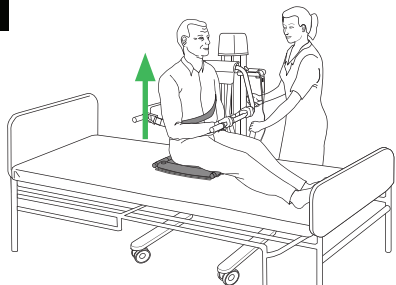9

Поднимите сиденье на достаточную высоту, чтобы отвести его от кровати.

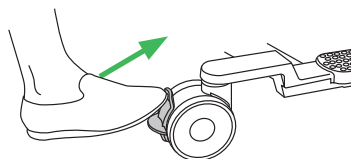10


Отпустите тормозные рычаги колес.

11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Во избежание травм никогда не оставляйте пациента без присмотра.

Во избежание защемления следите за тем, чтобы волосы, руки и ноги пациента располагались вблизи туловища, а во время движения пользуйтесь соответствующими опорами.

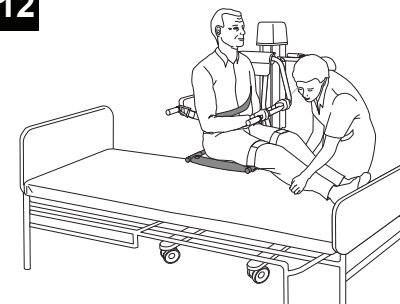
12

Отодвиньте гигиеническое кресло-подъемник Calypso от кровати, придерживая и опуская в это время ноги пациента.

Перемещение пациента на кровать

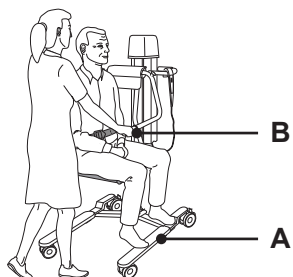13

Опустите гигиеническое кресло-подъемник Calypso на такую высоту, при которой пациент сможет поставить ноги на площадку для стоп (А). При транспортировке используйте рукоятки для транспортировки (В).

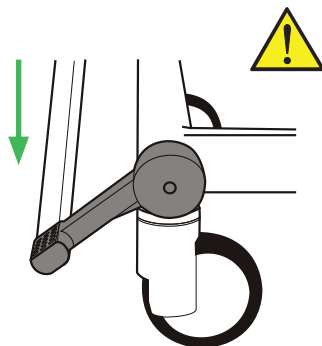
1

Зафиксируйте тормоза на кровати, если это применимо.


2

Отрегулируйте высоту сиденья гигиенического кресла-подъемника Calypso, чтобы обеспечить безопасное расстояние над матрасом для предотвращения защемлений.

Опустите ограждение кровати.

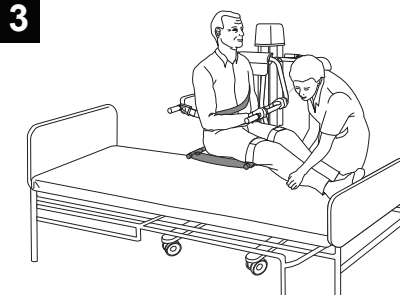3



Расположите гигиеническое кресло-подъемник Calypso над кроватью, помогая пациенту поднять ноги на кровать

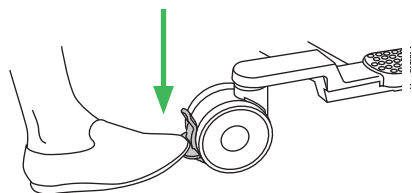4


Приведите в действие тормоза на всех колесах.

5

Избегайте защемления частей тела. Опустите гигиеническое кресло-подъемник Calypso так, чтобы его сиденье плотно легло на кровать. При необходимости поднимите головной конец.

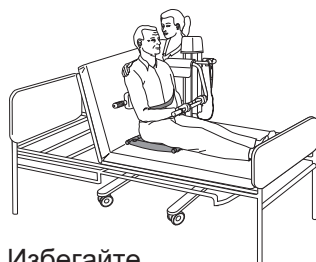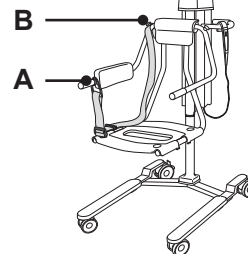
**6**

Снимите ремень безопасности, ослабив его и сняв один из концов либо с рукоятки для транспортировки (А), либо с ручки крепления ремня (В)

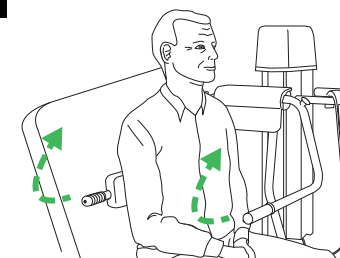
7

Откиньте вверх спинку и опору для рук.


Помогите пациенту отклониться назад на кровать.

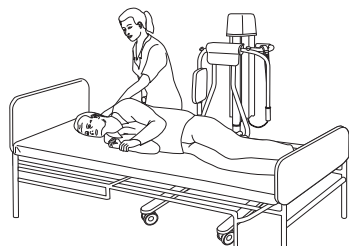8

При необходимости опустите головной конец. Положите пациента на бок лицом в противоположную сторону от гигиенического кресла-подъемника Calypso.

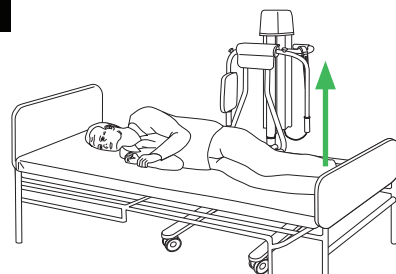9

Поднимите сиденье гигиенического кресла-подъемника Calypso, чтобы отделить его от кровати.

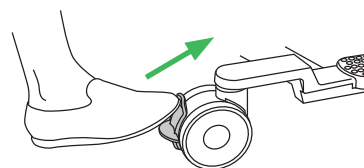10

Отпустите тормозные рычаги колес.

11

Отодвиньте гигиеническое кресло-подъемник Calypso от кровати.

Переверните пациента на спину.

Поднимите ограждение кровати.

Перемещение из кресла-коляски

1

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы пересадить пациента из кресла-коляски в гигиеническое кресло-подъемник Calypso, пациент должен быть достаточно сильным, чтобы перемещаться в стороны и (или) стоять.

2




Зафиксируйте тормоза на колесах кресла-коляски.

Расположите гигиеническое кресло-подъемник Calypso рядом к креслом-коляской.

3


Отрегулируйте гигиеническое кресло-подъемник Calypso так, чтобы высота его сиденья была чуть выше, чем сиденье кресла-коляски. По возможности обеспечьте перекрытие с сиденьем кресла-коляски.

4

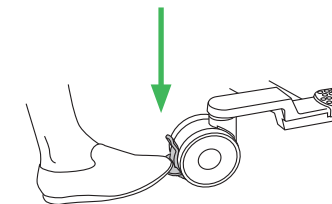


Включите тормоза на гигиеническом кресло-подъемнике Calypso.

5

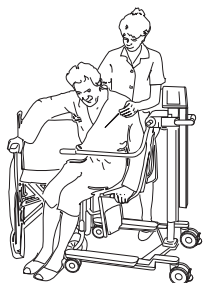


Помогите пациенту переместиться в гигиеническое кресло-подъемник Calypso.

6

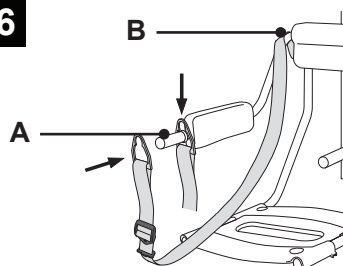

Прикрепите ремень безопасности к транспортировочной рукоятке (A). Другой конец ремня безопасности застегните на ручке крепления ремня (B).

7

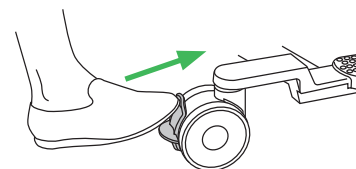

Отключите тормоза на гигиеническом кресло-подъемнике Calypso.

8



Во время движения удерживайте рукоятки для транспортировки.


Перемещение в кресло-коляску

1

ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы пересадить пациента из гигиенического кресла-подъемника Calypso в кресло-коляску пациент должен быть достаточно сильным, чтобы перемещаться в стороны и (или) стоять.

2

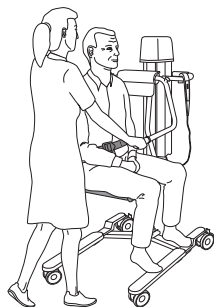

Убедитесь, что ноги пациента находятся на площадке для стоп, а руки лежат на опоре для рук.

3



Зафиксируйте тормоза на колесах кресла-коляски.


Снимите подлокотник кресла-коляски и поднимите площадки для ног.

Расположите гигиеническое кресло-подъемник Calypso рядом к креслом-коляской.

4


Отрегулируйте гигиеническое кресло-подъемник Calypso так, чтобы высота его сиденья была чуть выше, чем сиденье кресла-коляски. По возможности обеспечьте перекрытие с сиденьем кресла-коляски.

5

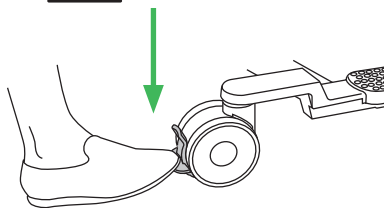


Включите тормоза на гигиеническом кресле-подъемнике Calypso.

6

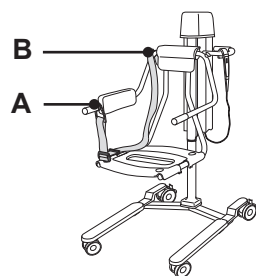

Снимите ремень безопасности, ослабив его и сняв один из концов либо с рукоятки для транспортировки (А), либо с ручки крепления ремня (В).

7

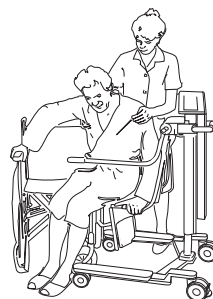

Помогите пациенту переместиться в кресло-коляску.

8

Убедитесь, что пациент сидит в кресле-коляске удобно и безопасно.

Купание пациента

1



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При опускании следите, чтобы не зацепить стационарные объекты.

Убедитесь, что руки и ноги пациента не расставлены.

Убедитесь, что ремень безопасности правильно застегнут.

Не оставляйте пациента без присмотра.


2

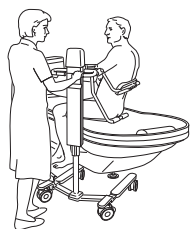

Избегайте защемления частей тела.


Поднимите гигиеническое кресло-подъемник Calypso на некоторое расстояние от края ванны. Переместите пациента над ванной.

3

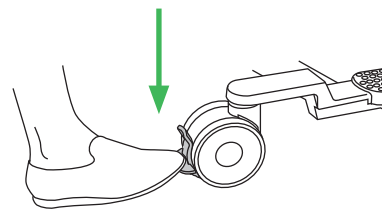


Включите тормоза на гигиеническом кресле-подъемнике Calypso.

4

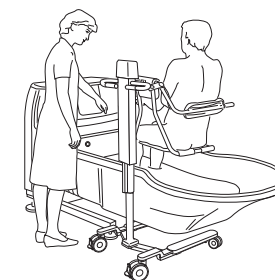

Поднимите ванну на удобную высоту.

5

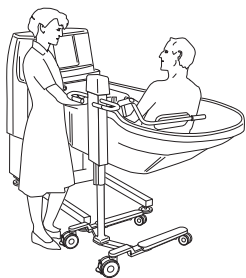


Опустите сиденье гигиенического кресла-подъемника Calypso на дно ванны.
Снимите ремень безопасности.

6




Выдвиньте опору для рук вперед.
Немного откиньте спинку назад.
Вымойте пациента.

7

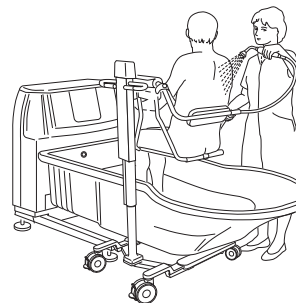

Опустите опору для рук.
Поднимите спинку.
Застегните ремень безопасности.
Ополосните пациента под душем.

8

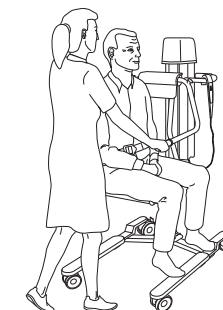

Оботрите пациента.
Укройте или оденьте пациента.
Верните пациента в палату.

