


Calypso

Överflyttning från säng

1

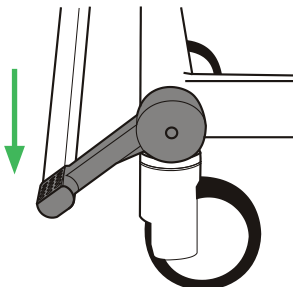

Aktivera sängens bromsar om tillämpligt.

2



Fäll ned sidogrinden. Vänd patienten till sidoläge, med ryggen mot lyftthygienstolen Calypso.

3




Skjut in sitsen över sängen, så nära patienten som möjligt.

4



Sänk sitsen så att den pressas ned mot sängen.

5

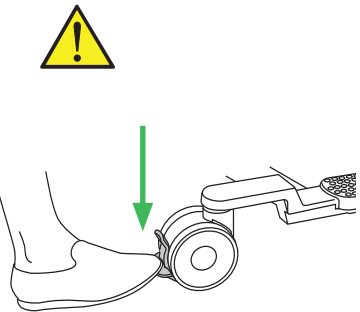

Bromsa alla fyra styrhjulen.

6



Vänd patienten till rygläge. Hjälp patienten till sittande ställning, antingen manuellt eller genom att höja sängens huvudände.

7




Fäll ned handstödet (A). Luta patienten framåt och fäll ned ryggstödet (B).

8




Fäst säkerhetsbältet. Placera patienten mitt på sitsen, med ryggen mot ryggstödet (B) och händerna på handstödet (A).

9

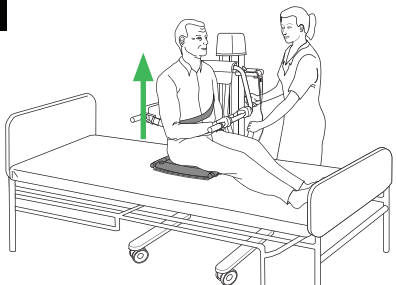

Höj sitsen tillräckligt för att kunna flytta den bort från sängen.

10

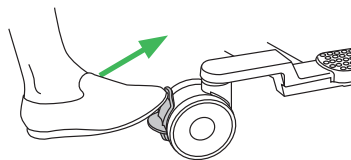

Lossa hjulbromsarna.

11




VARNING

Undvik skador genom att aldrig lämna vårdtagaren utan tillsyn.

Se till så att patientens hår, armar och fötter hålls nära kroppen och använd särskilt avsedda greppstöd vid alla slags rörelser och förflyttningar, för att förhindra att patienten fastnar i något.


12

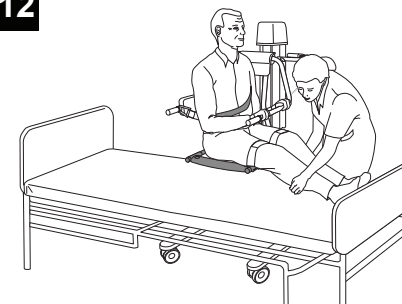

Rulla lyfthygienstolen Calypso bort från sängen samtidigt som du hjälper patienten att lyfta ned benen.


Förflyttning till säng

13

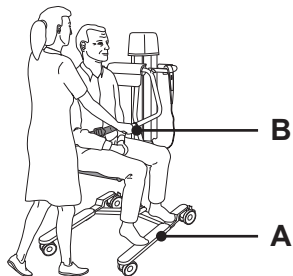

Sänk lyfthygienstolen Calypso så mycket att patienten kan placera sina fötter på fotstödet (A). Använd transporthandtagen (B) under förflyttningen.

1

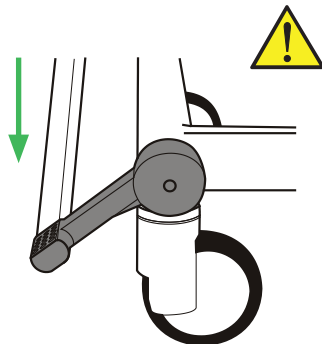

Aktivera sängens bromsar om tillämpligt.


2



Justera höjden på lyfthygienstolen Calypso till ett säkert avstånd där klämskador kan undvikas.


Fäll ned sänggrinden.

3

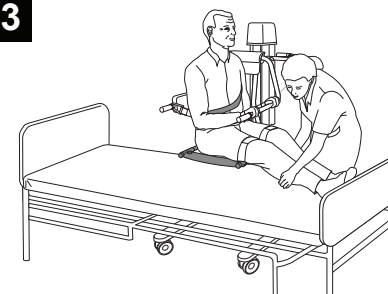


Skjut in lyfthygienstolen Calypso över sängen samtidigt som du hjälper patienten att lyfta upp benen på sängen.

4

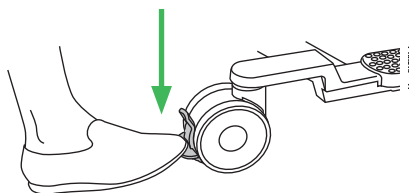


Bromsa alla fyra styrhjul.

5

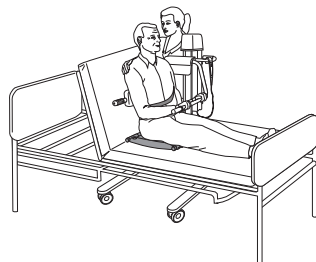


Undvik att klämma några kroppsdelar.
Sänk lyfthygienstolen Calypsos sits så att den vilar stadigt på sängen.
Höj vid behov sängens huvudända.

6

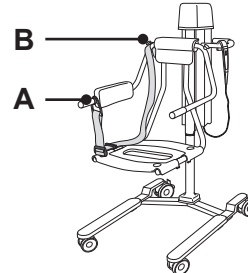


Ta av säkerhetsbältet genom att lossa det och lyfta en av ändarna från transporthandtaget (A) eller knoppen (B).

7

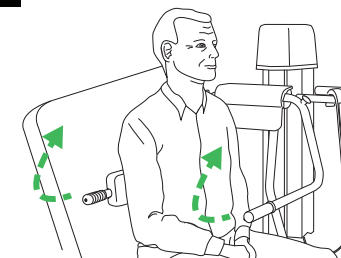


Fäll upp ryggstödet och handstödet.
Hjälپ patienten att luta sig tillbaka mot sängen.

8

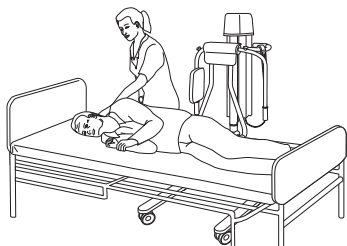


Sänk vid behov sängens huvudända.
Lägg patienten på sidan, med ryggen mot lyfthygienstolen Calypso.

9

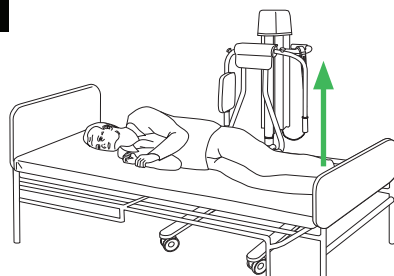

Höj sitsen på lyfthygienstolen Calypso för att separera den från sängen.

10

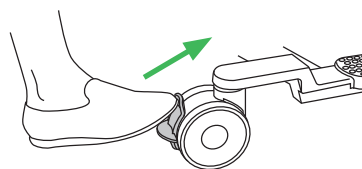

Lossa hjulbromsarna.

11

Rulla lyfthygienstolen Calypso bort från sängen.
Vänd patienten till ryggläge.
Fäll upp sänggrinden.

Förflyttning från rullstol

1

OBS!

För att patienten ska kunna flytta sig från en rullstol till lyfthygienstolen Calypso måste han/hon vara tillräckligt stark för att själv kunna röra sig i sidled och/eller ställa sig upp.

2




Aktivera rullstolens bromsar.

Placera lyfthygienstolen Calypso bredvid rullstolen.

3


Ställ in lyfthygienstolen Calypso så att sitsen är något högre än rullstolens sits. Överlappa rullstolens sits om det är möjligt.

4

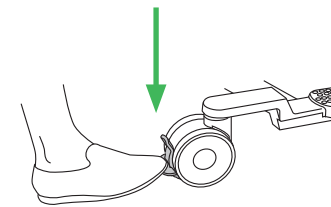


Lås bromsarna på lyfthygienstolen Calypso.

5

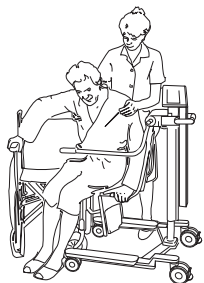


Hjälp patienten att förflytta sig till lyfthygienstolen Calypso.

6

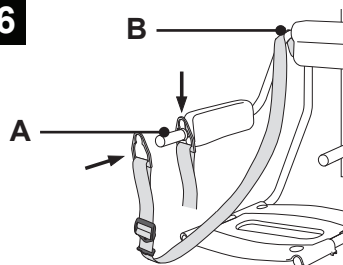

Fäst säkerhetsbältet i transporthandtaget (A). Fäst säkerhetsbältets andra ände på knoppen (B).

7

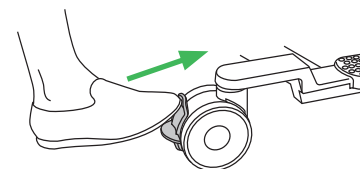

Lossa bromsarna på lyfthygienstolen Calypso.

8



Håll i transporthandtagen under förflyttningen.


Förflyttning till rullstol

1

OBS!

För att patienten ska kunna flytta sig från lyfthygienstolen Calypso till en rullstol måste han/hon vara tillräckligt stark för att själv kunna röra sig i sidled och/eller ställa sig upp.

2

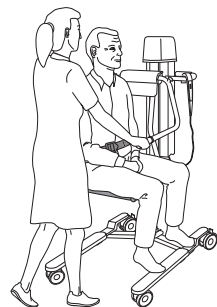

Se till så att patienten har fötterna på fotstödet och händerna på handstödet.

3



Aktivera rullstolens bromsar.


Avlägsna rullstolens armstöd och fäll upp dess fotstöd.

Placera lyfthygienstolen Calypso bredvid rullstolen.

4


Ställ in lyfthygienstolen Calypso så att sitsen är något högre än rullstolens sits. Överlappa rullstolens sits om det är möjligt.

5

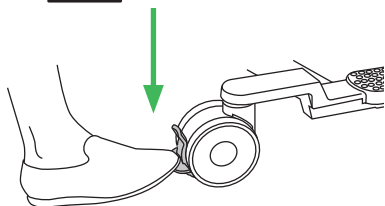


Lås bromsarna på lyfthygienstolen Calypso.

6

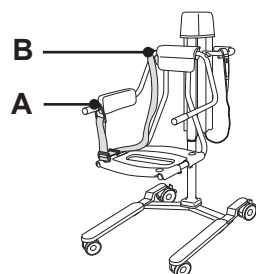

Ta av säkerhetsbältet genom att lossa det och lyfta en av ändarna från transporthandtaget (A) eller knoppen (B).

7

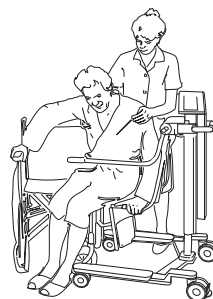

Hjälp patienten att förflytta sig till rullstolen.

8

Kontrollera att patienten sitter bekvämt och säkert i rullstolen.

Bada patienten

1



VARNING

Var uppmärksam på fasta föremål under sänkning.

Se till att patientens armar och fötter hålls nära kroppen.

Se till att säkerhetsbältet är fäst på rätt sätt.


Lämna aldrig vårdtagaren utan tillsyn.

2




Se till att ingen kroppsdel fastnar.

Höj upp lyfthygienstolen Calypso så att den går fri från badkarskanten. Placera patienten ovanför badkaret.

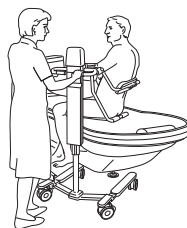


3

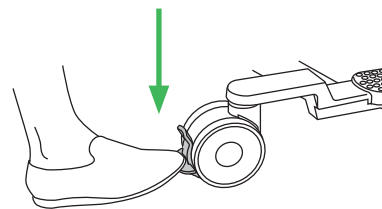


Lås bromsarna på lyfthygienstolen Calypso.

4

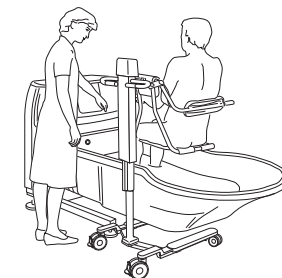

Höj badkaret till en bekväm höjd.

5

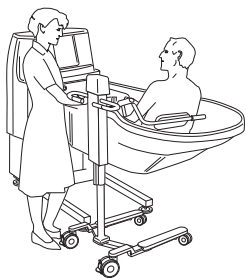


Sänk lyfthygienstolen Calypsos sits, så att den vilar mot badkarets botten. Ta bort säkerhetsbältet.

6




Skjut handstödet framåt. Luta ryggstödet något. Bada vårdtagaren.

7

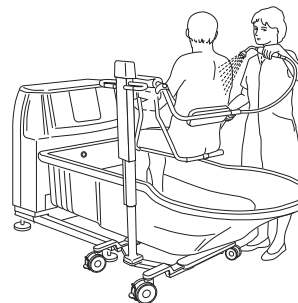

Fäll ned handstödet. Höj ryggstödet. Fäst säkerhetsbältet. Duscha patienten.

8

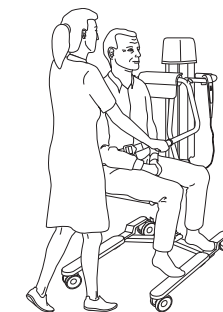

Torka patienten. Täck över eller klä på patienten. Hjälp patienten till sitt rum.

