

Miranti

ベッドからの患者の移乗

1




必要な場合、ベッドのブレーキをかけます。
介助者側のベッドレールを下に下げます。
患者の衣服を脱がせます。

2



背もたれとして機能する入浴用リフトローリーの側面にフックロープを固定します。

3

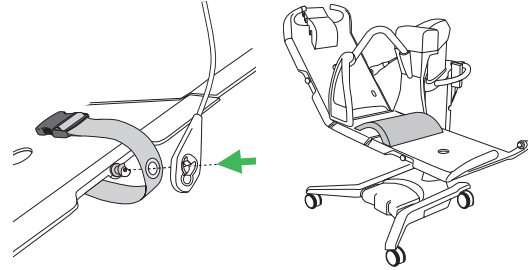


必要に応じて安全ベルトを取り付けます。
大腿部サポートクッションを所定の位置に配置します。

4




入浴用リフトローリーの反対側を向くよう、患者の体の向きを変えます。
入浴用リフトローリーをベッド上の患者にできるだけ近い場所に移動させます。
入浴用リフトローリーをベッド上に下降させます。

5



ブレーキをかけます。

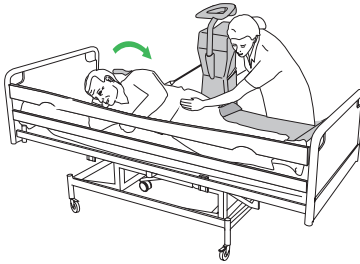

入浴用リフトローリーにセントラルブレーキをかけます。
ストレッチャー上で患者を横転させ、うつ伏せにします。

6




患者安全グリップとサイドガードを下げます。
ヘッドレストを所定の位置に置きます。
背もたれを患者にとって快適な位置に調整します。

7




ブレーキを解放します。

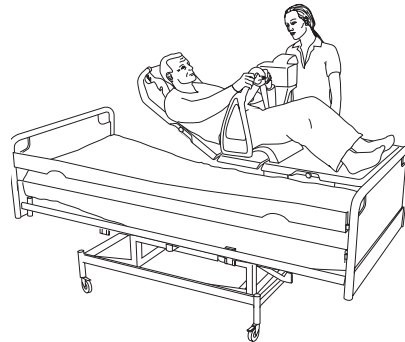

入浴用リフトローリーのセントラルブレーキを解除します。
入浴用リフトローリーを上昇させ、引いてベッドから離します。


ベッドへの患者の移乗

1

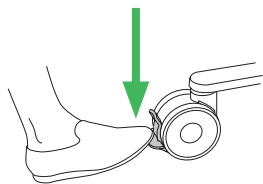

必要な場合、ベッドのブレーキをかけます。介助者側のベッドレールを下に下げます。

2

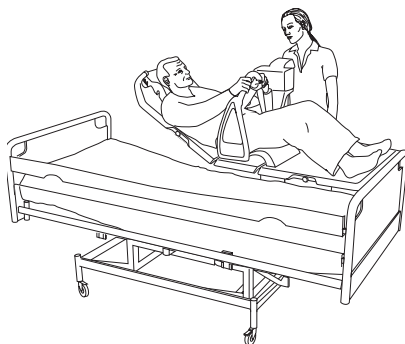


入浴用リフトトローリーの高さを調整し、ベッド上で可能な限り遠くに移動させます。

3




ブレーキをかけます。

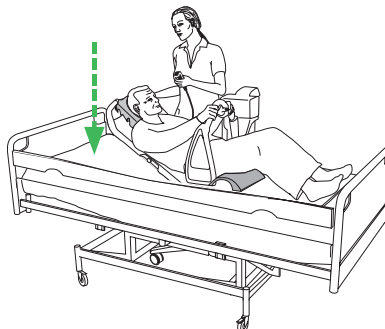

入浴用リフトトローリーにセントラルブレーキをかけます。
入浴用リフトトローリーをベッド上に下降させます。
ストレッチャーが平らになるまで背もたれを下げます。

4

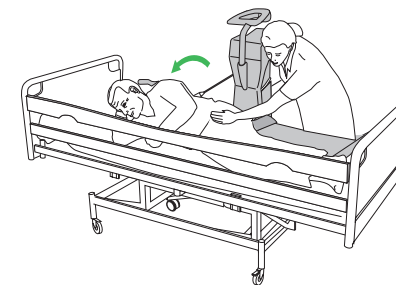


患者安全グリップとサイドガードを持ち上げます。
安全ベルトを取り外します。
入浴用リフトトローリーの反対側を向くよう、患者の体の向きを変えます。

5



ブレーキを解放します。

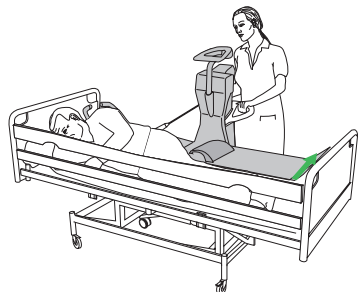

ストレッチャーをベッドから上昇させます。
入浴用リフトトローリーのセントラルブレーキを解除します。
入浴用リフトトローリーをベッドから引いて離します。


患者の入浴



入浴機器の取扱説明書(別冊)をお読みください。



浴槽の縁を超えるように、ストレッチャーを上昇させます。

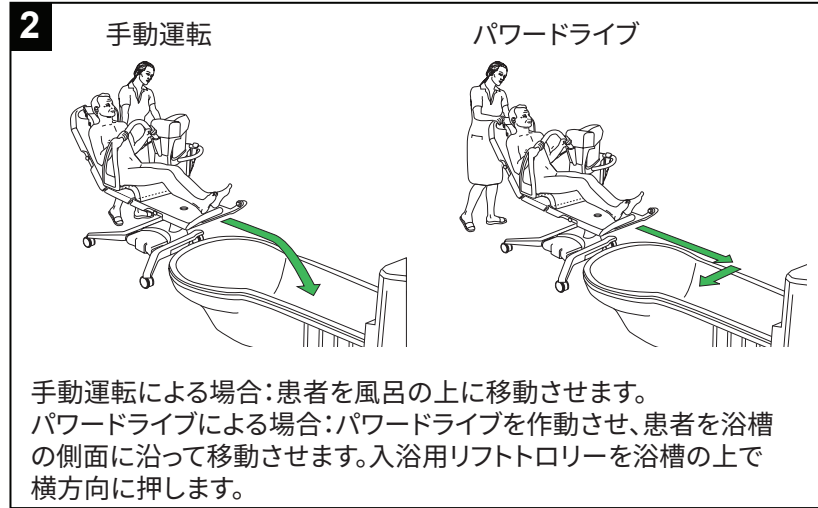

手動運転による場合: 患者を風呂の上に移動させます。
パワードライブによる場合: パワードライブを作用させ、患者を浴槽の側面に沿って移動させます。入浴用リフトロリーを浴槽の上で横方向に押しします。



可能であれば、人間工学に基づいた姿勢になるように浴槽の高さを調整します。ストレッチャーの高さと背もたれを調整します。ストレッチャーは浴槽の底で安定させる必要があります。



患者を入浴させます。



排水口を開きます。
背もたれを上昇させます。
浴槽を下降させます。
患者をシャワーで洗身します。



患者とストレッチャーの下側を乾燥させます。
浴槽の縁を超えるように、ストレッチャーを上昇させます。



入浴用リフトロリーを浴槽から引いて離します。