

Miranti

Przeniesienie pacjenta z łóżka

1




Założyć hamulce na kółkach łóżka, jeśli są.
Opuścić poręcz łóżka po stronie opiekuna.
Rozebrać pacjenta.

2




Linę z hakiem związać z boku wózka kąpielowego, który posłuży za oparcie pleców.

3

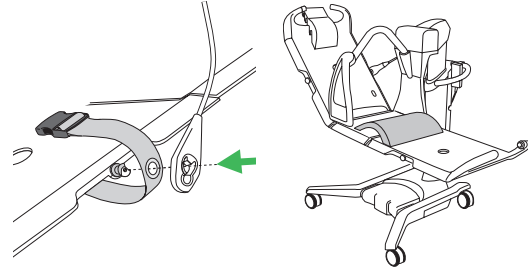


W razie potrzeby założyć pasy bezpieczeństwa. Umieścić na swoim miejscu poduszkę pod uda.

4

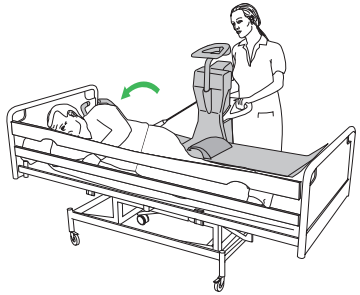


Obrócić pacjenta na bok, tak aby twarz miał skierowaną w kierunku przeciwnym do wózka kąpielowego.
Ustawić wózek kąpielowy przy łóżku, jak najbliżej pacjenta.
Obniżyć wózek kąpielowy na łóżko.

5



Założyć hamulce

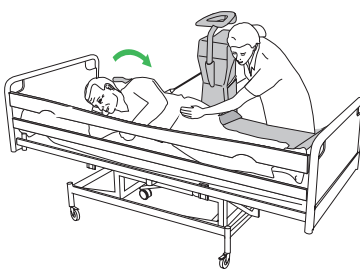


Założyć centralny hamulec na wózku prysznicowym. Ułożyć pacjenta na noszach w pozycji na wznak.

6




Obniżyć uchwyt bezpieczeństwa pacjenta oraz zabezpieczenie boczne.
Ustawić podparcie głowy.
Wyregulować oparcie pleców, tak aby zapewnić pacjentowi wygodną pozycję.

7




Zwolnić hamulce

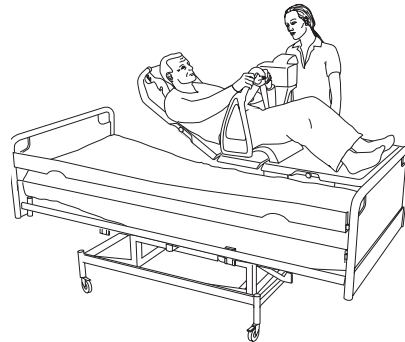

Zwolnić centralny hamulec na wózku prysznicowym. Unieść wózek prysznicowy i odsunąć od łóżka.


Przeniesienie pacjenta do łóżka

1

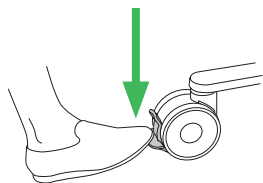

Założyć hamulce na kółkach łóżka, jeśli są. Opuścić poręcz łóżka po stronie opiekuna.

2

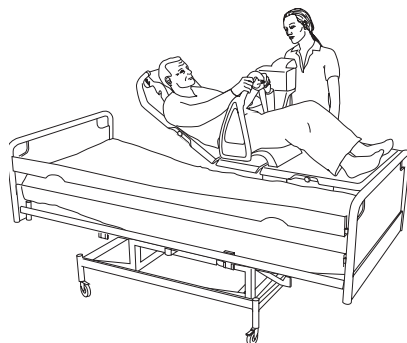


Wyregulować wysokość wózka prysznicowego i podsunąć go jak najbliżej łóżka.

3




Założyć hamulce

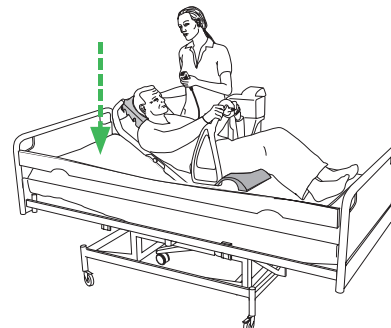

Założyć centralny hamulec na wózku prysznicowym. Obniżyć wózek kąpielowy na łóżko. Obniżyć oparcie pleców, aż nosze znajdą się w pozycji płaskiej.

4

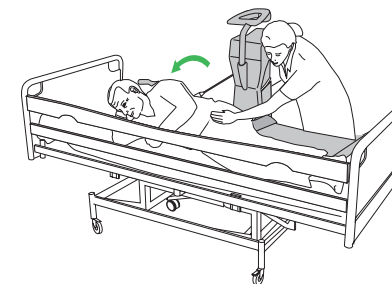


Unieść uchwyt bezpieczeństwa pacjenta oraz zabezpieczenie boczne. Zdjąć pasy bezpieczeństwa. Obrócić pacjenta na bok, tak aby twarz miała skierowaną w kierunku przeciwnym do wózka kąpielowego.

5



Zwolnić hamulce

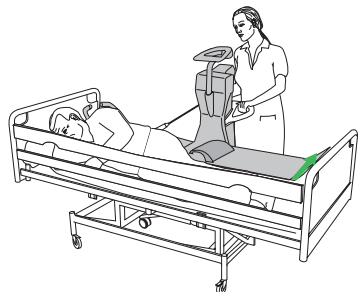

Zestawić nosze z łóżka. Zwolnić centralny hamulec na wózku prysznicowym. Odsunąć wózek kąpielowy od łóżka.

Kąpanie pacjenta



Należy przeczytać oddzielne wskazówki dotyczące używanego do kąpieli sprzętu.

