

Перемещение пациента с кровати

1



Зафиксируйте тормоза на кровати, если это применимо.
Опустите ограждение кровати со стороны лица, осуществляющего уход.
Разденьте пациента.

2



Закрепите трос с зацепом на той стороне каталки-подъемника для ванны, которая будет служить спинкой.

3



При необходимости пристегните ремни безопасности.
Установите подушку поддержки бедер.

4



Поверните пациента на бок, лицом в противоположную сторону от каталки-подъемника для ванны.
Поместите каталку-подъемник для ванны над кроватью, как можно ближе к пациенту.
Опустите каталку-подъемник для ванны на кровать.

5



Задействуйте тормоза



Зафиксируйте центральный тормоз каталки-подъемника для ванны.
Переверните пациента на спину на каталке.

6



Опустите поручень и боковое ограждение.
Установите подголовник на место.
Установите спинку в удобное для пациента положение.

7




Снимите каталку с тормоза



Снимите каталку-подъемник для ванны с центрального тормоза.
Поднимите каталку-подъемник для ванны и отодвиньте ее от кровати.


Перемещение пациента на кровать

1

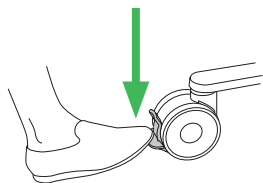

Зафиксируйте тормоза на кровати, если это применимо. Опустите ограждение кровати со стороны лица, осуществляющего уход.

2

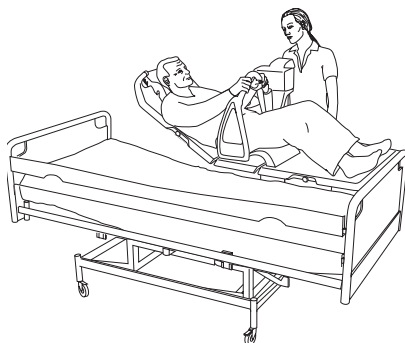


Отрегулируйте высоту каталки-подъемника для ванны и переместите ее как можно дальше над кроватью.

3




Задействуйте тормоза

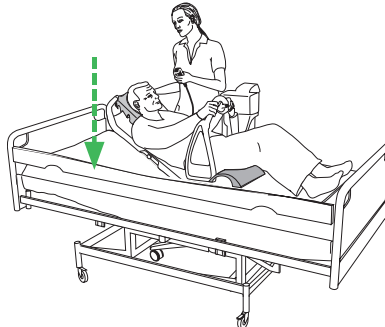

Зафиксируйте центральный тормоз каталки-подъемника для ванны. Опустите каталку-подъемник для ванны на кровать. Опускайте спинку до тех пор, пока каталка не окажется в горизонтальном положении.

4

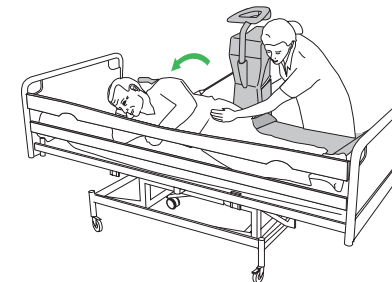


Поднимите поручень и боковое ограждение. Снимите ремни безопасности. Поверните пациента на бок, лицом в противоположную сторону от каталки-подъемника для ванны.

5



Снимите каталку с тормоза

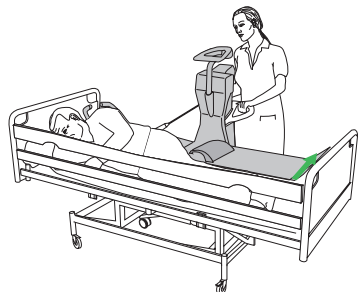

Поднимите каталку над кроватью. Снимите каталку-подъемник для ванны с центрального тормоза. Отодвиньте каталку-подъемник для ванны от кровати.

Мытье пациента



Ознакомьтесь с отдельными инструкциями по эксплуатации оборудования для ванны.

