

# Miranti

## Flytta över patienten från sängen

**1**



Aktivera sängens bromsar om tillämpligt.  
Fäll ned sänggrinden på vårdpersonalens sida.  
Klä av patienten.

**2**



Fäst upphängningsöglan på den sida av lyftbadvagnen som kommer att fungera som ryggstöd.

**3**




Sätt fast säkerhetsbälten om det behövs.  
Sätt lårstödet på plats.

**4**




Vänd patienten på sidan med ansiktet vänt bort från lyftbadvagnen.  
För lyftbadvagnen över sängen så att den hamnar så nära patienten som möjligt.  
Sänk ned lyftbadvagnen på sängen.

**5**



Aktivera bromsarna

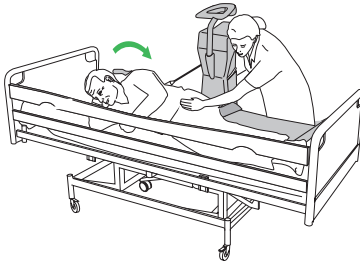


Aktivera centralbromsen på lyftbadvagnen.  
Vänd patienten på rygg på liggplattan.

**6**




Sänk säkerhetshandtaget och sidoskyddet.  
Sätt huvudstödet på plats.  
Justera ryggstödet så att det hamnar i en bekväm position för patienten.

**7**




Lossa bromsarna

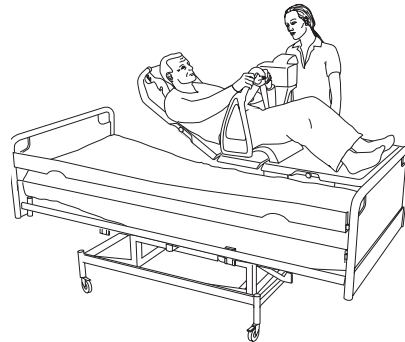

Lossa centralbromsen på lyftbadvagnen.  
Höj lyftbadvagnen och dra den bort från sängen.


## Flytta över patienten till sängen

1

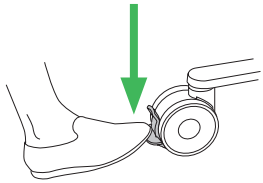

Aktivera sängens bromsar om tillämpligt. Fäll ned sänggrinden på vårdpersonalens sida.

2

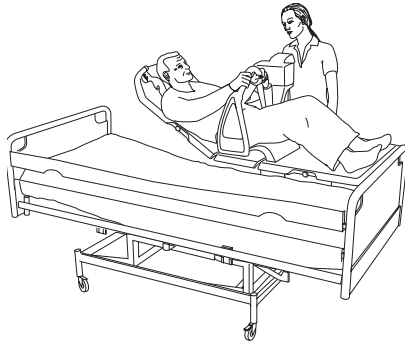


Justera lyftbadvagnens höjd och för den så långt som möjligt över sängen.

3




Aktivera bromsarna

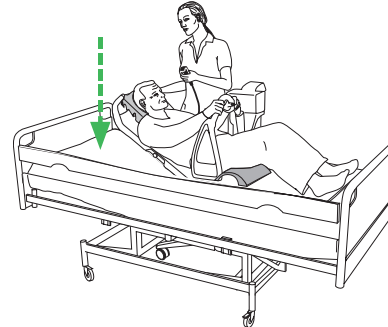

Aktivera centralbromsen på lyftbadvagnen. Sänk ned lyftbadvagnen på sängen. Sänk ryggstödet tills liggplattan är i plan position.

4

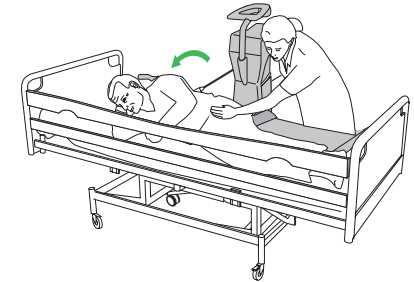


Höj säkerhetshandtaget och sidoskyddet. Ta bort säkerhetsbältena. Vänd patienten på sidan med ansiktet vänt bort från lyftbadvagnen.

5



Lossa bromsarna

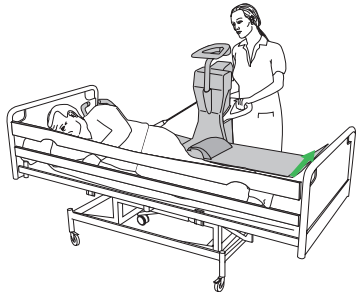

Höj upp liggplattan från sängen. Lossa centralbromsen på lyftbadvagnen. Dra lyftbadvagnen bort från sängen.

# Bada patienten



Läs först de separata anvisningarna för badutrustningen.

