

Mando de control



Panel de control



Eleva la camilla.



Baja la camilla.



Eleva el respaldo.



Baja el respaldo.



Activa el freno central.
Luz intermitente = frenos activados.




Desactiva el freno central.


Parada de emergencia



Elevación/descenso de emergencia

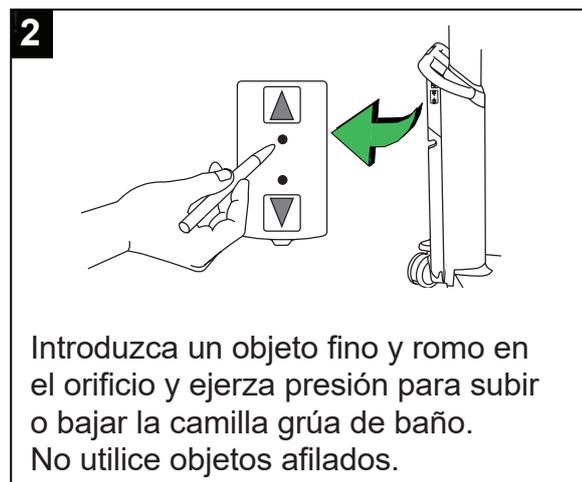


Respaldo y cuerda de sujeción

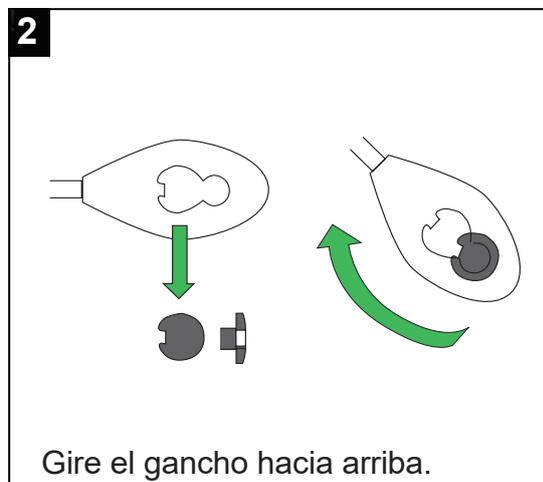


Protección lateral y asidero de seguridad del paciente

1

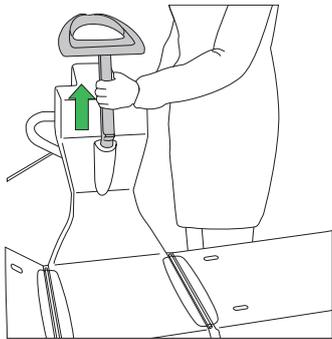


Tire del asa hacia arriba.

2

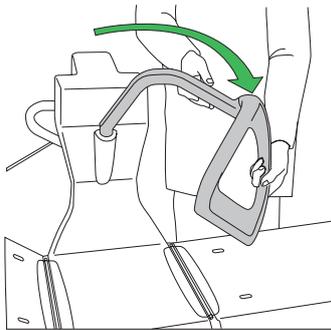


Aparte el asa de la cabeza del paciente.

3

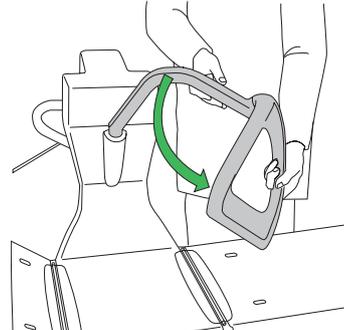

Coloque la protección lateral.


Accionamiento eléctrico

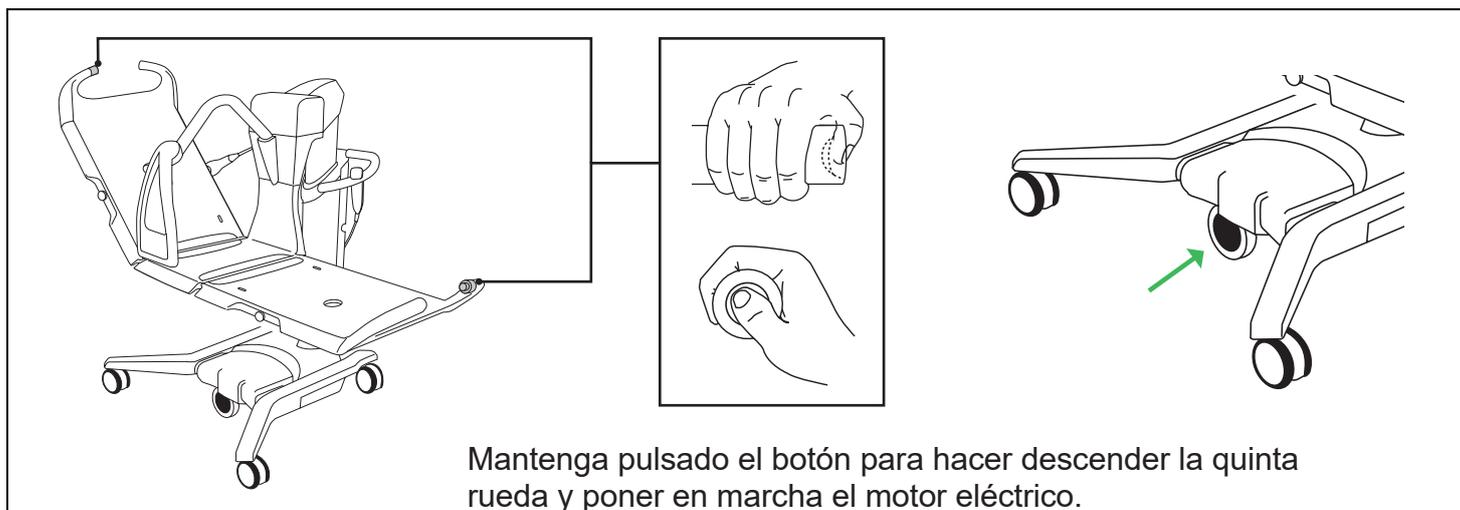

Mantenga pulsado el botón para hacer descender la quinta rueda y poner en marcha el motor eléctrico.

Cojín de apoyo para los muslos

Colocación

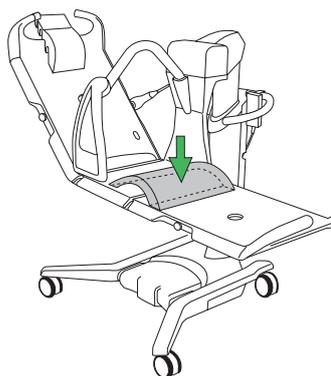

Extracción

