


Miranti

Afstandsbediening



Bedieningspaneel

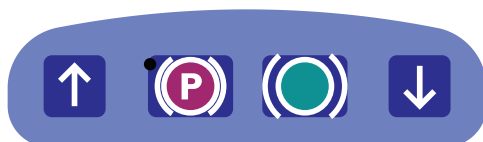

Breng de stretcher omhoog.



Laat de stretcher zakken.



Til de rugsteun op.



Breng de rugsteun omlaag.



Activeer het centrale remsysteem.
Knipperend lampje = remmen geactiveerd.




Ontgrendel het centrale remsysteem.


Noodstop




Omhoog/omlaag in noodsituaties

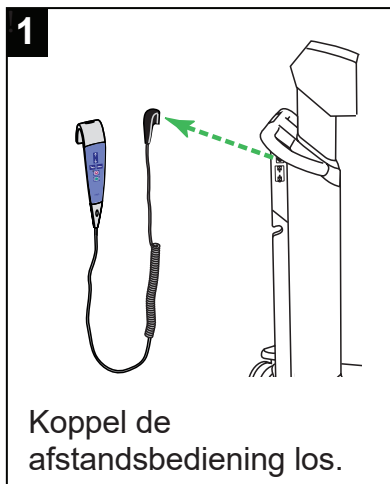


Rugsteun en kabelhaak

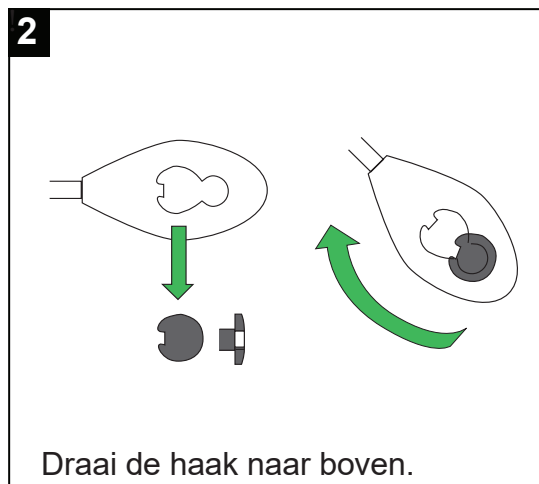

Zijsteun en veiligheidshandgreep voor zorgvrager

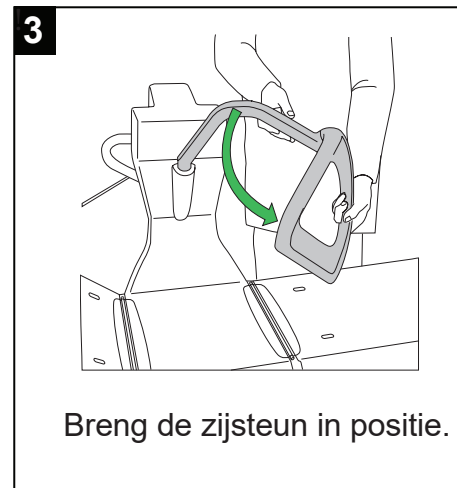

Elektrische aandrijving

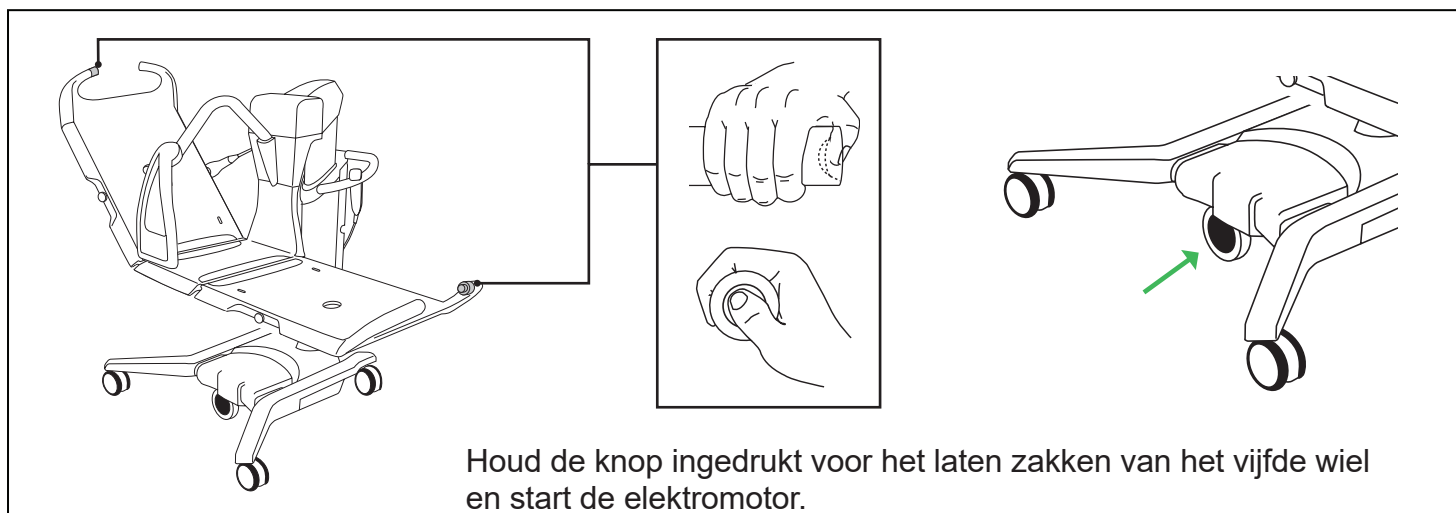

Heupkussen

