

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Pulire e disinfettare quotidianamente.
Pulire e disinfettare prima del nuovo paziente.

Accessori necessari:

- Guanti protettivi
- Occhiali protettivi
- Flacone spray con disinfettante (se non è disponibile un sistema di disinfezione integrato)
- Flacone spray (o doccetta) con acqua
- Panni umidi e asciutti
- Asciugamani monouso
- Spazzola a setole morbide
- Spazzola a setole morbide con manico lungo

NOTA

La procedura di pulizia e disinfezione è illustrata con Miranti e con l'esempio di un sistema di disinfezione integrata.



AVVERTENZA



Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti protettivi. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi o della pelle, rivolgersi a un medico. Consultare sempre le Istruzioni per l'uso e la scheda dati di sicurezza (SDS) del disinfettante.

Al fine di prevenire la contaminazione crociata, attenersi sempre alle istruzioni di disinfezione riportate nelle Istruzioni per l'uso.

Per evitare irritazioni agli occhi o alla pelle, non disinfettare in presenza di un paziente.

Rimozione di residui visibili


1



Miranti: Rimuovere il poggiatesta, il cuscino di supporto per le gambe, l'impugnatura di sicurezza per il paziente e le cinture di sicurezza.
Bolero: Rimuovere il materasso e le cinture di sicurezza.
Alenti: Rimuovere lo schienale e la cintura di sicurezza.
Calypso: Rimuovere i sedili, l'insero del sedile, lo schienale e la cintura di sicurezza.


Collocare gli accessori sul fondo della vasca da bagno.

2

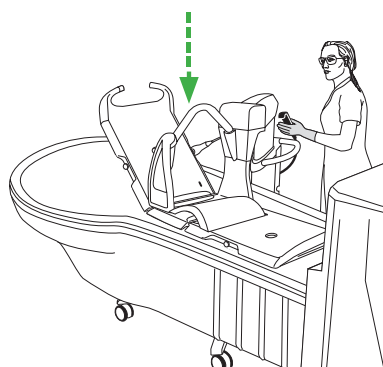

Posizionare il sollevatore igienico sopra la vasca e abbassarlo.

3

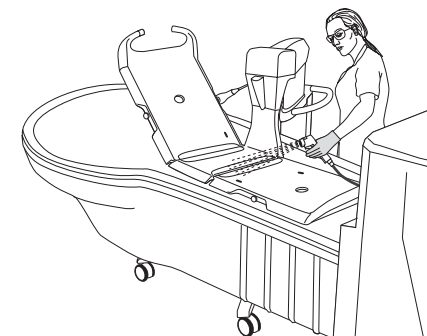

Pulire dai residui visibili con un panno intriso di acqua o usare la doccia strofinando con una spazzola. Pulire il sollevatore igienico iniziando dalla parte superiore e spostandosi poi verso il basso. Pulire tutti i componenti estratti.

continua alla pagina successiva

4




Indossare guanti e occhiali protettivi.

5




Consultare le istruzioni separate per il sistema di disinfezione e il disinfettante da utilizzare

Spruzzare il disinfettante sul sollevatore igienico e su tutti i componenti estratti. Utilizzare un flacone spray con disinfettante o utilizzare il sistema di disinfezione integrato del bagno.

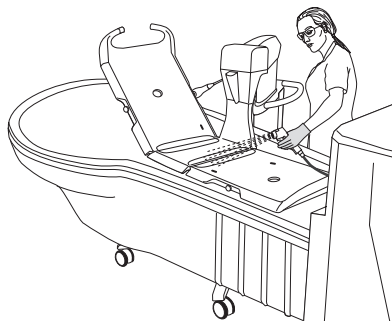


6

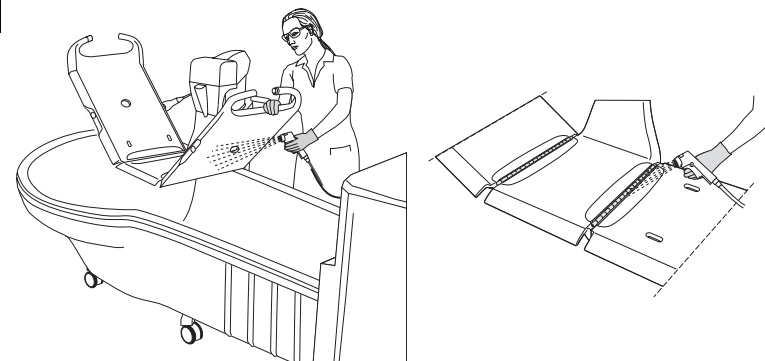


Strofinare a fondo con una spazzola intrisa di disinfettante, soprattutto sulle maniglie, sulla pulsantiera di controllo, sulle cerniere e sulla parte inferiore del sollevatore igienico.

7

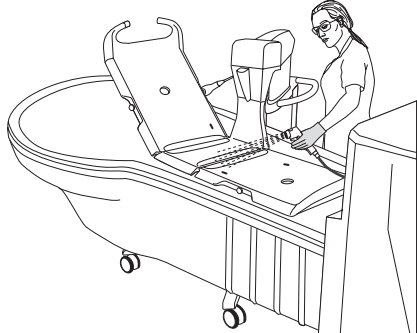

Risciacquare usando la doccia (circa 25 °C) o spruzzare con acqua e pulire con un panno pulito.

8

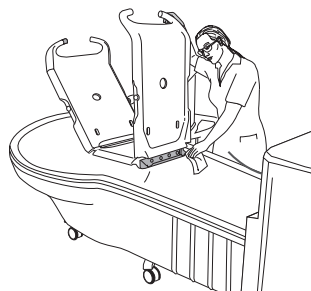


Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le altre parti.

9



Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere ogni traccia di disinfettante sulle altre parti. Il panno deve occasionalmente essere risciacquato in acqua corrente.

10

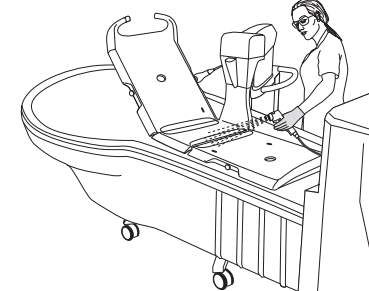


Se non si riesce a rimuovere il disinfettante, spruzzare con acqua le parti interessate e strofinare con un asciugamano monouso fino alla rimozione completa del disinfettante.

continua alla pagina successiva


Disinfezione

11

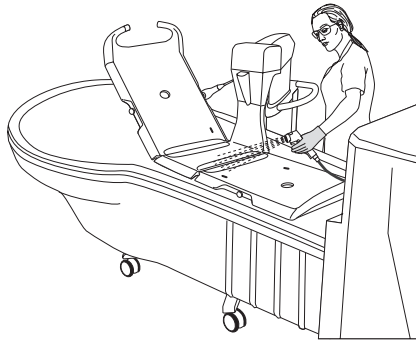


Spruzzare il disinfettante sul sollevatore igienico e su tutti i componenti estratti.

12

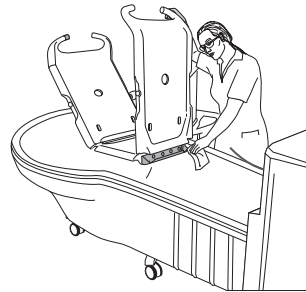


Bagnare un panno con il disinfettante e pulire tutte le altre parti.

13

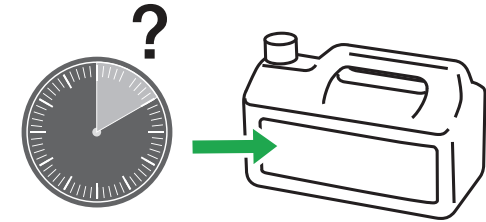


Lasciare agire il disinfettante per il tempo indicato sulle istruzioni del disinfettante.

14

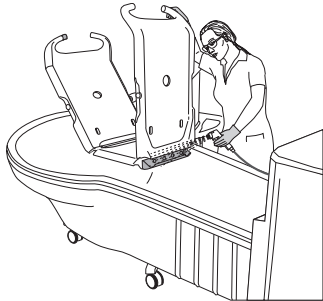


Spruzzare con acqua o usare la doccia e pulire con un panno pulito per rimuovere tutte le tracce di disinfettante sul sollevatore igienico, sullo chassis e su tutti i componenti estratti. Il panno deve occasionalmente essere risciacquato in acqua corrente.

15

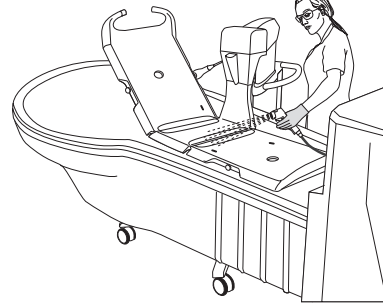

Se non si riesce a rimuovere tutto il disinfettante, spruzzare con acqua le parti interessate e strofinare con un asciugamano monouso fino alla rimozione completa del disinfettante.

16

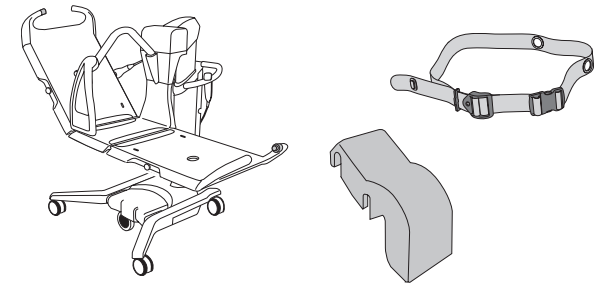

Asciugare tutte le parti.