

# Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Czyścić i dezynfekować raz dziennie.  
Czyścić i dezynfekować przed zmianą pacjenta.

Potrzebne akcesoria:

- Rękawice ochronne
- Okulary ochronne
- Butelka środka dezynfekcyjnego z rozpylaczem (jeżeli zintegrowany system dezynfekcji nie jest dostępny)
- Spryskiwacz (lub słuchawka prysznicowa) z wodą
- Ściereczki — mokre i suche
- Ręczniki jednorazowe
- Szczotka z miękkiego włosia
- Szczotka z miękkiego włosia z długą rączką

## WSKAZÓWKA

Procedura czyszczenia i dezynfekcji została zilustrowana na przykładzie Miranti i zintegrowanego systemu dezynfekcji.



## UWAGA




Aby chronić oczy i skórę, zawsze noś okulary i rękawice ochronne. W razie kontaktu opłukać obfitym strumieniem wody. W przypadku podrażnienia oczu lub skóry zgłosić się do lekarza. Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla środka dezynfekcyjnego.

Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dezynfekcji w niniejszej instrukcji obsługi.

Aby uniknąć podrażnienia oczu lub skóry, nigdy nie należy przeprowadzać dezynfekcji w obecności pacjenta.

## Usuwanie widocznych zanieczyszczeń

1

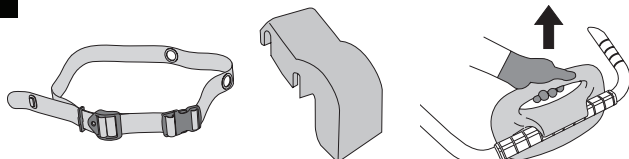

*Miranti*: zdjąć oparcie pod głowę, poduszkę podtrzymującą uda, uchwyt bezpieczeństwa i pasy bezpieczeństwa.


*Bolero*: zdjąć materac i pasy bezpieczeństwa.

*Alenti*: zdjąć oparcie pleców i pas bezpieczeństwa.

*Calypso*: zdjąć siedziska, wkładkę do siedzenia, oparcie pleców i pas bezpieczeństwa.


Umieścić akcesoria na dnie wanny.

2

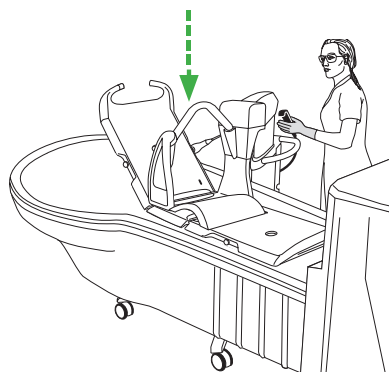

Umieścić podnośnik higieniczny nad wanną i obniżyć go.

3

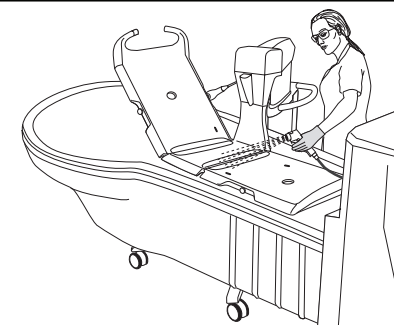

Wyczyścić widoczne zanieczyszczenia przy użyciu ściereczki namoczonej w wodzie lub pod prysznicem za pomocą szczotki. Czyszczenie podnośnika higienicznego należy rozpocząć od góry i przesuwając się ku dołowi. Wyczyścić wszystkie zdemontowane części.

*Dalsze kroki na następnej stronie*

## Czyszczenie

4



Założyć rękawice i okulary ochronne.

5




Zapoznać się z oddzielną instrukcją używanego systemu dezynfekcji i środka dezynfekcyjnego.

Podnośnik higieniczny i wszystkie zdemontowane części spryskać środkiem dezynfekcyjnym. Użyć butelki środka dezynfekcyjnego z rozpylaczem lub zintegrowanego systemu dezynfekcji.




6

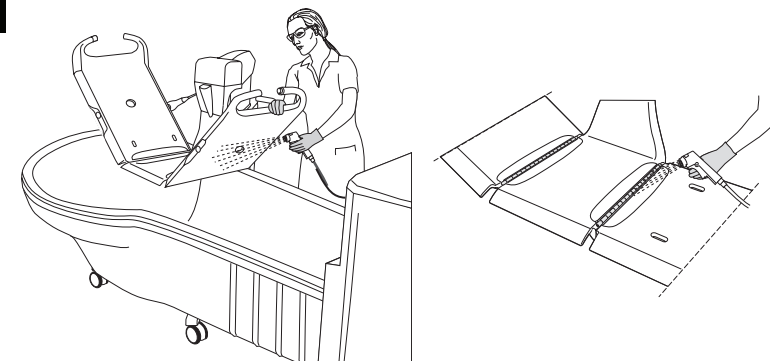


Dokładnie wyszorować szczotką namoczoną w środku dezynfekcyjnym, zwłaszcza uchwyty, pilota, zawiasy oraz spód podnośnika higienicznego.

7

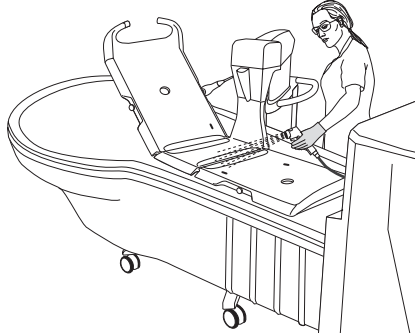

Splukać wodą (ok. 25°C (77°F)) lub spryskać wodą i przetrzeć czystą ściereczką.

8

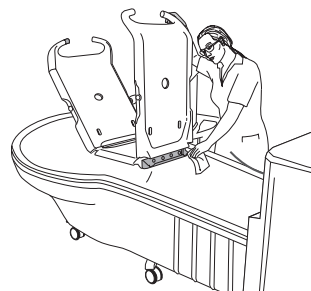


Namoczyć ściereczkę w środku dezynfekcyjnym i wytrzeć wszystkie pozostałe powierzchnie.

9



Namoczyć nową ściereczkę w wodzie i usunąć wszelkie pozostałości środka dezynfekcyjnego z pozostałych powierzchni. Co jakiś czas wypłukać ściereczkę w bieżącej wodzie.


10

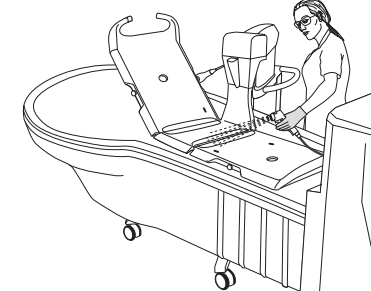

Jeśli nie można usunąć środka dezynfekcyjnego, należy spryskać wodą odpowiednią część i wytrzeć ją ręcznikami jednorazowymi, tak aby usunąć środek dezynfekcyjny w całości.


*Dalsze kroki na następnej stronie*

11

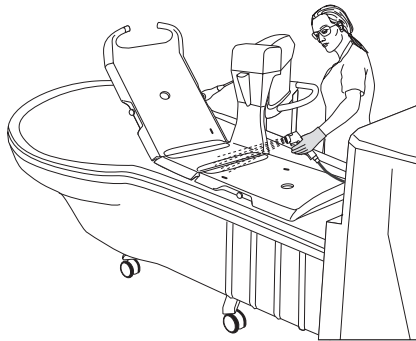


Podnośnik higieniczny i wszystkie zdemontowane części spryskać środkiem dezynfekcyjnym.

12

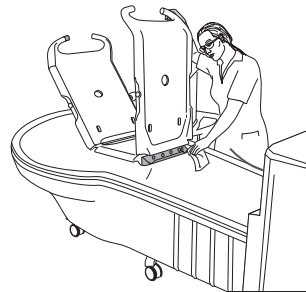


Namoczyć ściereczkę w środku dezynfekcyjnym i wytrzeć wszystkie pozostałe powierzchnie.

13

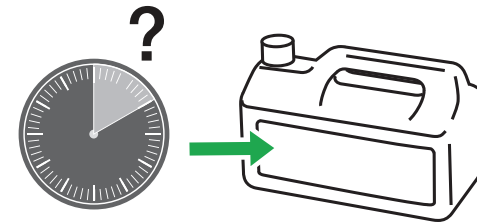

Przeznaczyć odpowiedni czas na dezynfekcję, wskazany w instrukcji środka dezynfekcyjnego.

14

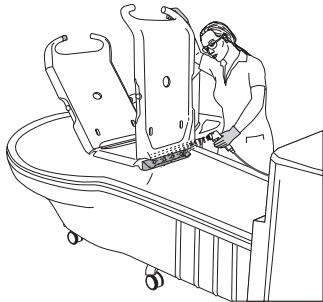


Splukać lub spryskać wodą i przetrzeć czystą ściereczką, aby usunąć wszystkie ślady środka dezynfekcyjnego z podnośnika higienicznego, podstawy i wszystkich zdemontowanych części. Co jakiś czas wypłukać ściereczkę w bieżącej wodzie.

15



Jeśli nie można usunąć środka dezynfekcyjnego, należy spryskać wodą wszystkie zanieczyszczone i wytrzeć je ręcznikami jednorazowymi, tak aby usunąć środek dezynfekcyjny w całości.

16

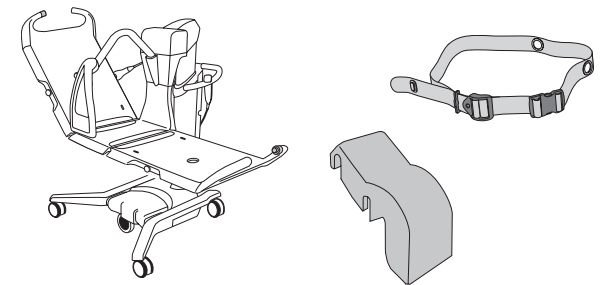

Pozostawić wszystkie części do wyschnięcia.