

# Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

Выполняйте очистку и дезинфекцию ежедневно.  
Выполняйте очистку и дезинфекцию перед каждым новым пациентом.

Необходимые принадлежности:

- Защитные перчатки
- Защитные очки
- Разбрызгиватель с дезинфицирующим средством (при отсутствии встроенной системы дезинфекции)
- Разбрызгиватель (или лейка душа) с водой
- Салфетки — влажные и сухие
- Одноразовые полотенца
- Щетка с мягкой щетиной
- Щетка с мягкой щетиной и длинной рукояткой

## ПРИМЕЧАНИЕ

Процедура очистки и дезинфекции проиллюстрирована на примере Miranti и встроенной системы дезинфекции.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Во избежание повреждений глаз и кожи обязательно используйте защитные очки и перчатки. При контакте промойте большим количеством воды. При появлении раздражения глаз или кожи обратитесь к врачу. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и паспорт безопасности (ПБ) дезинфицирующего средства.

Для предотвращения перекрестного заражения всегда следуйте указаниям по дезинфекции, содержащимся в инструкции по эксплуатации.

Во избежание раздражения глаз или кожи не проводите дезинфекцию в присутствии пациента.

## Удалите видимые загрязнения

**1**



*Miranti:* снимите подголовник, подушку поддержки бедер, поручень и ремни безопасности.  
*Bolero:* снимите матрас и ремни безопасности.  
*Alenti:* снимите спинку и ремень безопасности.  
*Calypso:* снимите сиденья, вставку сиденья, спинку и ремень безопасности.

Положите принадлежности на дно ванны.

**2**



Разместите гигиенический подъемник над ванной и опустите его.

**3**



Очистите от видимых загрязнений салфеткой, смоченной водой, или водой из душа с использованием щетки. Очистите гигиенический подъемник. Начинайте сверху и двигайтесь вниз. Очистите все снятые детали.

*Продолжение описания на следующей странице.*

4



Наденьте защитные перчатки и очки.

5




Ознакомьтесь с отдельными инструкциями к системе дезинфекции и используемому дезинфицирующему средству

Нанесите разбрызгивателем дезинфицирующее средство на гигиенический подъемник и на все снятые детали. Используйте разбрызгиватель с дезинфицирующим средством или встроенную систему дезинфекции.




6

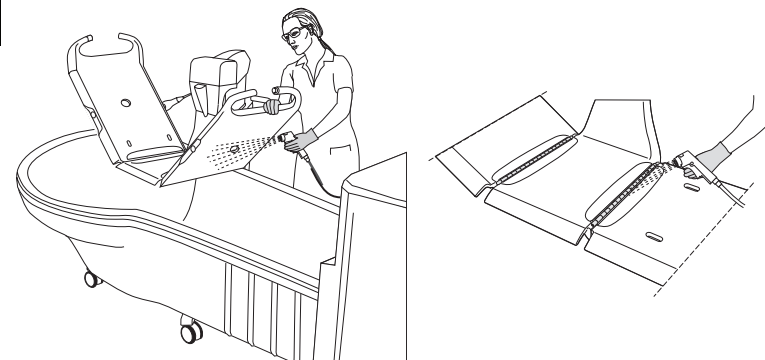


С помощью щетки, смоченной дезинфицирующим средством, выполните тщательную очистку, в особенности рукояток, пульта дистанционного управления и шарниров, а также нижней поверхности гигиенического подъемника.

7

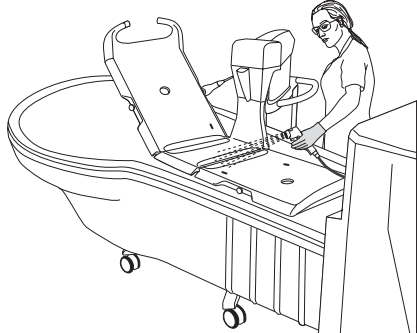


Ополосните водой из душа (примерно 25 °C (77 °F)) или обрызгайте водой и протрите насухо чистой салфеткой.

8

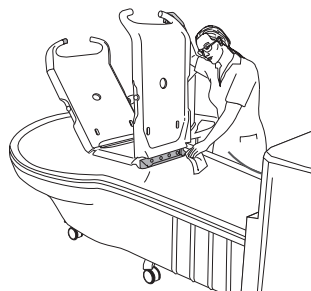


Смочите салфетку в дезинфицирующем средстве и протрите все остальные участки.

9

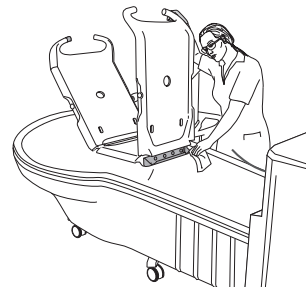

Смочите новую салфетку водой и удалите все остатки дезинфицирующего средства со всех элементов. Салфетку следует периодически промывать в проточной воде.


10

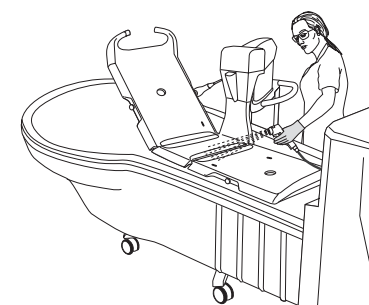

Если полностью удалить дезинфицирующее средство не представляется возможным, нанесите на деталь воду из разбрызгивателя и протирайте одноразовым полотенцем до удаления дезинфицирующего средства.


*Продолжение описания на следующей странице.*

11

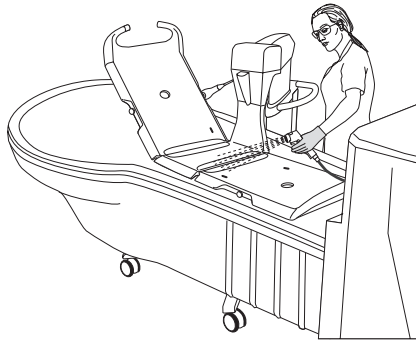


Нанесите разбрызгивателем дезинфицирующее средство на гигиенический подъемник и на все снятые детали.

12

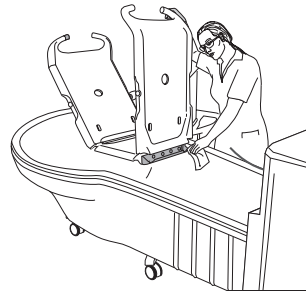


Смочите салфетку в дезинфицирующем средстве и протрите все остальные участки.

13

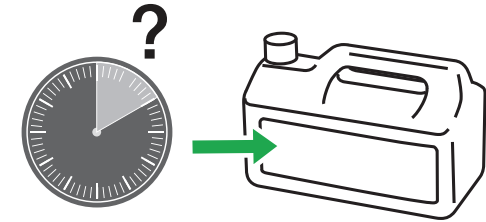


Выдержите установленное для дезинфекции время, указанное в инструкции к дезинфицирующему средству.

14

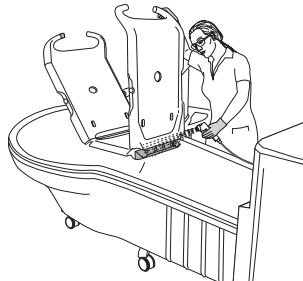


Ополосните водой из душа или разбрызгивателя и протрите чистой салфеткой, чтобы удалить все остатки дезинфицирующего средства с гигиенического подъемника, шасси и со всех снятых деталей. Салфетку следует периодически промывать в проточной воде.

15

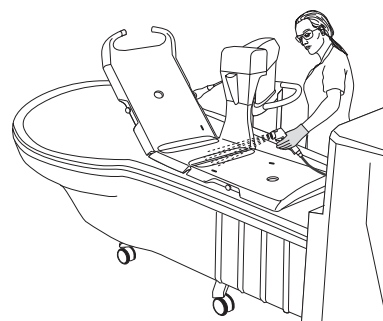

Если полностью удалить дезинфицирующее средство не представляется возможным, нанесите на детали воду из разбрызгивателя и протирайте одноразовым полотенцем до удаления дезинфицирующего средства.

16

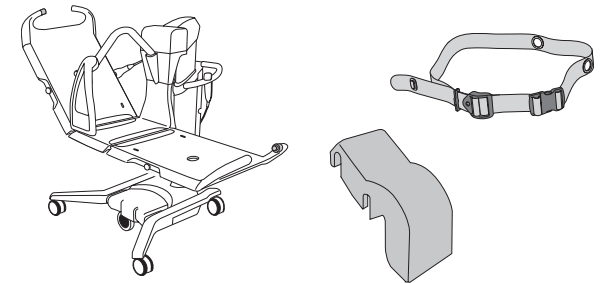

Дайте всем деталям просохнуть.