


Bolero

Transfert depuis le lit




Pour éviter tout coincement, s'assurer qu'aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire.

1

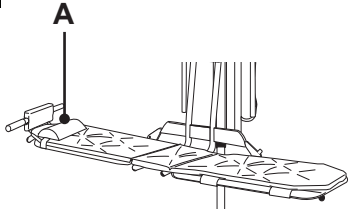


Fixer l'oreiller (A) à l'extrémité de tête souhaitée.

2

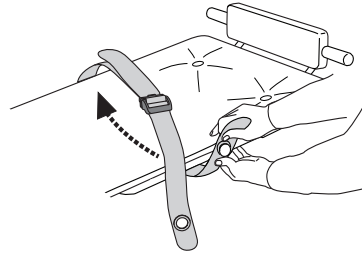


Fixer la sangle de sécurité pour la hanche au bouton. Placer la sangle de sécurité sur le dessus du brancard.

3

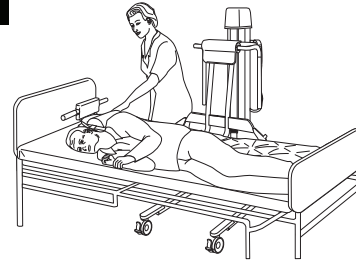


Faire rouler le patient sur le côté. Rapprocher le brancard élévateur d'hygiène Bolero du patient et l'abaisser de manière à ce qu'il repose fermement sur le lit.

4

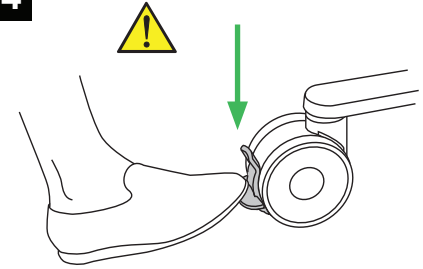


Serrer les freins sur toutes les roulettes.

5

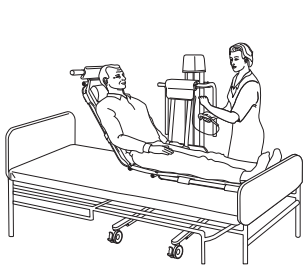


Faire rouler le patient sur le brancard et soulever le dossier. Vérifier que le repose-buste est verrouillé.

6

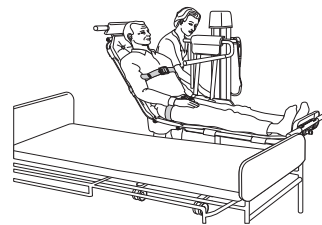


Attacher la sangle de sécurité sur la poitrine du patient. Relever le brancard, fixer la sangle de sécurité sur la hanche. Abaisser la barre transversale.

7

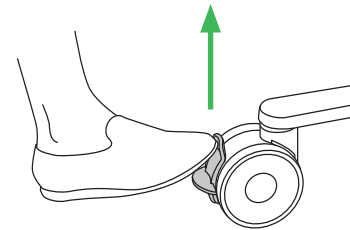

Libérer les freins des roulettes.

8

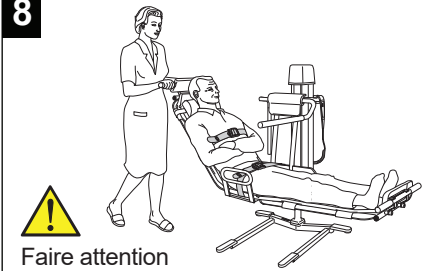

Faire attention aux objets fixes lors de la descente.

Tirer le brancard élévateur d'hygiène Bolero hors du lit et l'abaisser à une hauteur confortable.


Transfert dans le lit

1




Lever le brancard élévateur d'hygiène Bolerio à une hauteur permettant de le déplacer au-dessus du lit.

2

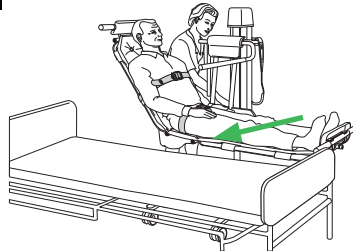


Amener le brancard élévateur d'hygiène Bolerio au-dessus du lit.

3

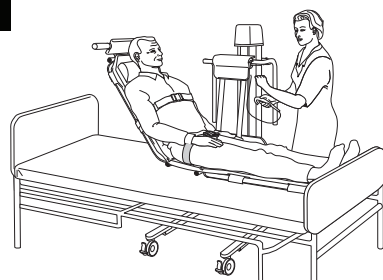


Abaisser le brancard élévateur d'hygiène Bolerio de façon à ce qu'il repose fermement sur le lit.

4

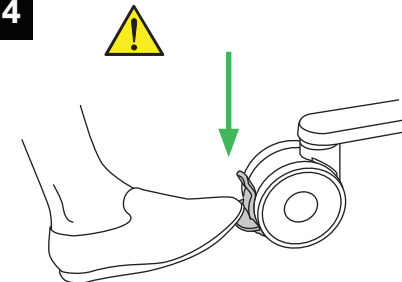

Serrer les freins sur toutes les roulettes.


5

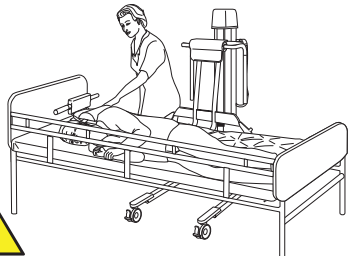

Vérifier que la barrière latérale est relevée sur le lit.

Retirer les sangles de sécurité.
Abaisser le repose-buste.
Faire rouler le patient du brancard élévateur d'hygiène Bolerio au lit.

6

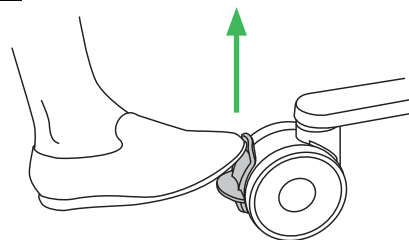

Desserrer les freins des roulettes et éloigner le brancard élévateur d'hygiène Bolerio du lit.


Donner le bain au patient

1


Lire les instructions du système de bain.

REMARQUE


Avant le bain, lire les consignes de sécurité du mode d'emploi.

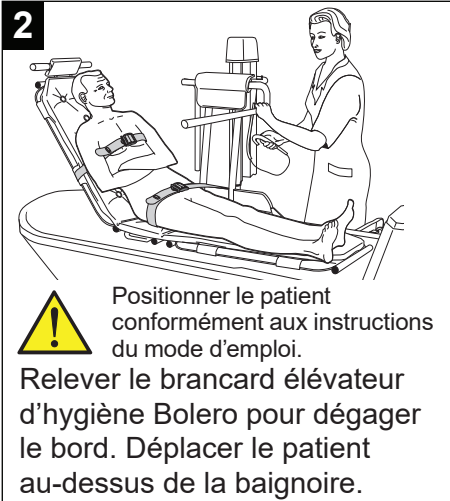

3

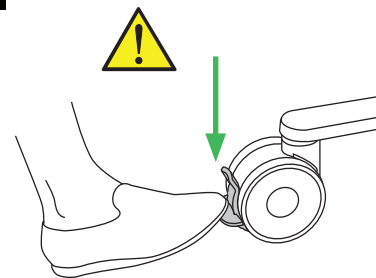

4

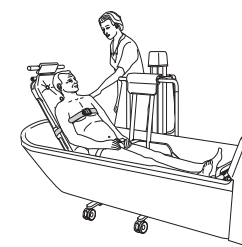


5

Retirer la sangle de sécurité sur la poitrine et desserrer la sangle de sécurité sur la hanche, puis procéder au bain du patient.



7

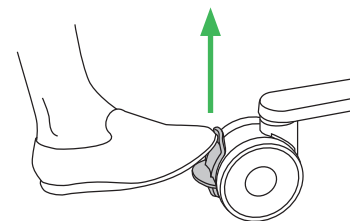

8

