



## Nödstopp

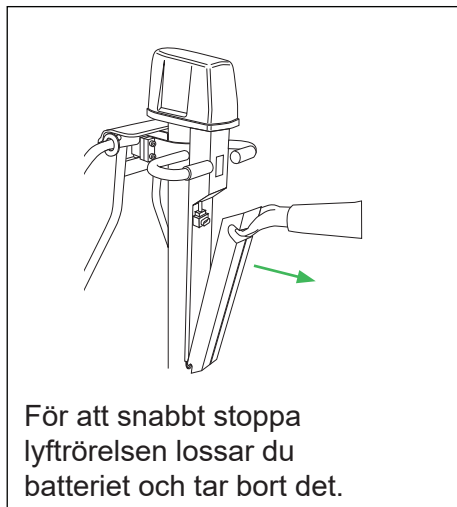


## Nödhöjning och nödsänkning

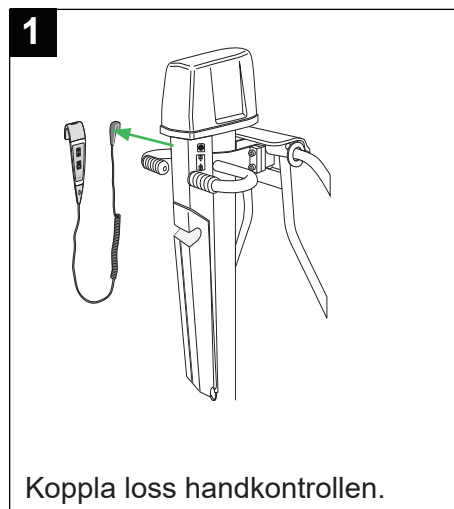


## Manuell höjning och sänkning




## Elektrisk höjning och sänkning

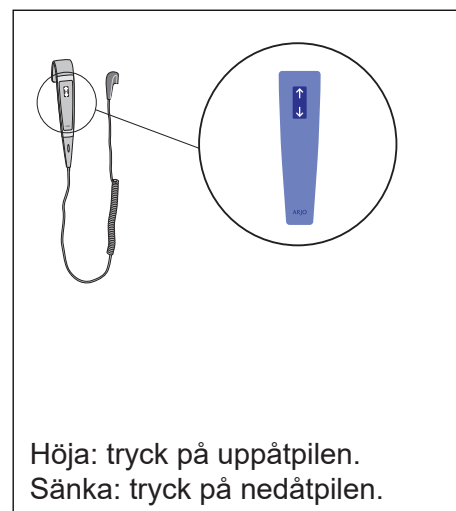

## Bromsar

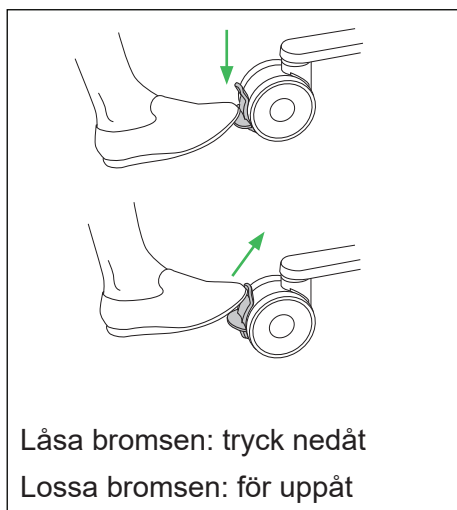


## Ryggstöd

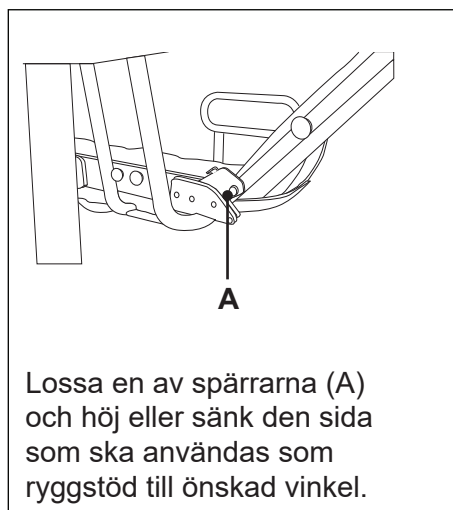


## Handtag




## Placera madrassen

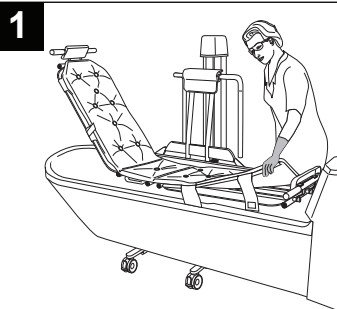

**1**  
Börja alltid från ena änden av sidoskenan när du fäster eller lossar madrassen.

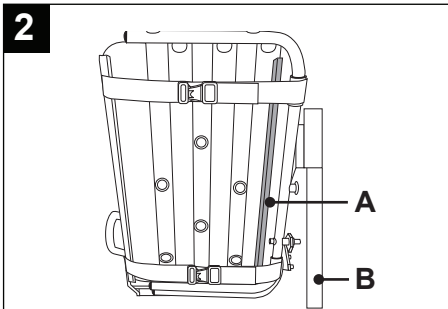


**2**  
Fäst sidoskenan (A) på den sida av liggplattan som är bredvid den hydrauliska lyftpelaren (B).  
Pressa och dra handflatan längs sidoskenan.

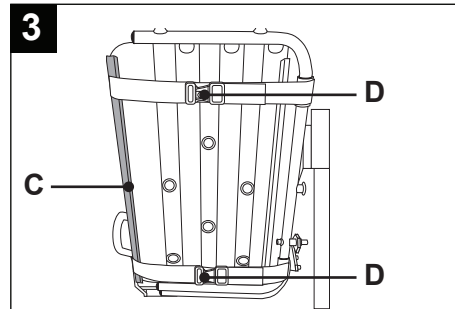


**3**  
Dra ut madrassen och fäst den andra sidoskenan (C).  
Fäst madrassen med snabbspännena (D).

## Justera liggplattans längd

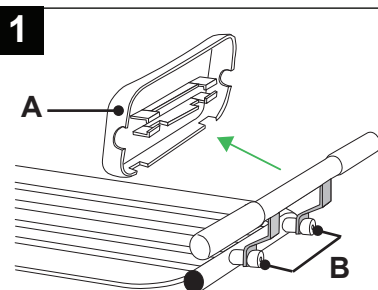

**1**  
Ta bort huvud- eller fotstödet (A) och lossa skruvarna (B).

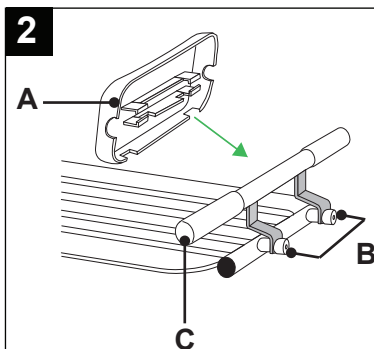

**2**  
Roteratransporthandtaget (C) 180°.  
Fäst huvud- eller fotstödet (A) och skruvarna (B).

