


# System rámu lůžka Citadel/ léčebného systému

## Uvolnění opěrky zad pro CPR




Opěrka zad může spadnout velmi rychle, proto nenechávejte ruce v prostoru, kde může dojít k jejich zachycení.

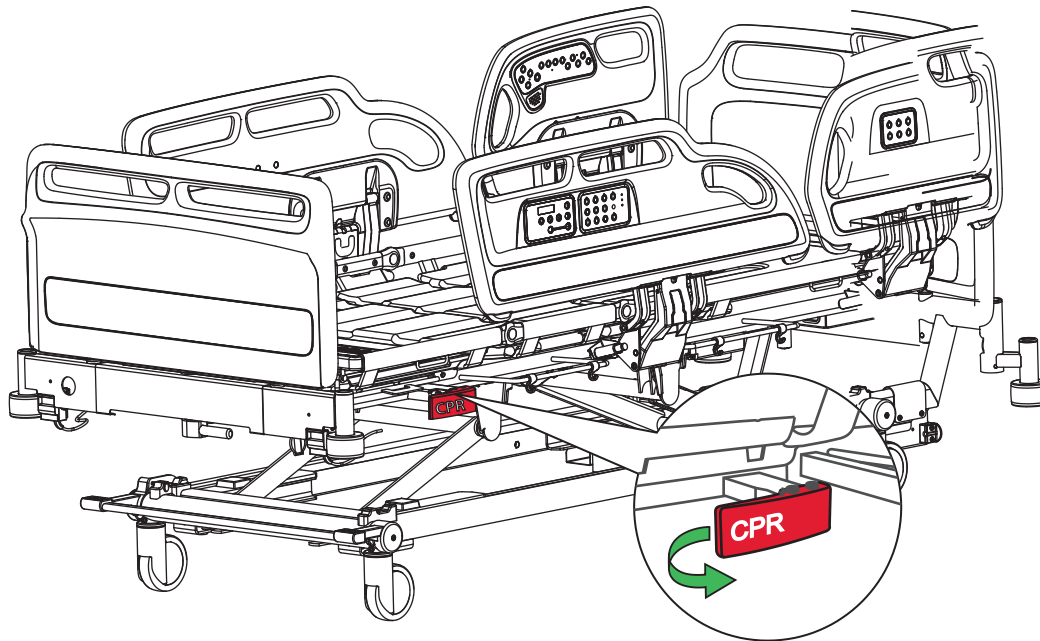


Zatáhněte za červenou rukojeť CPR, která se nachází na obou stranách lůžka a slouží k rychlému snížení opěrky zad.

## Brzdy a řízení

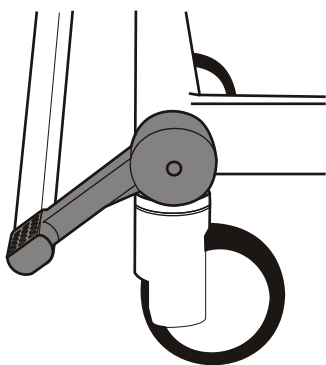


### Brzda

Brzdy jsou použity na všech čtyřech kolečkách.

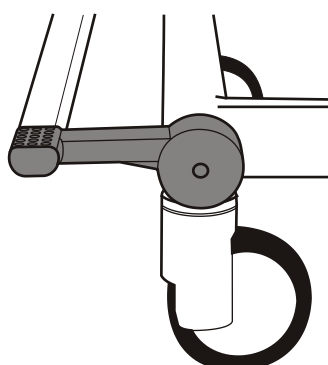

### Volno

Všechna čtyři kolečka se volně otáčejí (i kolem své osy).

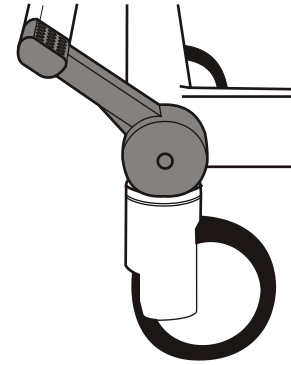


### Řízení

Všechna čtyři kolečka se mohou volně otáčet, ale řídicí kolečko se neotáčí kolem své osy.

Brzdy použijte vždy, když lůžko stojí na místě.

## Postranice

1

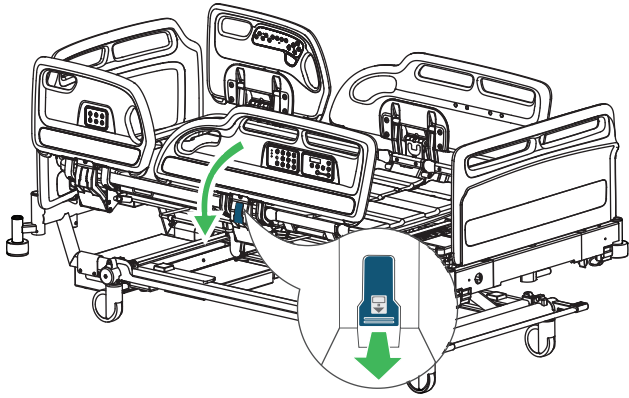


Zatáhněte za modrou uvolňovací páčku pro snížení postranice.

2




Ujistěte se, že postranice ve zvednuté poloze jsou bezpečně zajištěny.

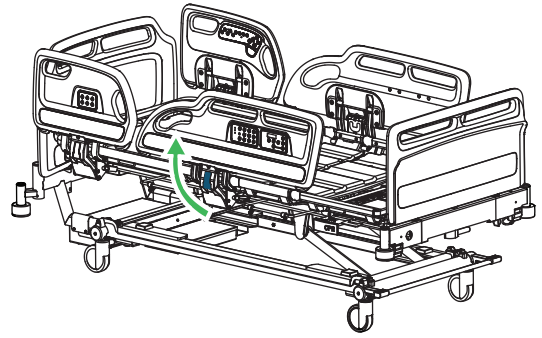

Pro zvednutí postranice přidržeť rukojeť postranice, pak zatáhněte postranicí nahoru a směrem od lůžka, dokud nezapadne do zvednuté pozice.


## Nastavení délky lůžka (dvě přednastavené pozice)

1

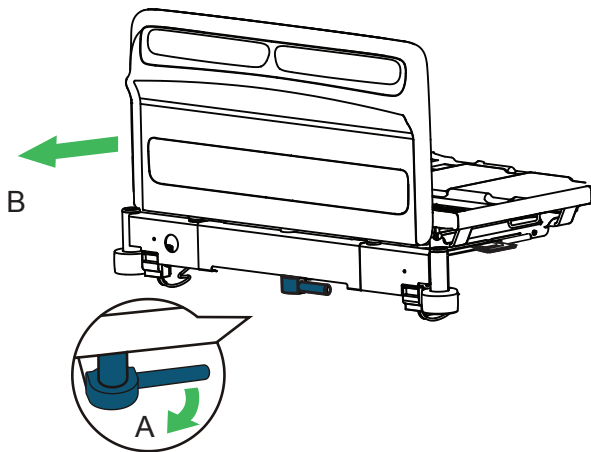


Zatáhněte za modrou pojistnou páčku prodloužení (A). Vytáhněte rám lůžka (B) do požadované polohy a páčku uvolněte.

2

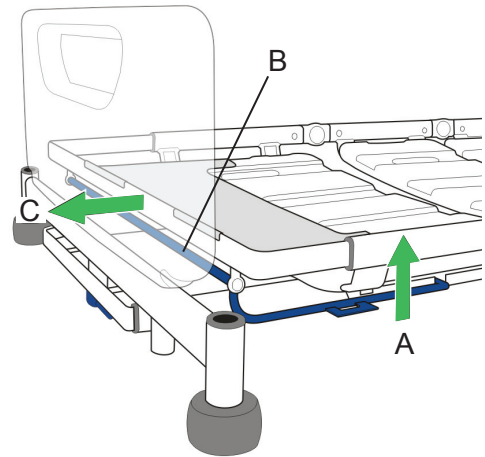

Zvedněte modrou ruční páčku prodloužení (A), přidržeť střední část příčky (B) a vytáhněte platformu matrace do požadované pozice (C).

## Prodloužení délky vzduchové matrace

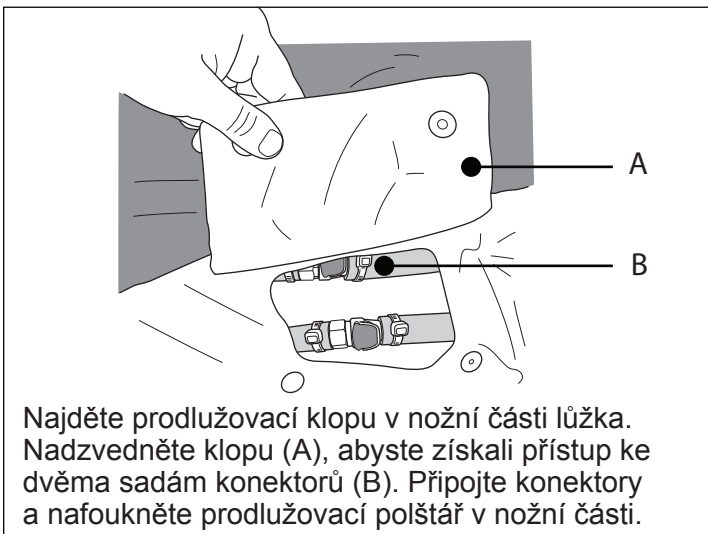

Najděte prodlužovací klopu v nožní části lůžka. Nadzvedněte klopu (A), abyste získali přístup ke dvěma sadám konektorů (B). Připojte konektory a nafoukněte prodlužovací polštář v nožní části.