


Reanimatierugsteunontgrendeling




De rugsteun kan snel dalen; houd uw handen uit de buurt om blessures te voorkomen.

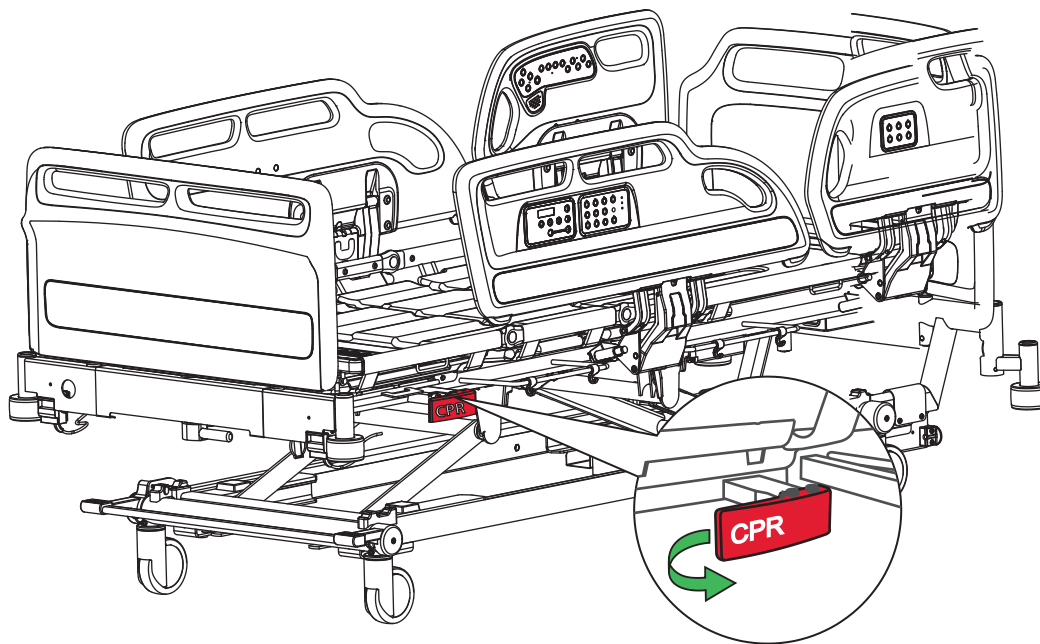


Trek aan de rode reanimatiehendel aan een van de zijkanten van het bed om de rugsteun snel te laten zakken.

Remmen en sturen

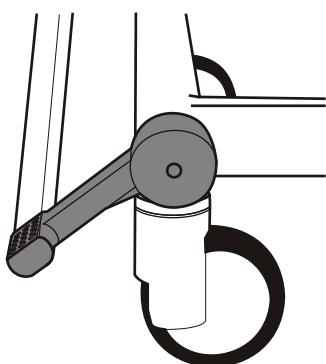


Rem

Remmen werken op alle vier zwenkwielen.

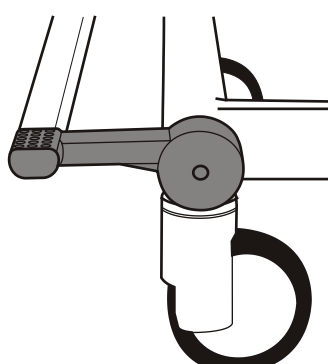

Vrij

Alle vier zwenkwielen kunnen vrij draaien en zwenken.

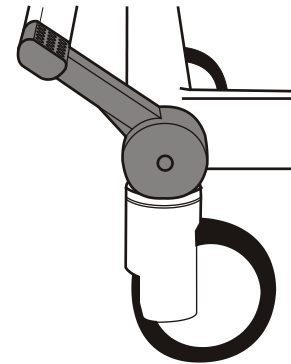


Sturen

Alle vier zwenkwielen kunnen draaien, het stuurwiel kan niet draaien.

De remmen moeten altijd werken als het bed stil staat.

Bedhekken

1

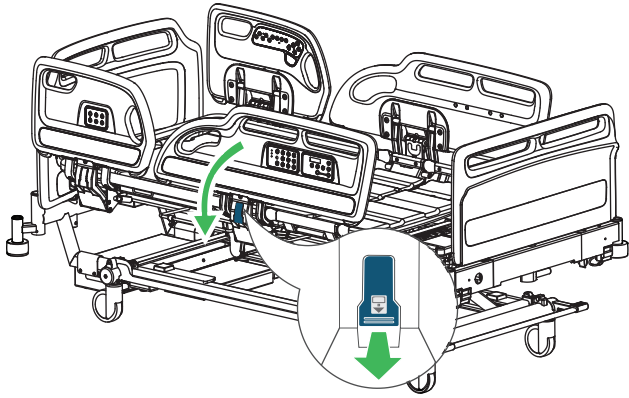


Trek aan de blauwe ontgrendelingshendel om het bedhek te laten zakken.

2




Zorg dat het bedhek goed vastzit in de hoge stand.

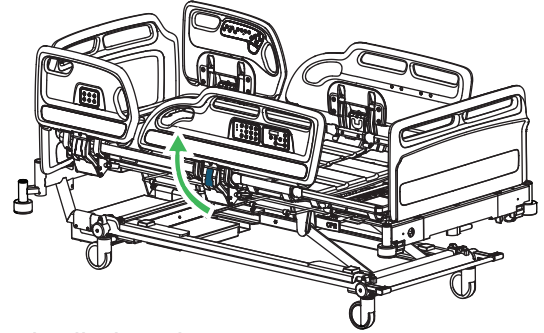

Om het bedhek omhoog te brengen houdt u de greep van het bedhek vast en trekt u het bedhek omhoog en weg van het bed totdat het vastklikt in de hoge stand.


Aanpassing van de lengte van het bed (twee vaste standen)

1

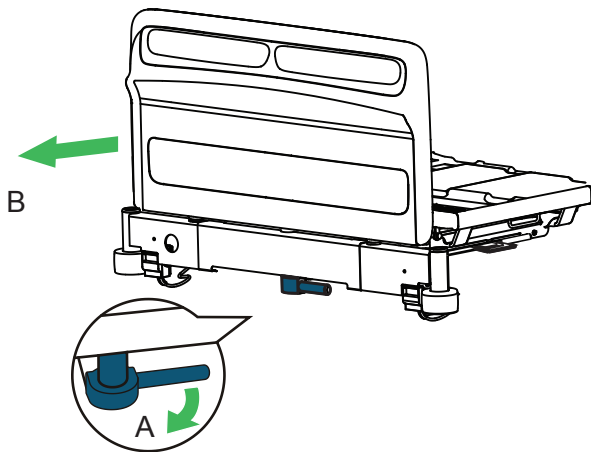


Trek aan de blauwe vergrendelhendel van de verlenging (A). Trek het bedkader (B) uit tot op de gewenste positie en laat de hendel los.

2

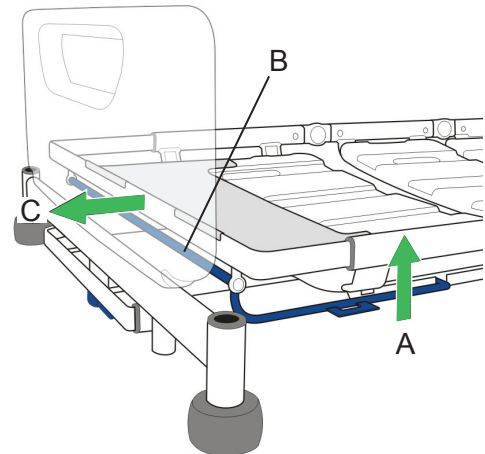

Breng de blauwe veiligheidshendel van de verlenging omhoog (A), grijp het midden van de dwarsbalk (B) en trek het ligvlak in de positie (C).

Verlenging luchtmatraslengte

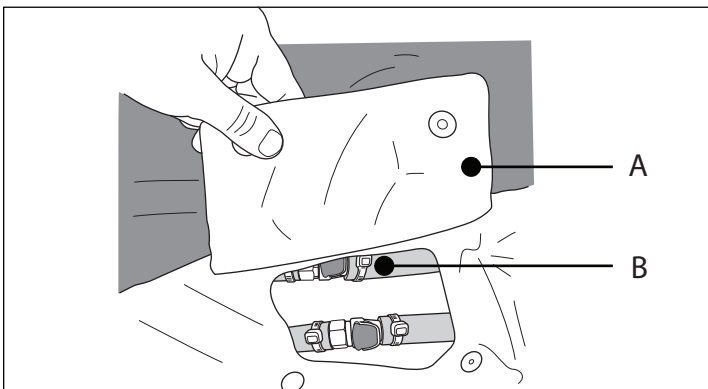

Zoek de verlengingsflap aan het voeteneinde. Til de flap (A) omhoog om toegang te krijgen tot de twee sets connectoren (B). Sluit de connectoren aan om het verlengingskussen in het beengedeelte op te blazen.