


Rama łóżka Citadel / System terapeutyczny

Opuszczanie segmentu oparcia pleców do funkcji CPR




Oparcie może gwałtownie opaść; należy trzymać ręce z daleka, aby uniknąć obrażeń.

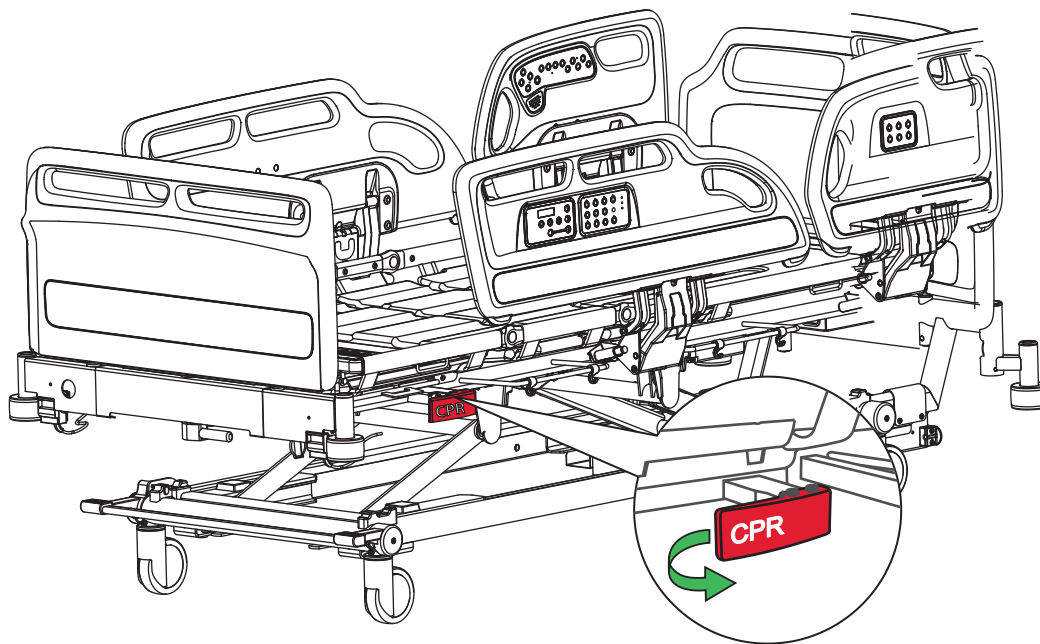


Pociągnąć czerwoną dźwignię CPR umieszczoną po obu stronach łóżka, aby szybko obniżyć oparcie pleców.

Hamulce i sterowanie

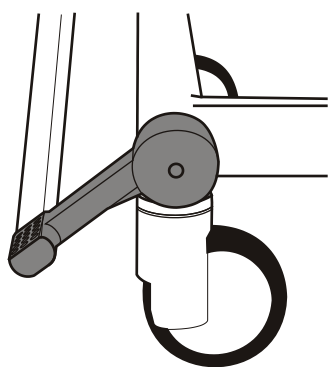


Hamulec

Hamulce założone na wszystkich czterech kółkach.

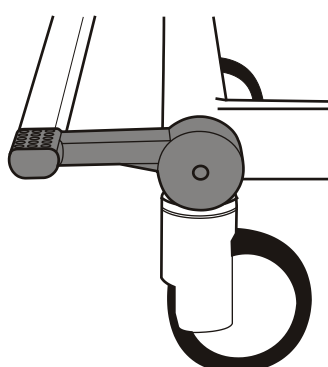

Ruch swobodny

Wszystkie cztery kółka obracają się swobodnie.

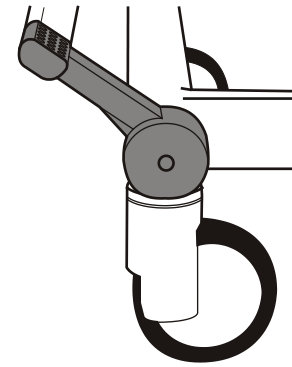


Sterowanie

Wszystkie cztery kółka obracają się, ale kółko sterujące jest zablokowane.

Hamulce powinny być założone zawsze, kiedy łóżko stoi w miejscu.

Barierki boczne

1

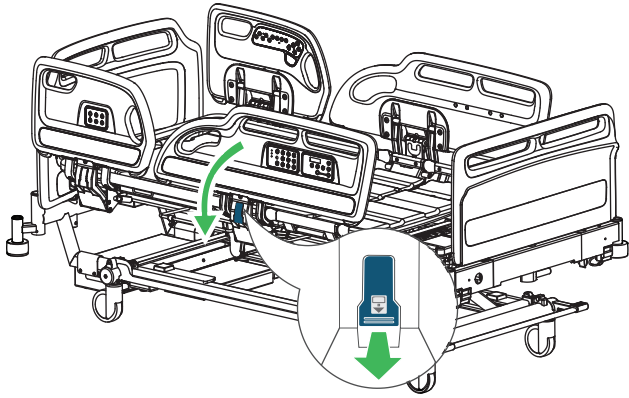


Pociągnąć niebieską dźwignię, aby opuścić boczną barierkę.

2




Zablokować barierkę boczną w pozycji uniesionej.

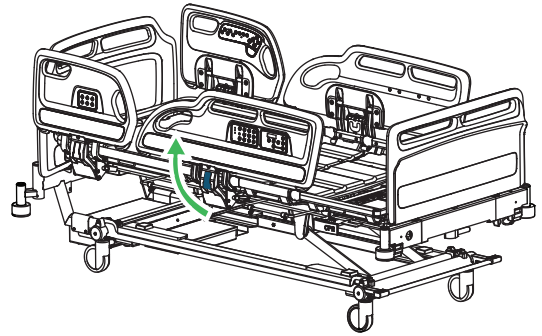

Aby podnieść boczną barierkę, chwycić dźwignię i pociągnąć ją do góry, na zewnątrz od łóżka, aż się zablokuje w pozycji podniesionej.


Regulacja długości łóżka (dwie nastawy)

1

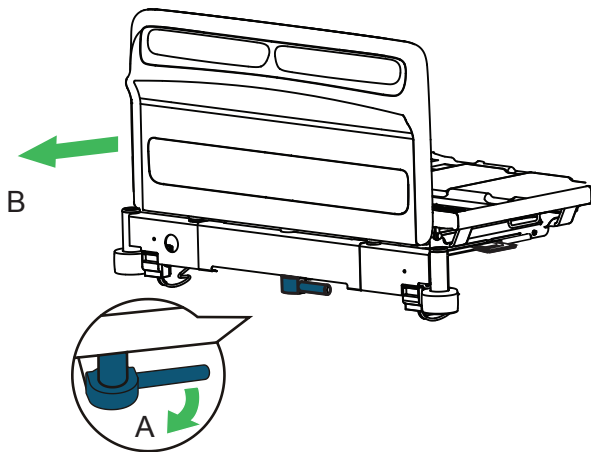


Pociągnąć za niebieską dźwignię blokującą przedłużenie (A). Wyciągnąć ramę łóżka (B) do żądanej pozycji i zwolnić dźwignię.

2

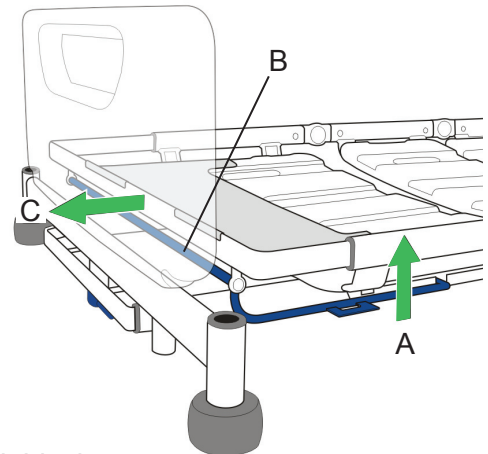

Podnieść niebieską poprzeczkę blokującą przedłużenie (A) i wyciągnąć platformę materaca do żądanej pozycji (C), trzymając środek poprzeczki (B).

Przedłużenie materaca powietrznego

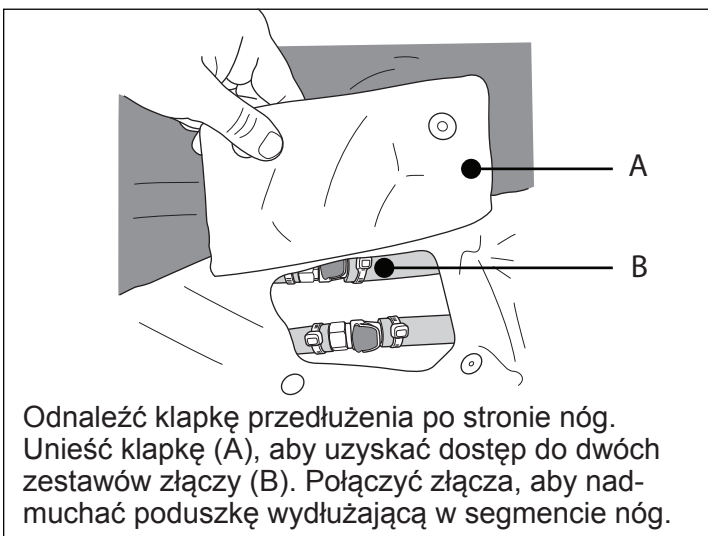

Odnaleźć klapkę przedłużenia po stronie nóg. Unieść klapkę (A), aby uzyskać dostęp do dwóch zestawów złączy (B). Połączyć złącza, aby nadmuchać poduszkę wydłużającą w segmencie nóg.