


Система каркаса кровати/ терапевтическая система пациента Citadel

Ручка опускания спинки для проведения СЛР




Спинка может быстро упасть. Уберите руки, чтобы избежать травм.

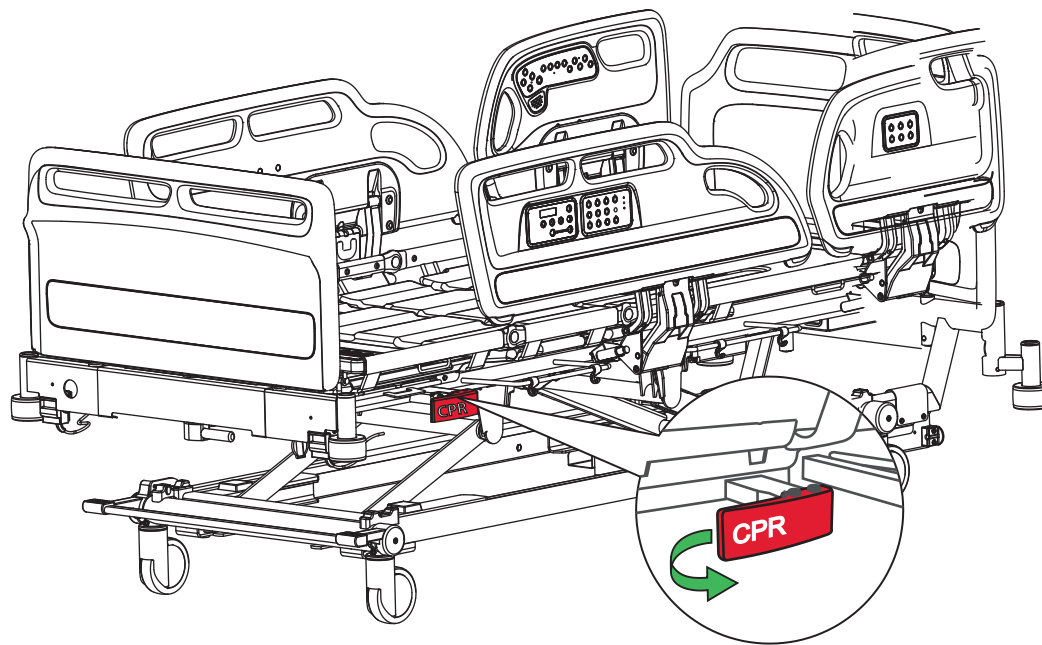


Чтобы быстро опустить спинку, потяните за одну из красных ручек СЛР, доступных с каждой стороны кровати.

Тормоза и рулевое управление

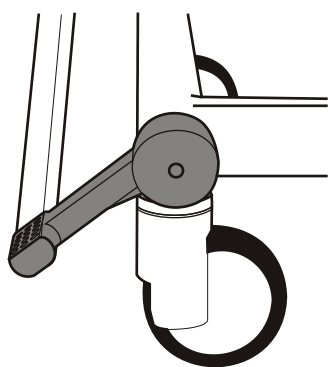


Тормоз

Тормоза задействуются на всех четырех колесах.

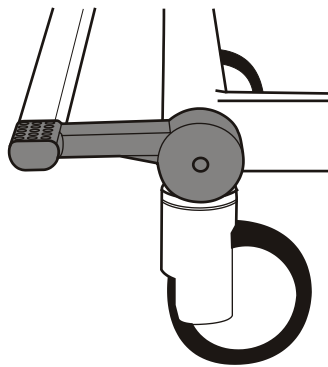

Свободное движение

Все четыре колеса могут свободно вращаться и поворачиваться.

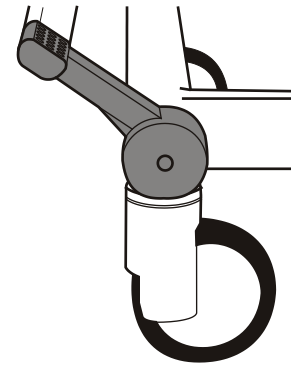


Рулевое управление

Все четыре колеса могут вращаться, рулевое колесо поворачиваться не может.

Если кровать установлена стационарно, тормоза должны быть задействованы обязательно.

Боковое ограждение

1

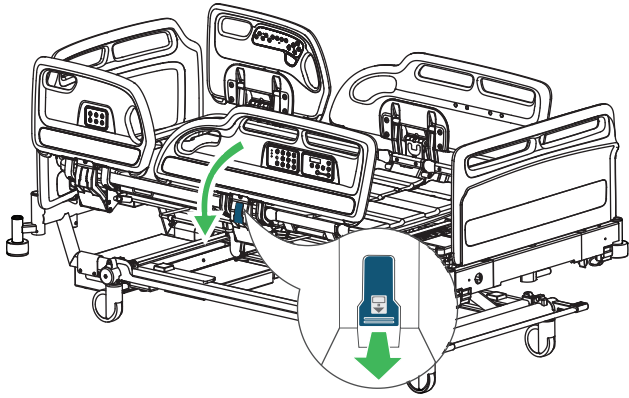


Чтобы опустить боковое ограждение, потяните голубой рычаг опускания.

2




Убедитесь, что боковое ограждение надежно заблокировано в поднятом положении.

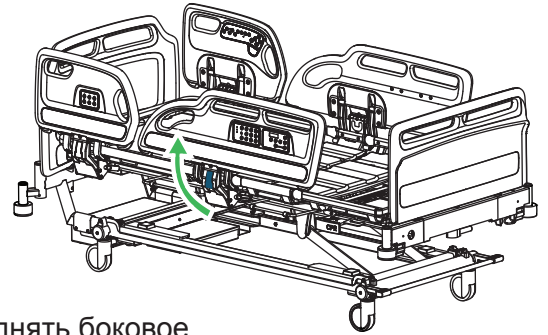

Чтобы поднять боковое ограждение, потяните его за ручку вверх и в сторону от кровати до тех пор, пока оно не будет заблокировано в поднятом положении.


Регулировка длины кровати (два фиксированных положения)

1

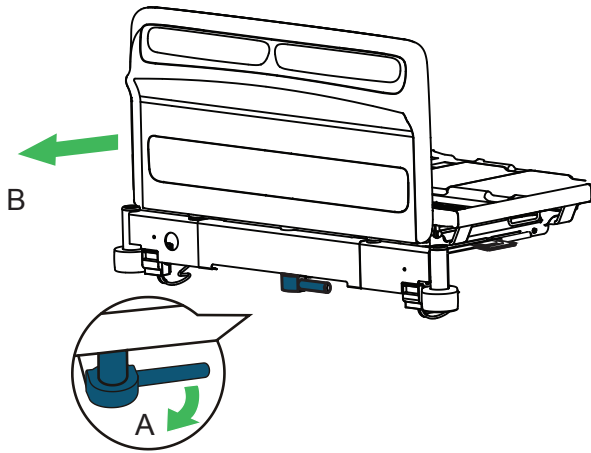


Потяните за голубую рукоятку блокировки удлинения (A). Вытяните каркас кровати (B) в требуемое положение и отпустите рукоятку.

2

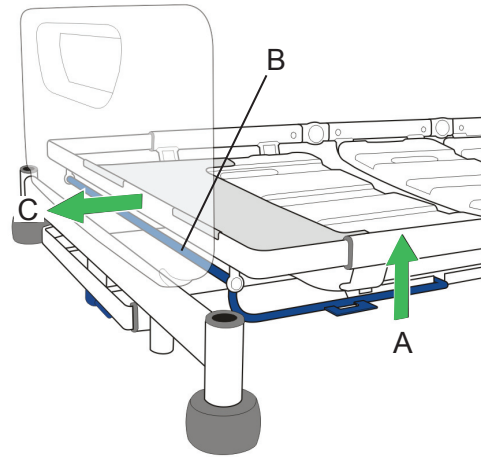

Поднимите голубую штангу захвата удлинения (A), удерживая поперечную штангу (B) за середину, после чего вытяните матрасную платформу в требуемое положение (C).

Удлинение платформы надувного матраса

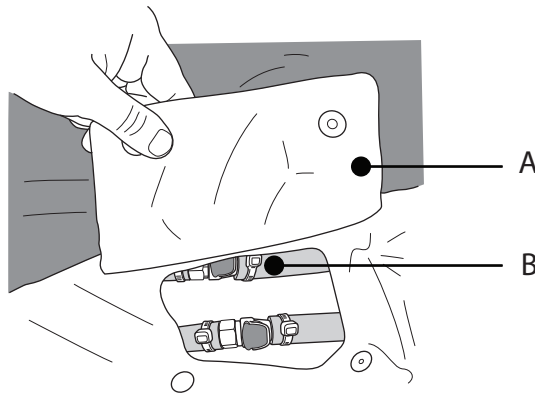

Найдите удлинительный клапан на ножном конце. Поднимите клапан (A), чтобы получить доступ к двум системам соединителей (B). Подключите соединители, чтобы накачать удлинительную подушку в ножной секции.