


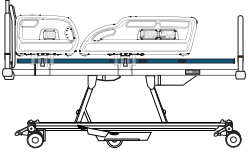

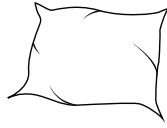
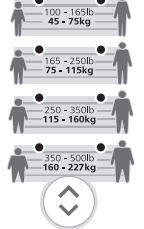


Vorbereiding voor de plaatsing/transfer van de zorgvrager

<p>1</p>  <p>Zet de zwenkwielen van het bedkader op de rem.</p>	<p>2</p>  <p>Verleng het kader en de matras waar nodig.</p>	<p>3</p>  <p>Houd de aan/uit-knop op het bedieningspaneel gedurende twee seconden ingedrukt om de luchttoevoer naar de eenheid te activeren.</p>	<p>4</p>  <p>Zet de ligondersteuning horizontaal.</p>	<p>5</p>  <p>Druk de knop Verzorgingsstand in om de matras op te blazen.</p>	<p>6</p>  <p>Voeg kussens, dekens en andere apparatuur toe.</p>	<p>7</p>  <p>Stel initiële luchtdrukwaarden in: Druk op voorinstelling Hoogte/Gewicht om het profiel van de zorgvrager te selecteren.</p>
---	---	--	---	--	---	---






De zorgvrager op de matras leggen

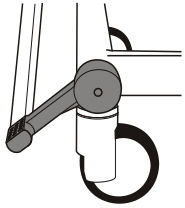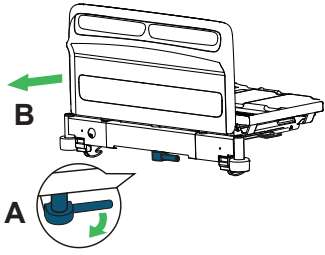

Druk op de knoppen Afstelling drukzone om de druk van de matras aan te passen.

Pijlen omhoog om de druk te verhogen en pijlen omlaag om de druk te verlagen.

Transfer van de zorgvrager van het Citadel-therapiesysteem
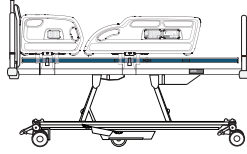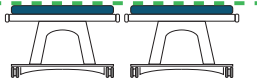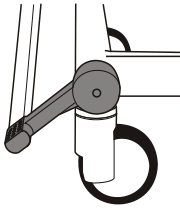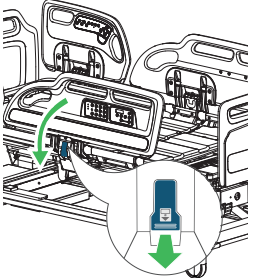
<p>1</p>  <p>Zet de ligondersteuning horizontaal.</p>	<p>2</p>  <p>Stel de hoogte van het ligsysteem zo in dat deze op dezelfde hoogte staat als het oppervlak waarnaar de zorgvrager wordt overgebracht.</p>	<p>3</p>  <p>Zet beide systemen op de rem.</p>	<p>4</p>  <p>Breng de bedkleden omlaag.</p>	<p>5</p> <p>Verplaats de zorgvrager (volgens de veiligheidsregels en protocollen die in uw instelling van toepassing zijn.)</p>	<p>6</p>  <p>Houd de aan/uit-knop gedurende twee seconden ingedrukt als de zorgvrager niet zal terugkeren.</p>
--	---	---	--	--	---


Zorgvragers vervoeren

1




Druk op de knop Transport-stand om de luchtmatras iets boven de ingestelde drukwaarden op te blazen.

2

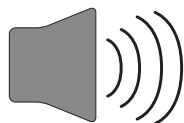


Zodra er een geluidssignaal klinkt en het indicatielampje groen brandt, haalt u de voedingskabel uit het stopcontact en wikkelt u de kabel om de kabelhaak aan het hoofdeinde.

3

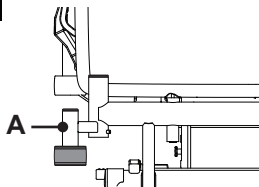


Plaats het infuus voor de zorgvrager op de infuusstandaarden en daarna in de houders (A) die zich op de vier hoeken van het bed bevinden.

4

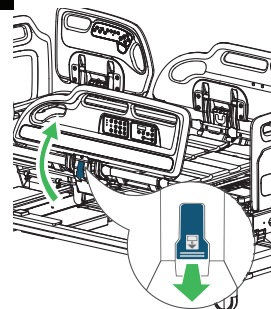


Breng de beddekken omhoog.

5

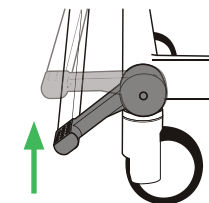

Ontgrendel de rem.

6

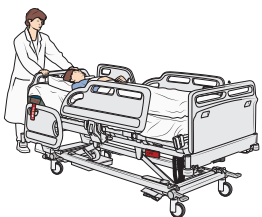

Verplaats de zorgvrager volgens binnen uw instelling geldende veiligheidsregels.

7

Zet na het transport van de zorgvrager de zwenkwielen van het bedkader op de rem en steek onmiddellijk de voedingskabel in het stopcontact.

8



Houd de aan/uit-knop op de bedieningseenheid van de matras gedurende twee seconden ingedrukt om de bedieningseenheid in te schakelen.

