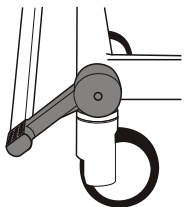
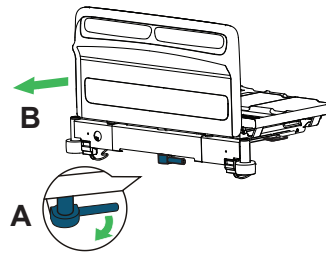

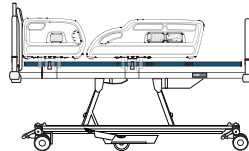

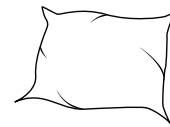
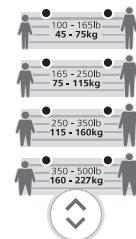



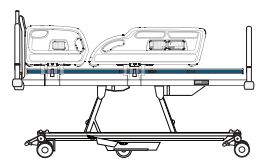
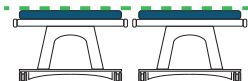
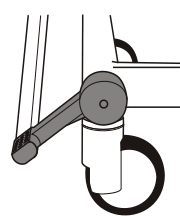
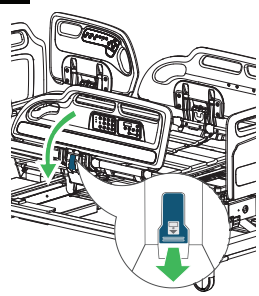

System terapeutyczny Citadel

Przygotowanie do umieszczenia / transportu pacjenta

<p>1</p>  <p>Zablokować hamulce kółek łóżka.</p>	<p>2</p>  <p>W razie potrzeby przedłużyć ramę i materac.</p>	<p>3</p>  <p>Na panelu sterowania nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia przez dwie sekundy, aby uruchomić doprowadzenie powietrza do jednostki.</p>	<p>4</p>  <p>Wyrównać powierzchnię, na której umieszczony jest pacjent.</p>	<p>5</p>  <p>Nacisnąć przycisk utwardzania materaca, aby napompować materac.</p>	<p>6</p>  <p>Dodać poduszki, koce i inne wyposażenie.</p>	<p>7</p>  <p>Ustawić początkowe ciśnienie powietrza: ustawiając wysokość/masę, można wybrać profil pacjenta.</p>
--	--	--	---	--	---	--

Umieszczanie pacjenta

Przeniesienie pacjenta z systemu terapeutycznego Citadel

 <p>Przyciskami regulacji stref nacisku wyregulować ciśnienie w materacu. Strzałka w górę zwiększa, a strzałka w dół zmniejsza ciśnienie.</p>	<p>1</p>  <p>Wyrównać powierzchnię, na której umieszczony jest pacjent.</p>	<p>2</p>  <p>Dostosować wysokość podparcia pacjenta do wysokości przenoszenia pacjenta.</p>	<p>3</p>  <p>Zablokować hamulce obydwu urządzeń.</p>	<p>4</p>  <p>Obniżyć bariereki boczne.</p>	<p>5</p> <p>Przenieść pacjenta (zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i procedurami obowiązującymi w placówce).</p>	<p>6</p>  <p>Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia przez dwie sekundy, jeżeli ten sam pacjent nie wróci na łóżko.</p>
--	--	--	---	---	---	--


Przemieszczanie pacjenta

1




Nacisnąć przycisk przemieszczania pacjenta, aby napompować materac powietrzny lekko powyżej ustawionej wartości ciśnienia.

2

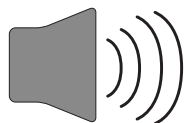


Po usłyszeniu dźwięku i zmianie koloru przycisku przemieszczania pacjenta na zielony odłączyć przewód zasilania i owinąć go wokół haka po stronie głowy.

3

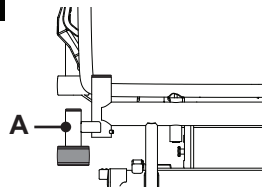


Zawiesić kroplówkę pacjenta na stojaku i podłączyć do gniazd (A) umieszczonych we wszystkich czterech narożnikach łóżka.

4

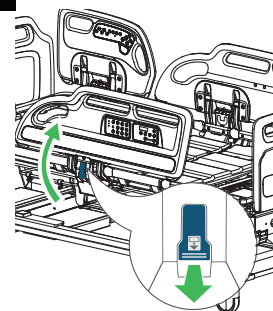


Podnieść wszystkie barierki boczne.

5

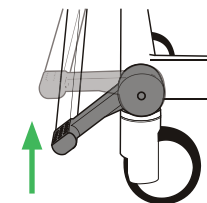

Zwolnić hamulce.

6

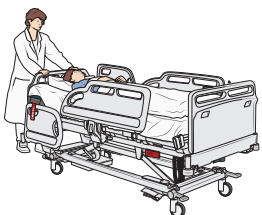

Przetransportować pacjenta zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami bezpieczeństwa i protokołem ośrodka.

7

Po przemieszczaniu pacjenta założyć hamulce kółek na ramie łóżka i natychmiast podłączyć przewód zasilania do gniazda ściennego.

8



Nacisnąć i przez dwie sekundy przytrzymać przycisk włączenia/wyłączenia na jednostce sterującej materaca, aby włączyć pompę.

