

Citadel patientbehandlingsystem

Förbereda placering/förflyttning av patienten

<p>1</p> <p>Aktivera sänggramens hjulbromsar.</p>	<p>2</p> <p>Förläng vid behov ramen och madrassen.</p>	<p>3</p> <p>Håll in strömbrytaren på manöverpanelen i två sekunder för att aktivera lufttillförseln till enheten.</p>	<p>4</p> <p>Gör patientunderlaget plant.</p>	<p>5</p> <p>Tryck på knappen för fast madrass för att blåsa upp madrassen.</p>	<p>6</p> <p>Lägg dit kuddar, täcken och annan utrustning.</p>	<p>7</p> <p>Ställa in initiala lufttryck: Tryck på kontrollen för förinställd längd/vikt för att välja patientprofil.</p>
--	---	--	---	---	--	--

Patientens placering

Använd knapparna för tryckzonjustering för att ställa in madrassens tryck. Tryck pil upp för att öka och pil ned för att minska trycket.

Förflyttning av patienten från Citadel patientbehandlingsystem

<p>1</p> <p>Gör patientunderlaget plant.</p>	<p>2</p> <p>Ställ in patientunderlagets nivå på samma höjd som det underlag som patienten ska flyttas till.</p>	<p>3</p> <p>Aktivera bromsarna på båda enheterna.</p>	<p>4</p> <p>Sänk sidogrindarna.</p>	<p>5</p> <p>Flytta patienten (enligt alla gällande säkerhetsregler och inrättningens rutiner).</p>	<p>6</p> <p>Håll in strömbrytaren i två sekunder för att stänga av om patienten inte ska komma tillbaka.</p>
---	--	--	--	---	---


Patienttransport

1




Tryck på knappen för patienttransport för att blåsa upp luftmadrassen något mer än de inställda trycken.

2

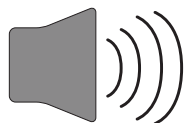


När en ljudsignal hörs och transportknappens lampa lyser grönt, dra ut nätkontakten och linda upp sladden på kroken vid huvudändan.

3

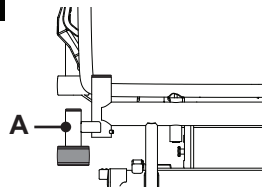


Häng upp patientens dropp på droppställningar och placera dem i hylsorna (A) i sängens alla fyra hörn.

4

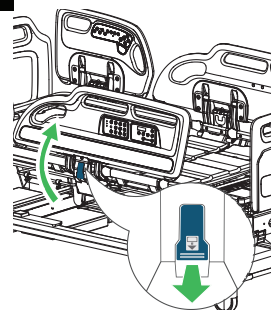


Höj sidogrindarna.

5

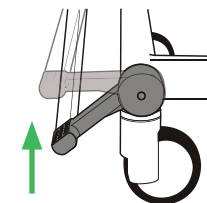

Lossa bromsarna.

6

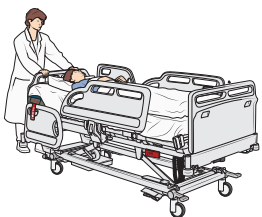

Transportera patienten enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter och vårdinrättningens rutiner.

7

Efter utförd patienttransport, aktivera hjulbromsarna på sänggramen och anslut omedelbart strömsladden till vägguttaget.

8



Håll in strömbrytaren på madrassens styrenhet i två sekunder för att aktivera styrenheten.

