

Citadel plejemodtagerbehandlings- og sengerammesystem

CE
2797

Rengør og desinficer hver uge og før en ny plejemodtager.

Daglig rengøring af Citadel-systemet

Daglig vedligeholdelse og rengøring består i at aftørre alle overflader og sengeheste.

1. Følg pleje- og rengøringsinstruktionerne for det specifikke plejemodtagerunderlag, der anvendes.
2. Flyt plejemodtageren fra sengen, før den rengøres, hvis det er muligt.
3. Træk stikket til Citadel-systemet ud af stikkontakten.
4. Kontrollér elledningen for tegn på slid eller skader. Citadel-systemet må ikke betjenes med en slidt eller beskadiget elledning.
5. Aftør overfladerne med en klud, der er fugtet med varmt sæbevand eller godkendt hospitalsdesinfektionsmiddel.
6. Aftør igen med en klud, der er fugtet med rent vand.
7. Lad alle komponenter tørre helt, før de tages i brug igen.
8. Undersøg alle dele for skader inden brug.
9. Sæt stikket til Citadel-systemet i stikkontakten, og juster indstillingerne.

Rengøring og desinfektion af Citadel-systemet mellem plejemodtagere

Rengøring

1. Fjern madrassen og alt tilbehør fra sengen.
2. Fjern hoved- og fodgærderne samt lagnerne på liggefladen inden rengøring.
3. Rengør alle overflader med en engangsklud, der er fugtet med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
4. Begynd med de øverste sektioner, og rengør langs alle vandrette overflader. Fortsæt mod sengens nedre sektioner, og rengør sengehjulene til sidst. Vær omhyggelig med at rengøre områder, hvor der kan sidde støv eller snavs.
5. Aftør med en ny engangsklud, der er fugtet med rent vand, og tør derefter med papirhåndklæder til engangsbrug.
6. Lad de rengjorte dele tørre.

Desinfektion

7. Når sengen er rengjort, aftørres alle overflader med natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 1.000 dele pr. million (0,1 %) tilgængelig klorin.
I tilfælde af ophobning af kropsvæsker, f.eks. blod, skal koncentrationen af NaDCC øges til 10.000 dele pr. million (1 %) tilgængeligt chlor.
8. Aftør med en ny engangsklud, der er fugtet med rent vand, og tør med papirhåndklæder til engangsbrug.
9. Læg madrassen tilbage på sengen.

