GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Citadel Système thérapeutique et lit avec commandes intégrées



Nettoyer et désinfecter chaque semaine, et avant chaque nouveau patient.

Nettoyage quotidien du système Citadel

L'entretien et le nettoyage quotidiens consistent à essuyer toutes les surfaces et les barrières latérales.

- 1. Observer les consignes d'entretien et de nettoyage pour chaque surface thérapeutique spécifique utilisée.
- 2. Dans la mesure du possible, retirer le patient du let avant le nettoyage.
- 3. Débrancher le système Citadel de la prise secteur.
- Examiner le câble d'alimentation à la recherche de dommages ou de signes d'usure.
 Le système Citadel ne doit en aucun cas être utilisé avec un câble d'alimentation usé ou endommagé.
- 5. Essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau chaude savonneuse ou d'un désinfectant hospitalier homologué.
- 6. Rincer avec un chiffon humidifié avec de l'eau propre.
- 7. Faire entièrement sécher tous les composants avant de les réutiliser.
- 8. Examiner toutes les pièces et vérifier l'absence de tout dommage avant l'utilisation.
- 9. Rebrancher le système Citadel sur une prise murale et régler les paramètres.

Nettoyage et désinfection du système Citadel entre deux patients

Nettoyage

- 1. Retirer le matelas et tous les accessoires du lit.
- 2. Retirer les panneaux de tête et de pieds et les plaques du sommier avant le nettoyage.
- 3. Nettoyer toutes les surfaces avec un linge jetable imprégné d'eau chaude et de solution détergente neutre.
- 4. Commencer par les sections supérieures et toutes les surfaces horizontales. Travailler en finissant par les sections les plus basses du lit et nettoyer les roulettes en dernier. Faire attention aux endroits susceptibles de piéger la poussière ou la saleté.
- 5. Essuyer avec un nouveau chiffon jetable humecté d'eau propre et sécher au moyen de lingettes sèches jetables.
- 6. Laisser sécher les parties nettoyées.

Désinfection

- 7. Après avoir nettoyé le lit, essuyer toutes les surfaces à l'aide d'une solution de dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore actif.
 - Des fluides corporels tels que le sang exigent une concentration plus élevée de DCCNa, de 10 000 ppm (1 %) de chlore disponible.
- 8. Essuyer avec un nouveau chiffon jetable humecté d'eau propre et sécher au moyen de lingettes sèches jetables.
- 9. Replacer le matelas sur le lit.



