

Wekelijks reinigen en desinfecteren, en vóór gebruik door nieuwe zorgvragers.

Citadel-systeem voor dagelijkse reiniging

Dagelijkse zorg en reiniging bestaat uit het afnemen van alle oppervlakken en beddekken.

1. Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies voor het specifiek toegepaste oppervlak waarop de zorgvrager ligt.
2. Haal voorafgaand aan het schoonmaken de zorgvrager uit bed indien mogelijk.
3. Haal de stekker van het Citadel-systeem uit het stopcontact.
4. Inspecteer de voedingskabel op zichtbare slijtage of beschadiging. Gebruik het Citadel-systeem niet als de voedingskabel versleten of beschadigd is.
5. Neem de oppervlakken af met een doek die in een warm sopje of een voor gebruik in ziekenhuizen goedgekeurd desinfectiemiddel is gedompeld.
6. Wrijf na met een met schoon water bevochtigde doek.
7. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u deze weer gebruikt.
8. Inspecteer voor gebruik alle onderdelen op schade.
9. Steek de stekker van het Citadel-systeem in de wandcontactdoos en pas de instellingen aan.

Reinigen en desinfecteren van het Citadel-systeem vóór elke nieuwe zorgvrager

Reinigen

1. Verwijder de matras en alle accessoires van het bed.
2. De hoofd- en voeteneinden en het ligvlak moeten voor het schoonmaken verwijderd worden.
3. Reinig alle oppervlakken met een wegwerpdoek die is bevochtigd met warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
4. Begin met de bovenste delen en werk alle horizontale oppervlakken af. Werk in de richting van de lagere delen van het bed en reinig de zwenkwielen het laatst. Let op de delen waar zich vuil of stof kan ophopen.
5. Veeg af met een nieuwe wegwerpbare doek bevochtigd met schoon water en droog vervolgens met wegwerpbare papieren handdoeken.
6. Laat de gereinigde delen drogen.

Desinfecteren

7. Na het bed gereinigd te hebben, neem alle vlakken af met een oplossing van natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) (0,1%).
In geval van besmetting met lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, moet de concentratie van NaDCC worden verhoogd tot 10.000 ppm (1%) beschikbare chloor.
8. Veeg af met een nieuwe wegwerpbare doek bevochtigd met schoon water en droog vervolgens met wegwerpbare papieren handdoeken.
9. Plaats het matras weer terug op het bed.