

Citadel pasientbehandlingssystem og sengerammesystem



Rengjør og desinfiser ukentlig og før nye pasienter.

Daglig rengjøring av Citadel-systemet

Daglig stell og rengjøring består av å tørke av alle overflater og sengehester.

1. Følg instruksjonene for pleie og rengjøring for det spesifikke pasientunderlaget som brukes.
2. Fjern om mulig pasienten fra sengen før rengjøring.
3. Trekk støpselet til Citadel-systemet ut av stikkkontakten.
4. Kontroller om det finnes tegn på slitasje eller skade på strømledningen. Citadel-systemet skal ikke brukes hvis strømledningen er slitt eller skadet.
5. Tørk av overflatene med en klut dyppet i varmt såpevann eller godkjent desinfeksjonsmiddel til sykehusbruk.
6. Skyll med en klut fuktet med rent vann.
7. La alle komponenter tørke helt før de tas i bruk igjen.
8. Se etter skade på alle deler før bruk.
9. Sett støpselet til Citadel-systemet i stikkkontakten og juster innstillingene.

Rengjøring og desinfisering av Citadel-systemet mellom pasienter

Rengjøring

1. Fjern madrassen og alt ekstrautstyr fra sengen.
2. Fjern hodegjerdet, fotbrettet og lakenene på madrassengebunnen før rengjøring.
3. Rengjør alle overflater med en engangsklut fuktet med varmt vann og et nøytralt vaskemiddel.
4. Begynn med de øvre delene og jobb langs alle horisontale overflater. Arbeid mot de nedre delene av sengen og rengjør hjulene til sist. Vær oppmerksom på områder som kan fange opp støv eller skitt.
5. Tørk over med en ny engangsklut fuktet med rent vann, og tørk deretter med papirhåndklær for engangsbruk.
6. La de rengjorte delene tørke.

Desinfisering

7. Etter at sengen er rengjort, tørker du av alle flater med natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) med en konsentrasjon på 1000 deler pr million (0,1 %) tilgjengelig klor.
Hvis det har oppstått flekker med kroppsvæske, f.eks. blod, bør NaDCC-konsentrasjonen økes til 10 000 deler per million (1 %) tilgjengelig klor.
8. Tørk over med en ny engangsklut fuktet med rent vann, og tørk med papirhåndklær for engangsbruk.
9. Legg madrassen tilbake på sengen.