

Rama łóżka / System terapeutyczny Citadel



Czyścić i dezynfekować raz w tygodniu oraz przed zmianą pacjenta.

Codzienne czyszczenie systemu Citadel

W ramach codziennej pielęgnacji i czyszczenia przetrzeć wszystkie powierzchnie i poręczne boczne.

1. Instrukcje konserwacji i czyszczenia zastosować także dla powierzchni, na której umieszczony jest pacjent.
2. W miarę możliwości, przed czyszczeniem zdjąć pacjenta z łóżka.
3. Odłączyć system Citadel od gniazda ściennego.
4. Sprawdzić przewód zasilający pod kątem zużycia lub uszkodzeń. System Citadel nie powinien być używany, jeśli przewód zasilania jest zużyty lub uszkodzony.
5. Powierzchnie przecierać szmatką nasączoną roztworem mydła w ciepłej wodzie lub szpitalnym środkiem dezynfekcyjnym.
6. Wymyć szmatką nasączoną czystą wodą.
7. Przed oddaniem do dalszej eksploatacji dokładnie wysuszyć wszystkie elementy.
8. Sprawdzić wszystkie części przed użyciem.
9. Podłączyć system Citadel do gniazda ściennego i dostosować ustawienia.

Czyszczenie i dezynfekcja systemu Citadel pomiędzy pacjentami

Czyszczenie

1. Zdjąć materac i wszystkie akcesoria z łóżka.
2. Przed czyszczeniem zdjąć z łóżka panele wezglowia, podnózek i platformę materaca.
3. Wyczyścić wszystkie powierzchnie jednorazową ściereczką nasączoną ciepłą wodą i neutralnym detergentem.
4. Zacząć od czyszczenia górnych części i przejść do pozostałych powierzchni poziomych. Następnie stopniowo przechodzić do dolnych części łóżka, a na zakończenie wyczyścić kółka. Zwrócić uwagę na miejsca, w których mogą gromadzić się brud i kurz.
5. Wytrzeć świeżą szmatką jednorazowego użytku, zwilżoną w czystej wodzie i osuszyć jednorazowymi ręcznikami papierowymi.
6. Wysuszyć wyczyszczone elementy.

Dezynfekcja

7. Po wyczyszczeniu łóżka należy przetrzeć wszystkie powierzchnie środkiem z NaDCC o stężeniu 1000 ppm (0,1%) czynnego chloru.
Tam gdzie gromadzą się płyny ustrojowe, np. krew, stężenie NaDCC powinno zostać zwiększone do 10 000 ppm (1%) czynnego chloru.
8. Wytrzeć świeżą szmatką jednorazowego użytku, zwilżoną w czystej wodzie i osuszyć jednorazowymi ręcznikami papierowymi.
9. Położyć materac z powrotem na łóżku.

