

Терапевтическая система пациента и система каркаса кровати Citadel



Выполняйте очистку и дезинфекцию еженедельно, а также перед каждым новым пациентом.

Ежедневная очистка системы Citadel

Ежедневный уход и очистка подразумевает протирание все поверхностей и боковых ограждений.

1. Следуйте инструкциям по очистке и уходу для той опорной поверхности, которую использует пациент.
2. По возможности перед очисткой переместите пациента с кровати.
3. Отключите систему Citadel от настенной розетки.
4. Осмотрите кабель питания на предмет износа или повреждений. Если кабель электропитания системы Citadel изношен или поврежден, эксплуатация системы недопустима.
5. Протрите поверхности салфеткой, смоченной в теплой мыльной воде или дезинфицирующем средстве, разрешенном к применению в медицинском учреждении.
6. Протрите салфеткой, смоченной в чистой воде.
7. Перед возобновлением эксплуатации системы дождитесь полного высыхания всех ее компонентов.
8. Осмотрите все компоненты перед использованием.
9. Подключите систему Citadel к настенной розетке и настройте параметры.

Очистка и дезинфекция системы Citadel перед новым пациентом

Очистка

1. Снимите с кровати матрас и все вспомогательное оборудование.
2. Перед очисткой необходимо снять изголовье, изножье и панели матрасной платформы.
3. Очистите все поверхности одноразовой салфеткой, смоченной в теплой воде с нейтральным моющим средством.
4. Начиная с верхних секций, обработайте все горизонтальные поверхности. Выполните очистку, переходя от верхних к нижним секциям кровати. Очистку колес проводите в последнюю очередь. Будьте внимательны при очистке зон возможного скопления пыли и грязи.
5. Протрите еще раз новой одноразовой салфеткой, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо одноразовыми бумажными полотенцами.
6. Дайте очищенным компонентам высохнуть.

Дезинфекция

7. После очистки кровати протрите все поверхности раствором дихлоризоцианурата натрия (NaDCC) в концентрации 1000 частей на миллион (0,1 %) активного хлора.
При наличии физиологических выделений, например крови, концентрацию NaDCC необходимо увеличить до 10 000 частей на миллион (1 %) активного хлора.
8. Протрите еще раз новой одноразовой салфеткой, смоченной в чистой воде, и вытрите насухо одноразовыми бумажными полотенцами.
9. Положите матрас обратно на кровать.