

Rengör och desinficera varje vecka och före en ny patient.

Daglig rengöring av Citadel-systemet

Daglig skötsel och rengöring innefattar avtorkning av alla ytor och sidogrindar.

1. Följ anvisningarna för skötsel och rengöring för det patientunderlag som används.
2. Avlägsna om möjligt patienten från sängen före rengöring.
3. Koppla ur Citadel-systemet från vägguttaget.
4. Kontrollera om strömkabeln uppvisar några tecken på slitage eller skador. Citadel-systemet får inte användas med en sliten eller skadad strömkabel.
5. Torka av ytorna med en trasa som doppats i varm tvållösning eller godkänt desinficeringsmedel som används inom sjukvården.
6. Skölj med en duk fuktad med rent vatten.
7. Låt alla komponenter torka helt innan de används igen.
8. Inspektera alla delar med avseende på skador före användning.
9. Koppla in Citadel-systemet i vägguttaget och justera inställningarna.

Rengöring och desinficering av Citadel-systemet mellan patienter

Rengöring

1. Avlägsna madrassen och alla tillbehör från sängen.
2. Ta bort huvud- och fotgavlarna och lakanen på madrassplattformen före rengöring.
3. Rengör alla ytor med en engångsduk fuktad med varmt vatten och neutralt rengöringsmedel.
4. Börja vid de övre delarna och rengör längs alla horisontella ytor. Arbeta mot sängens nedre delar och rengör till sist styrhjulen. Var uppmärksam på områden där det kan ansamlas damm eller smuts.
5. Torka med en ny engångstrasa fuktad med vatten och torka därefter med pappershanddukar.
6. Låt de rengjorda delarna torka.

Desinficering

7. När du har rengjort sängen torkar du av alla ytor med natriumdiklorisocyanatlösning (NaDCC) med en koncentration på 1 000 ppm (0,1 %) fritt klor.
Om det har ansamlats kroppsvätskor, t.ex. blod, ska koncentrationen av NaDCC ökas till 10 000 ppm (1 %) fritt klor.
8. Torka med en ny engångstrasa fuktad med vatten och torka med pappershanddukar.
9. Lägg tillbaka madrassen på sängen.