
Citadel Plus




CPR-Notfallauslösung

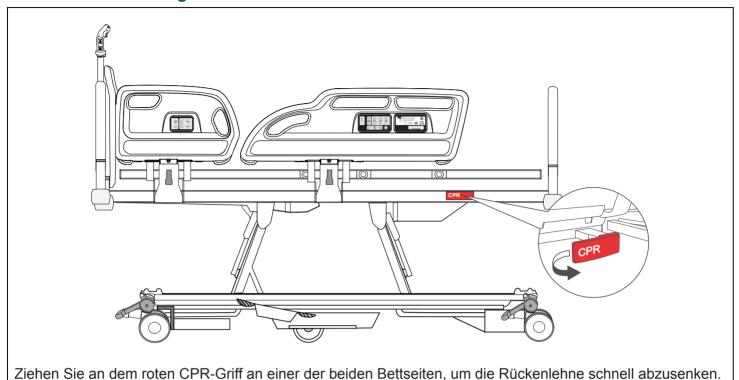

Bremsen und Lenken



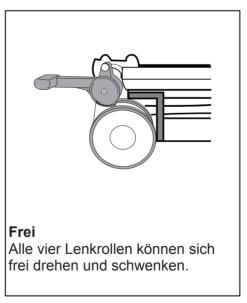




Die Bremsen sollten stets arretiert sein, wenn das Bett steht.



Sicherheitsseiten




Stellen Sie sicher, dass der Schließmechanismus sicher eingerastet ist, wenn die Sicherheitsseiten hochgestellt werden.

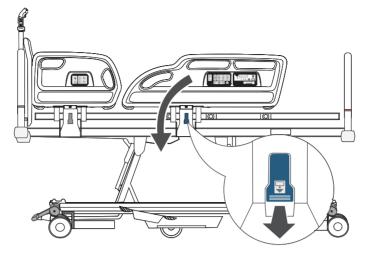


Ziehen Sie an dem blauen Lösehebel, um die Sicherheitsseite abzusenken. Um die Sicherheitsseite nach oben zu klappen, halten Sie den Griff der Sicherheitsseite fest und ziehen Sie die Sicherheitsseite nach oben vom Bett weg, bis sie in der hochgeklappten Position einrastet.


Anpassung der Bettlänge (drei Positionen)

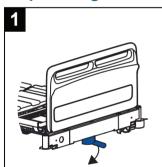


Ziehen Sie den blauen Verriegelungshebel heraus.

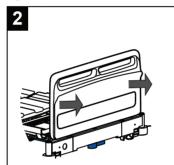

Ziehen Sie den Bettrahmen in die gewünschte Position aus und lassen Sie den Griff los

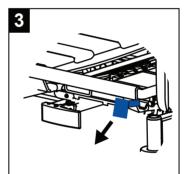

Ziehen Sie den blauen Verlängerungsgriff heraus.

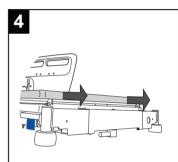


Ziehen Sie die Liegefläche bis zur gewünschten Position heraus.

Anpassen der Bettbreite



An jeder Seite sind vier Erweiterungslaschen vorhanden. Sie befinden sich hinter dem Erweiterungssymbol.

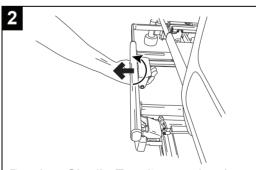

Drücken Sie die Erweiterungslasche zusammen, um sie zu entriegeln, und ziehen Sie den entsprechenden Abschnitt so weit heraus, bis er vollständig ausgefahren ist.



Wiederholen Sie diesen Schritt bei allen Erweiterungsgriffen.

