
# **Citadel Plus**





### Commande CPR du dossier

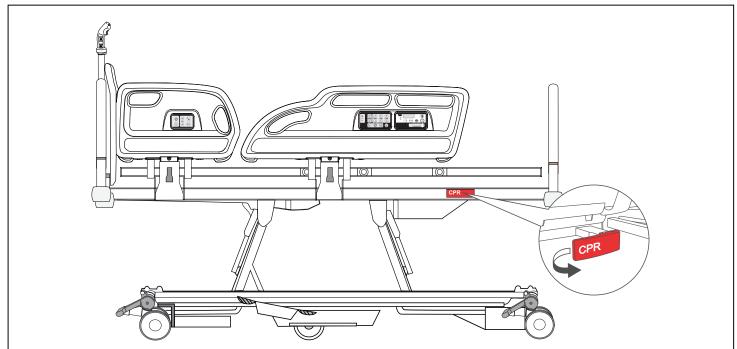


Tirer sur la poignée manuelle rouge de CPR située de chaque côté du lit pour abaisser rapidement le dossier.

## Freins et roulette directionnelle

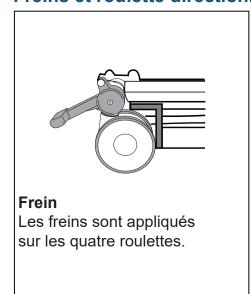

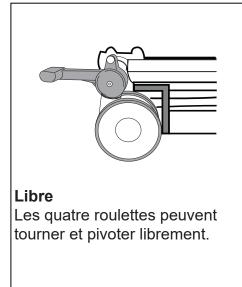

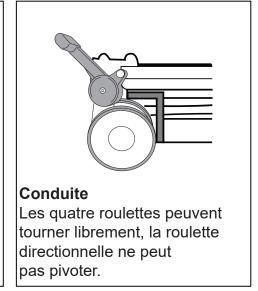


Les freins doivent être enclenchés chaque fois que le lit est en position stationnaire.



#### **Demi-barrières latérales**




S'assurer que le mécanisme de blocage est correctement enclenché lorsque les barrières de lit sont relevées.

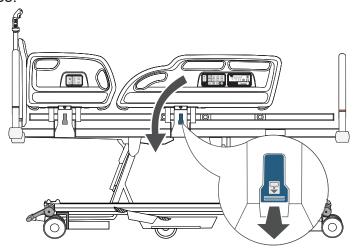


Tirer le levier de verrouillage bleu et abaisser la demi-barrière.

Pour la relever, tirer la demi-barrière vers le haut et la remonter en l'écartant du lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position relevée.


## Réglage de la longueur du lit (trois positions possibles)

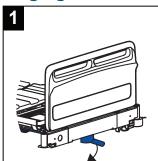


Tirer la poignée de verrouillage d'extension bleue.

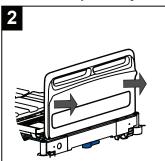

Tirer le sommier jusqu'à la position requise, puis relâcher la poignée.

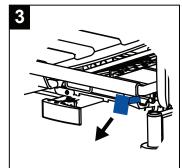

Tirer la poignée d'extension bleue.

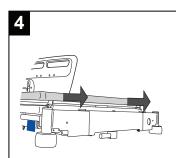


Tirer le sommier dans la position souhaitée.

# Réglage de la largeur du lit



Repérer les loquets d'extension de largeur situés derrière le symbole d'extension (quatre de chaque côté).

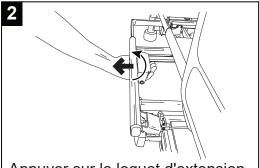

Appuyer sur le loquet d'extension pour déverrouiller et tirer sur la section jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée. 3

Veiller à répéter cette étape pour tous les loquets d'extension.