


Sblocco RCP schienale

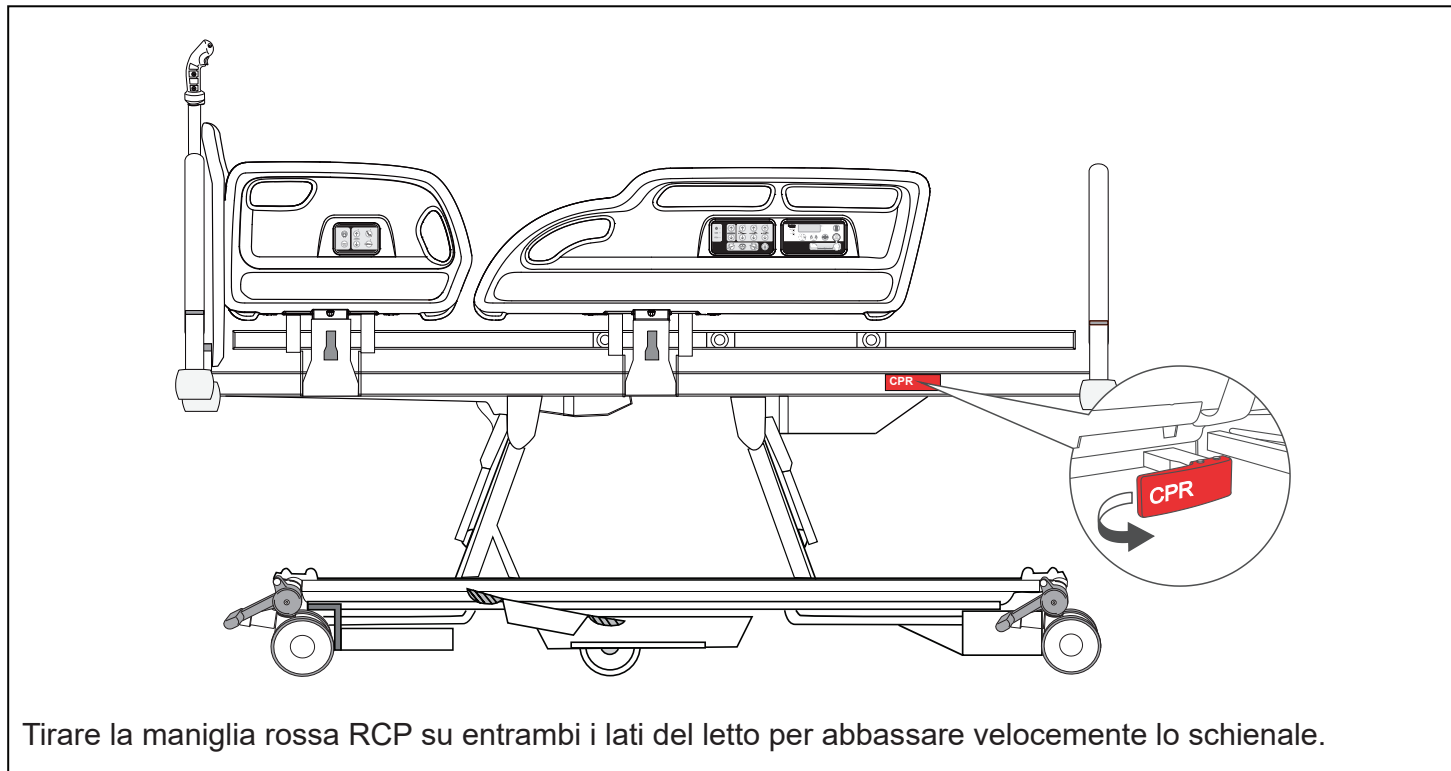

Sistema frenante e di guida




I freni devono essere sempre inseriti quando il letto è fermo.

Spondine laterali



Dopo aver alzato le spondine laterali, assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio sia attivato correttamente.

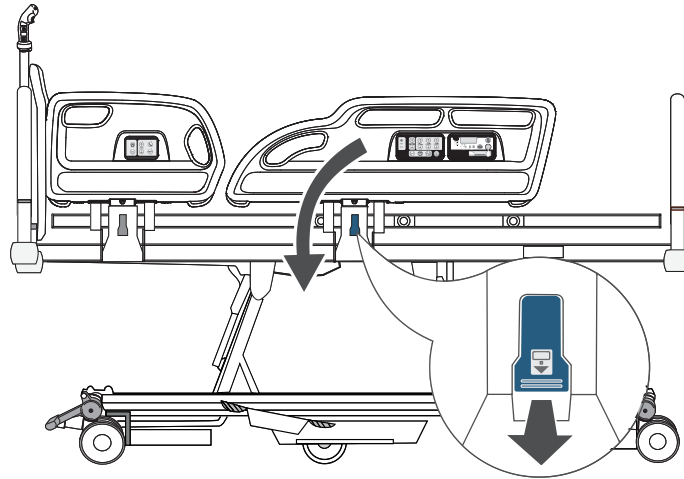


Tirare la leva di sgancio blu per abbassare la spondina laterale.

Per alzare la spondina laterale, afferrare la maniglia della spondina e tirarla verso l'alto e verso l'esterno, fino a bloccarla in posizione alzata.


Regolazione della lunghezza del letto (tre posizioni predefinite)

1

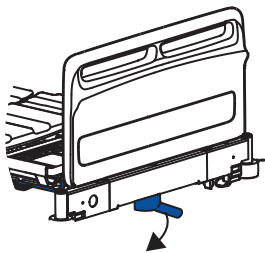


Tirare la maniglia di bloccaggio estensione blu.

2

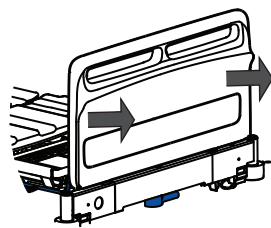


Estrarre il telaio del letto fino alla posizione desiderata, quindi rilasciare la maniglia.

3

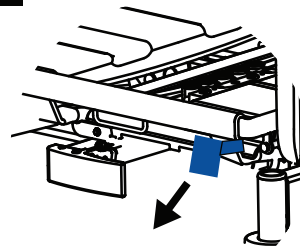

Tirare la maniglia per estensione blu.


4

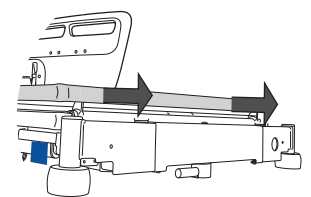

Estrarre il pianale fino alla posizione desiderata.


Regolazione della larghezza del letto

1

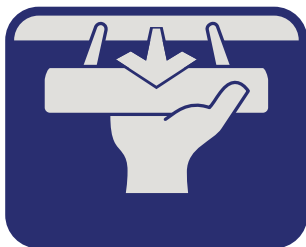

Trovare i dispositivi di chiusura dell'estensione collocati dietro il simbolo di estensione (quattro per lato).

2

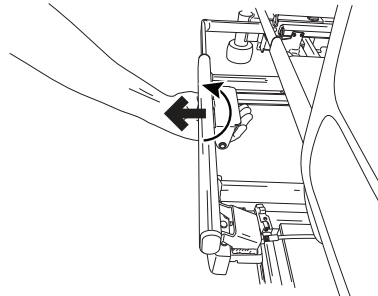

Schiacciare il dispositivo di chiusura dell'estensione per sbloccare e tirare la sezione finché non si estende completamente.

3

Ripetere la procedura per tutti i dispositivi di chiusura dell'estensione.