

Nødvendigt tilbehør:

- Beskyttelsestøj
- Neutralt rengøringsmiddel
- Natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 1.000 ppm (0,1 %) tilgængeligt chlor
- Natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 10.000 ppm (1 %) tilgængeligt chlor
- Varmt vand
- Engangsklude
- Engangspapirhåndklæder

Sengen skal rengøres og desinficeres hver uge, og før en ny plejemodtager skal tage den i brug.

## Rengøring og desinfektion mellem plejemodtagere

### Rengøring

1. Fjern madrassen og alt tilbehør fra sengen.
2. Fjern hoved- og fodgærderne samt lagnerne på liggefladen fra sengen.
3. Rengør alle overflader med en engangsklud, der er fugtet med vand og et neutralt rengøringsmiddel.  
Begynd med sengens øverste sektioner, og rengør langs alle vandrette overflader.  
Fortsæt metodisk mod sengens nederste sektioner, og rengør sengehjulene til sidst.
4. Aftør med en ny engangsklud, der er fugtet med vand, og tør efter med papirhåndklæder til engangsbrug.
5. Lad de rengjorte dele tørre.

### Desinfektion

6. Når sengen er rengjort, aftørres alle overflader med natrium-diklorisocyanurat (NaDCC) i en koncentration på 1.000 dele pr. million (0,1 %) tilgængelig klorin. I tilfælde af ophobning af kropsvæsker, f.eks. blod, skal koncentrationen af NaDCC øges til 10.000 dele pr. million (1 %) tilgængeligt chlor.
7. Aftør med en ny engangsklud, der er fugtet i rent vand, og tør efter med papirhåndklæder til engangsbrug.
8. Læg madrassen tilbage på sengen.

## Daglig rengøring

Daglig pleje og rengøring består af aftørring af alle overflader og sengeheste.

1. Følg pleje- og rengøringsinstruktionerne for det specifikke plejemodtagerunderlag, der anvendes.
2. Flyt om muligt plejemodtageren fra sengen, før den rengøres.
3. Træk stikket til bariatriplejesystemet Citadel Plus ud af stikkontakten.
4. Kontrollér elledningen for tegn på slid eller skader. Bariatriplejesystemet Citadel Plus må ikke betjenes med en slidt eller beskadiget elledning. Kontakt Arjo, hvis der findes skader.
5. Aftør overfladerne med en klud, der er dyppet i varmt sæbevand, eller godkendt hospitalsdesinfektionsmiddel.
6. Aftør med en klud, der er fugtet med rent vand.
7. Lad alle komponenter tørre helt, før de tages i brug igen.
8. Efterse alle dele for skader, før de tages i brug igen. Kontakt Arjo efter behov vedrørende service eller udskiftning.
9. Sæt stikket til bariatriplejesystemet Citadel Plus i stikkontakten, og tilpas indstillingerne.

