## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

# Citadel Plus



#### Accesorios necesarios:

- Ropa protectora
- Detergente neutro
- Dicloroisocianurato sódico (NaDCC) a una concentración de 1000 ppm (0,1 %) de cloro disponible
- Dicloroisocianurato sódico (NaDCC) a una concentración de 10 000 ppm (1 %) de cloro disponible
- Agua caliente
- Paños desechables
- Toallitas de papel desechables

La cama se debe limpiar y desinfectar cada semana y antes de que un nuevo paciente la utilice.

## Limpieza y desinfección entre pacientes

### Limpieza

- 1. Retire el colchón y todos los accesorios de la cama.
- 2. Retire de la cama el cabecero, el piecero y las láminas del somier.
- 3. Limpie todas las superficies con un paño desechable humedecido con agua y un detergente neutro.
  - Empiece por las partes superiores de la cama y continúe con todas las superficies horizontales.
  - Trabaje de forma metódica hacia las secciones inferiores de la cama y limpie las ruedas en último lugar.
- 4. Limpie estas áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua y séquelas con toallitas de papel desechables.
- 5. Espere a que los componentes limpios se sequen.

#### Desinfección

- 6. Después de limpiar la cama, limpie todas las superficies con dicloroisocianurato sódico (NaDCC) en una concentración de 1.000 partes por millón (0,1%) de cloro disponible. Si hay manchas de fluidos corporales, p. ej. sangre, se deberá aumentar la concentración de NaDCC hasta 10 000 partes por millón (1 %) de cloro disponible.
- 7. Limpie estas áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua limpia y séquelas con toallitas de papel desechables.
- 8. Vuelva a colocar el colchón en la cama.



# Limpieza diaria

Los cuidados y la limpieza diarios consisten en limpiar todas las superficies y las barandillas laterales.

- 1. Siga las instrucciones de cuidado y limpieza de la superficie de apoyo del paciente específica que se utilice.
- 2. Cuando sea posible, retire al paciente de la cama antes de limpiarla.
- 3. Desconecte el sistema para cuidado bariátrico Citadel Plus de la toma de red.
- 4. Examine el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o daños. El sistema para cuidado bariátrico Citadel Plus nunca debe ser usado si el cable de alimentación está desgastado o dañado. Póngase en contacto con Arjo si encuentra algún daño.
- 5. Limpie las superficies con un paño humedecido en agua jabonosa templada o con un desinfectante autorizado para uso hospitalario.
- 6. Enjuague con un paño humedecido con agua limpia.
- 7. Deje que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a utilizarlos.
- 8. Inspeccione todos los componentes en busca de daños antes de volver a utilizarlos. Para solicitar mantenimiento o piezas de recambio, póngase en contacto con Arjo.
- 9. Conecte el sistema para cuidado bariátrico Citadel Plus a la toma de red y ajuste la configuración.

