

Citadel Plus

Plaatsing zorgvrager - voorbereiding

1



Vergrendel de zwenkwielremmen.

2




Zet de ligondersteuning horizontaal.

3



Stel het bed in op een comfortabele werkhoogte.

4

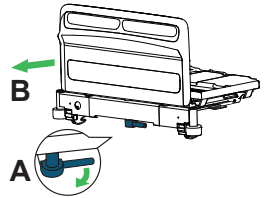

Verleng het kader en het ligvlak waar nodig.

5



Voeg kussens, dekens en andere apparatuur toe.

6




Druk op de nul-knop om de weegunit terug te zetten op nul.

7




Stel de hoogte van het ligsysteem zo in dat deze op dezelfde hoogte staat als het oppervlak waarnaar de zorgvrager wordt overgebracht.

8

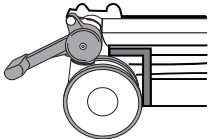


Vergrendel de zwenkwielremmen van alle eenheden.

9

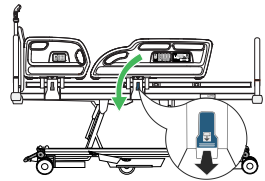


Breng de beddekken omlaag.

10

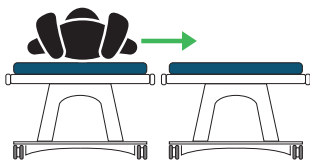


Verplaats de zorgvrager volgens alle veiligheidsregels en protocollen die in uw instelling van toepassing zijn.


11

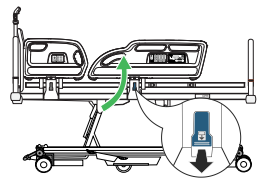

Breng alle beddekken omhoog en vergrendel deze.

De zorgvrager wegen

 Niet bedoeld voor dosering van geneesmiddelen



Weeg de zorgvrager indien nodig.

Plaatsing zorgvrager - voltooiing

1




Druk op de knoppen In bed of Uitstapalarm om de gevoeligheid van het VariZone detectiesysteem voor zorgvragerbeweging te activeren en in te stellen.

2



Breng het bed op een hoogte die zo laag mogelijk is, rekening houdend met praktische functies en cliëntcomfort

3

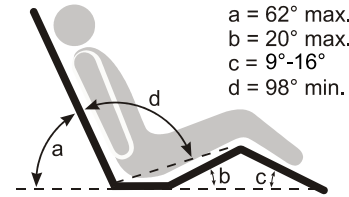

Breng het bed in de gewenste hoek voor het comfort van de zorgvrager.


4



Blokkeer bedfuncties waar nodig.


Zorgvragertransfer vanuit bed

1

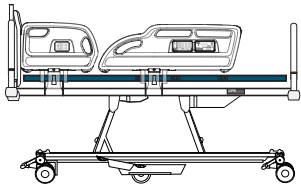


Zet de ligondersteuning horizontaal.

2

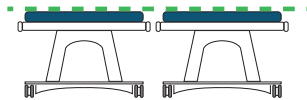


Stel de hoogte van het ligsysteem zo in dat deze op dezelfde hoogte staat als het oppervlak waarnaar de zorgvrager wordt overgebracht.

3

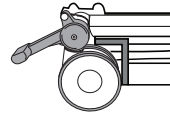


Vergrendel de zwenkwielremmen van alle eenheden.

4

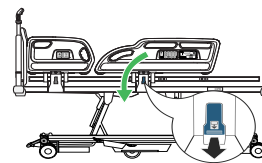

Breng de beddekken omlaag.

5

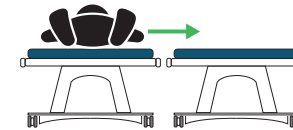

Verplaats de zorgvrager volgens alle veiligheidsregels en protocollen die in uw instelling van toepassing zijn.


6



Indien de zorgvrager niet zal terugkeren:
- Trek het snoer uit het stopcontact en druk op de batterijstroomknop.
- Schakel de batterijstroom en alle functies uit.


Zorgvrager vervoeren

1

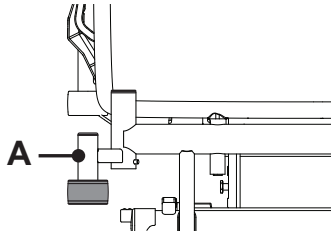

Plaats de IV-therapie van de zorgvrager indien nodig op de infuusstandaarden.

2

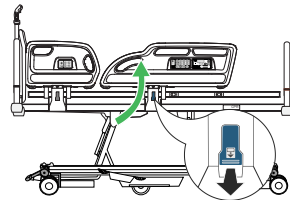


Breng de beddekken omhoog en vergrendel deze.

3




Duw alle verbredingen naar binnen vóór het transport.

4

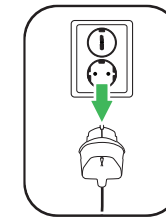


Verwijder het stroom snoer uit het stopcontact.

5

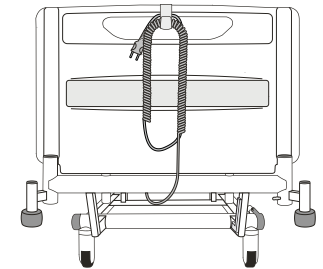

Wikkel het snoer op de beugels aan het hoofdeinde van het bed.

6

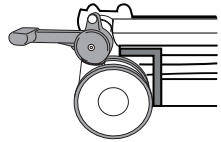


Ontgrendel de rem.

7




Gebruik de elektrische aandrijving om het verplaatsen bij te staan.

8

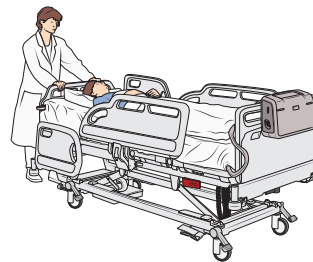

Verplaats de zorgvrager volgens alle veiligheidsregels en protocollen die in uw instelling van toepassing zijn.

9

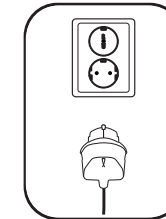

Steek na het transport van de zorgvrager de stekker van de voedingskabel weer in de wandcontactdoos.