

Citadel Plus

Patientplacering – förberedelser

1



Aktivera
hjulbromsarna.

2




Gör patientunderlaget
plant.

3




Justera sängen
till en bekväm
arbetshöjd.

4

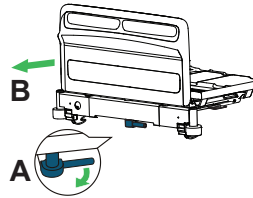


Förläng vid behov
ramen och madrass-
plattformen.

5

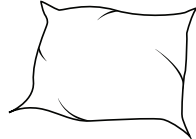


Lägg dit kuddar,
täcken och annan
utrustning.

6




Tryck på knappen
Nollställning för att
återställa vågen till noll.

7

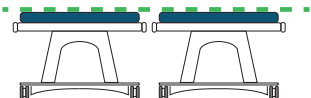


Ställ in patient-
underlagets nivå
på samma höjd som
det underlag som
patienten ska
flyttas till.

8

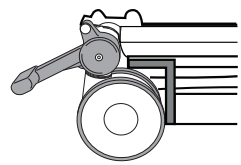


Aktivera hjulbromsarna
på alla enheter.

9

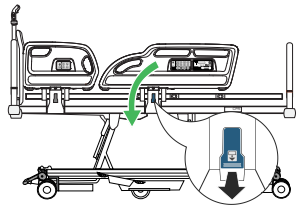

Fäll ned
sidograndarna.

10

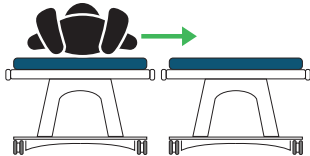

Flytta över patienten
enligt alla gällande
säkerhetsföreskrifter
och vårdinrättningens
rutiner.

11



Fäll upp och lås alla
sidograndar.

Väga patienten

 Ej för läkemedels-
dosering



Väg vid behov
patienten.

Patientplacering – slutförande

1




Tryck på någon av knapparna i sängen eller Urstigning för att aktivera och ange känslighet för VariZone-systemet för detektering av patientrörelser.

2



Sänk ned sängen till den lägsta höjd som är praktiskt möjlig så att patienten ligger bekvämt.

3

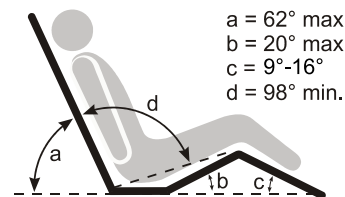

Ställ in sängen i önskad vinkel så att patienten har det bekvämt.


4



Lås vid behov sängfunktionerna.


Överflyttning av patienten från sängen

1

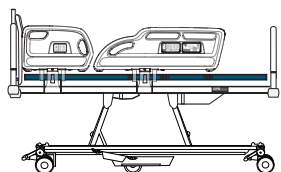


Gör patientunderlaget plant.

2

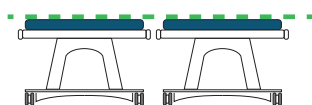


Ställ in patientunderlagets nivå på samma höjd som det underlag som patienten ska flyttas till.

3

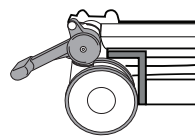


Aktivera hjulbromsarna på alla enheter.

4

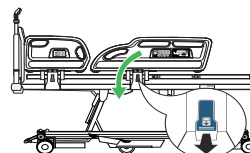

Fäll ned sidogrindarna.

5

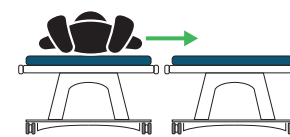

Följ alla tillämpliga säkerhetsregler och institutionens rutiner när patienten flyttas.


6



Om patienten inte kommer att återkomma:
- Dra ut strömsladden och tryck på batteri-strömknappen.
- Inaktivera batteri-strömmen och stäng av strömmen till alla funktioner.


Patienttransport

1

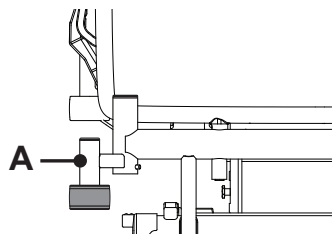

Häng vid behov upp patientens droppåse på droppställningar.

2

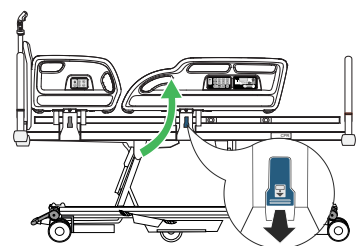


Fäll upp och lås sidogrindarna.

3




Skjut in alla breddutvidgningar före transport.

4

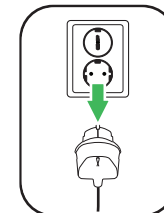


Ta ut strömsladden ur vägguttaget.

5

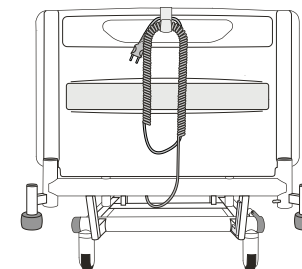

Linda sladden runt fästena vid sängens huvudände.

6

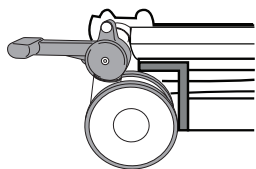


Lossa bromsarna.

7




Använd motordrivning för att underlätta transport.

8

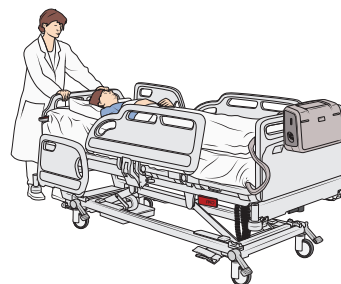

Transportera patienten enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter och vårdinrättningens rutiner.

9

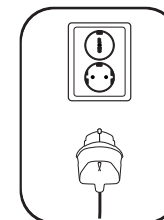

Koppla in strömkabeln i ett vägguttag efter patienttransport.